

Belmont opplæring brukere - 45 til 60 minutter per gruppe

- gå gjennom opplæringsmateriell, anbefale egen-trening

- instruksjonsvideoer mm www.vingmed-as.no → Service og Support → Ressurssenter
passord 1383Asker
- brukerveiledning, les fra side 1 til 24
- hurtigveiledninger, les igjennom

Indikasjoner

- Infusjon av blodprodukter og klare væsker
- Infusjon av oppvarmet væske ved hypotermi
- Skylling med oppvarmet væske ved urologiske prosedyrer

Kontraindikasjoner

- ikke brukes til trombocytter
- ikke administrering av legemidler
- ikke bruk kalsium-holdige væsker som Ringer Ac. sammen med blodprodukter

- presentere apparatet

- effekt: hever temp. på 500 mL væske 34°C per minutt = ca. 2 SAG per minutt
- ≤ 50 mL/min temperatur ut = 39°C og ≥ 60 mL/min = 37,5°C
- på batteri; maks 50 mL/min ingen oppvarming, batteriet holder minst 1/2 time
- vise stativ og oppheng av apparatet
- forklare strømkabel og lading
- vise alle sider av apparatet
- presentere alle deler inne i maskinen, se evt. punktene 1 til 7 i oversikten under

- oppsett; sette inn slangesettet

- fyller slangesettet i tre trinn: 1. blodfilteret 2. slangene inne i maskinen 3. pasientslangen

- primingvolum; blodfilter 120 mL, inne i apparatet 84 mL, pasientslangen 28 mL

- bruk av apparatet, knottologi, alle feltene på skjermen

- alarmer og advarsler, løse disse

- fremprovosere for høyt trykk ved høy inf. hastighet gjennom tynt kateter
- fremprovosere for høyt trykk gjennom å lage knekk på pas. slangen
- fremprovosere tom pose / luft inn i apparatet
- manuell drift i krisesituasjoner; se side 14 i brukerveiledningen

- avslutte prosedyren; trykk stopp, klem av pasientslangen, slå av apparatet, fjern slangesettet

- renhold / desinfisering se brukerveiledning side 28 til 29 og side 39

- tilbehør / forbruksvarer

