

Nødåpning av legemiddelkabinett med nøkler

Bak skapet – 2 ulike nøkler merket bakplate

Lås opp og ta av bakplaten



Tell ned til skuffen du har behov for å åpne- det er en lås og kabel pr skuff.




På låsen er det en pinne (blå pil), skyv den til høyre for å åpne skuffen. Pass på kablene når dere dytter skuffen ut.



Matrise skuff- denne er nå åpen.

Sliding skuff

Denne er lukket. Dere må skru av strømmen via kabinett konfigurasjon eller på toppen for å åpne skuffen manuelt. Det er 4 lameller, øverste laget dytt en mot deg og en inn mot skapet. Neste 2- skyv en til høyre og en til venstre. Skyv tilbake til en firkant før dere lukker skuffen.

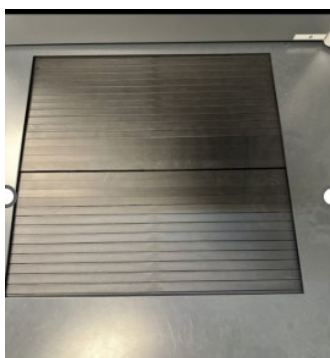

På toppen- åpne dør

Låsen sitter på toppen, vri og dra låsesylindren opp.



Kjøleskap

Låsen hvor det ikke går inn nettverkskabel!! Samme måte som dør, vri og dra opp låsesylindren.