


Førstegangs pålogging, skanne finger og sette startskjerm


07.11.24 – Medsmart v 2.2.5.9

Ved førstegangs pålogging trykk **ikke bio id bruker & ny brukeroppføring**

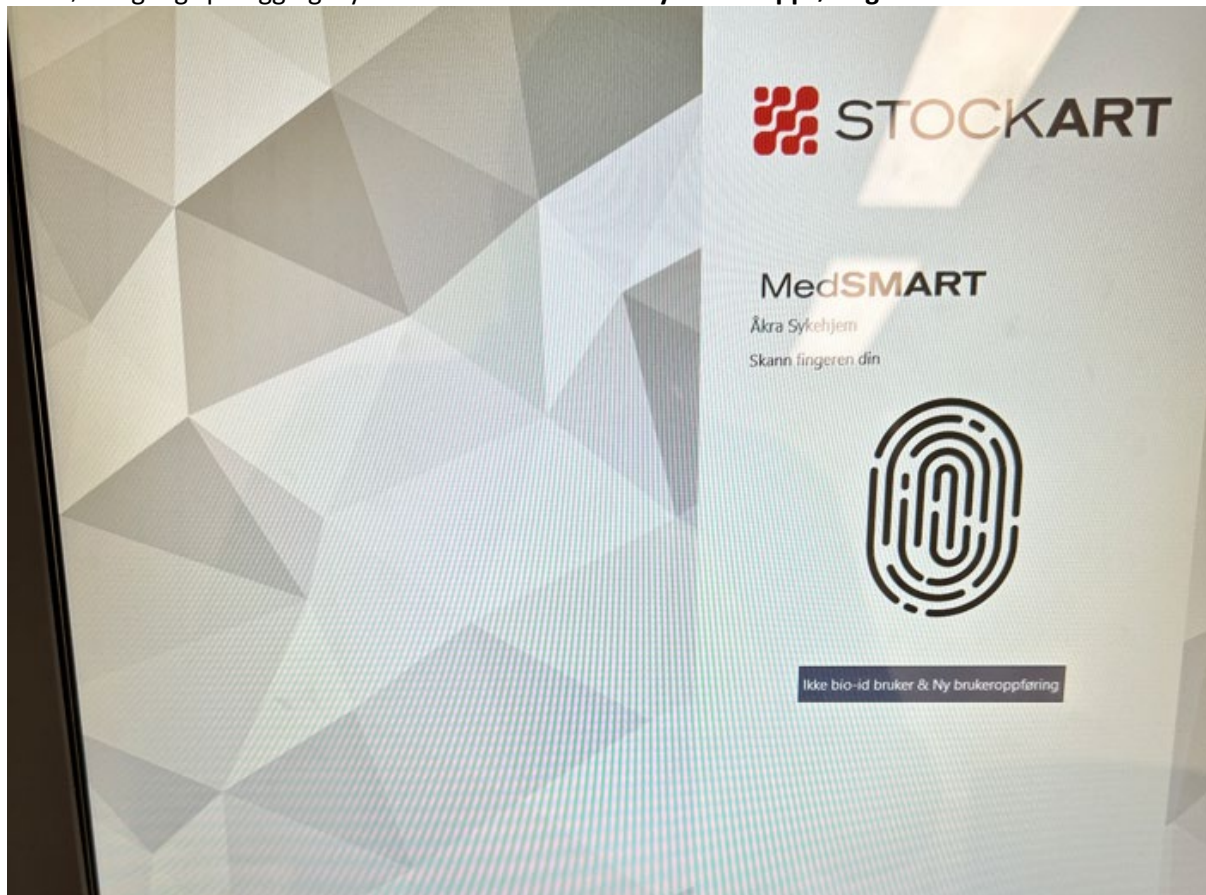


Skriv inn brukernavn og passord. Dette skal være likt det brukernavnet og passordet du har når du logger deg på PCen.


Trykk så på **Innstillinger og brukerinnstillinger**

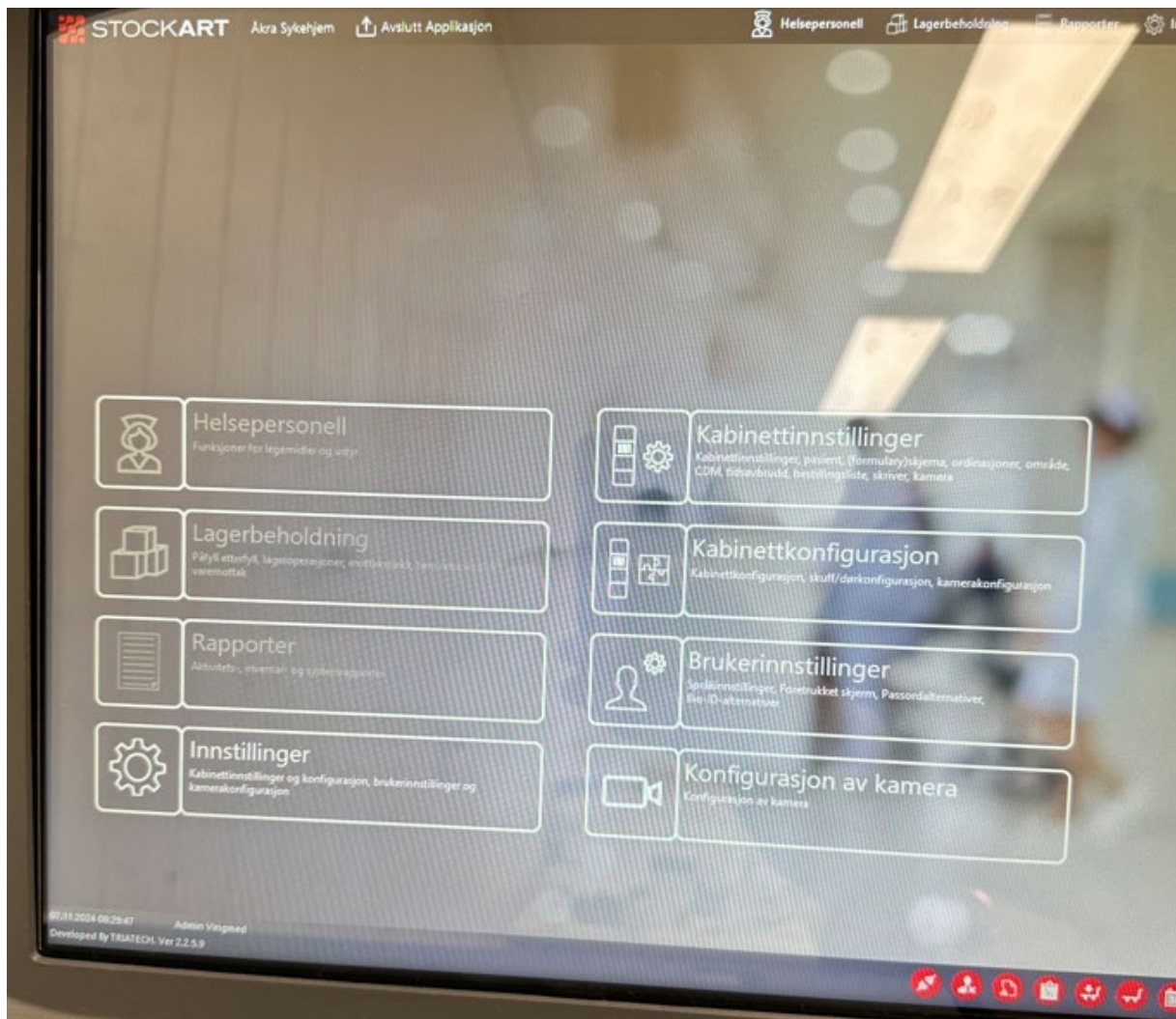

Her kan du definere foretrukket startskjerm og skanne finger for å lagre bio-id

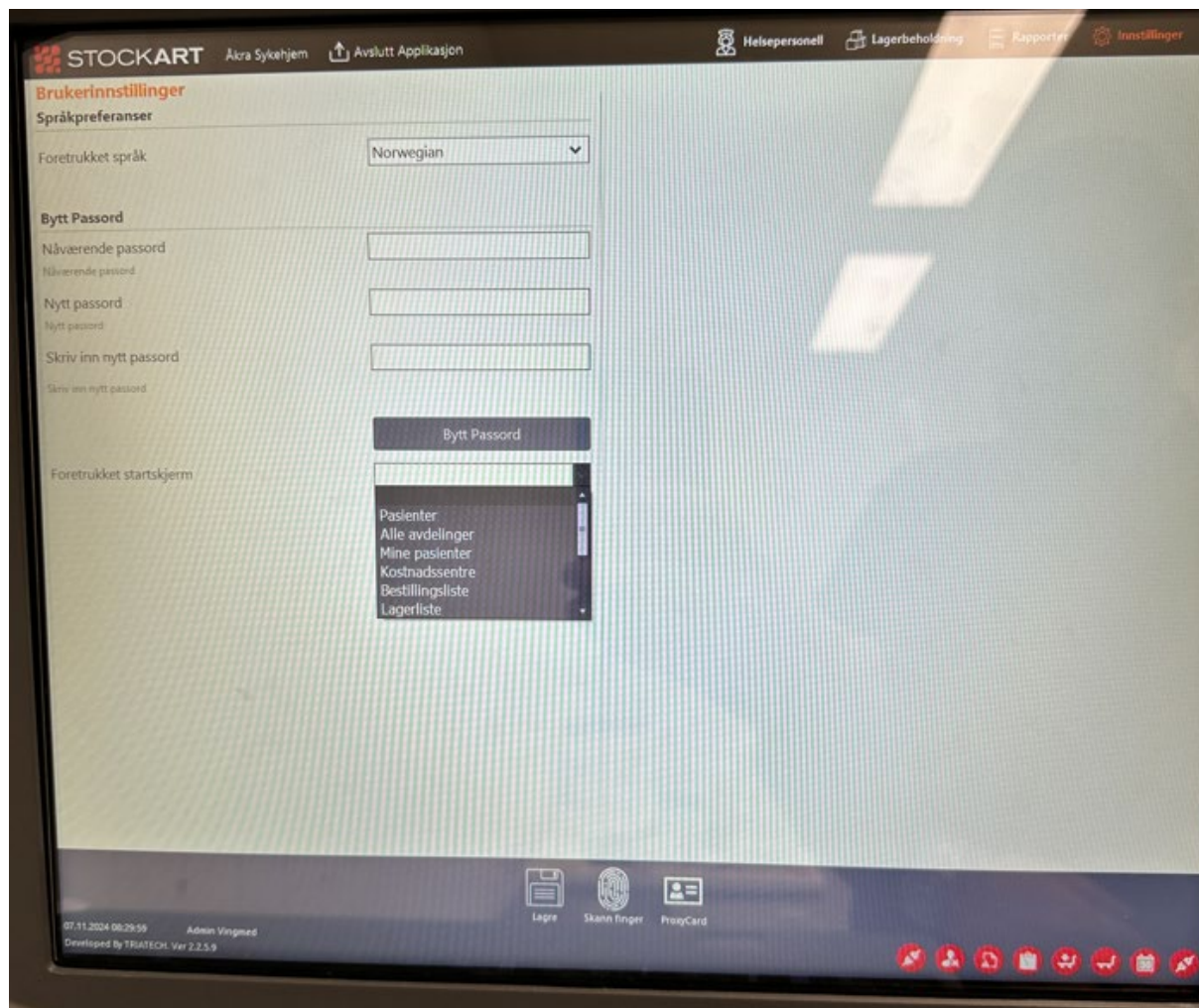

VINGMED

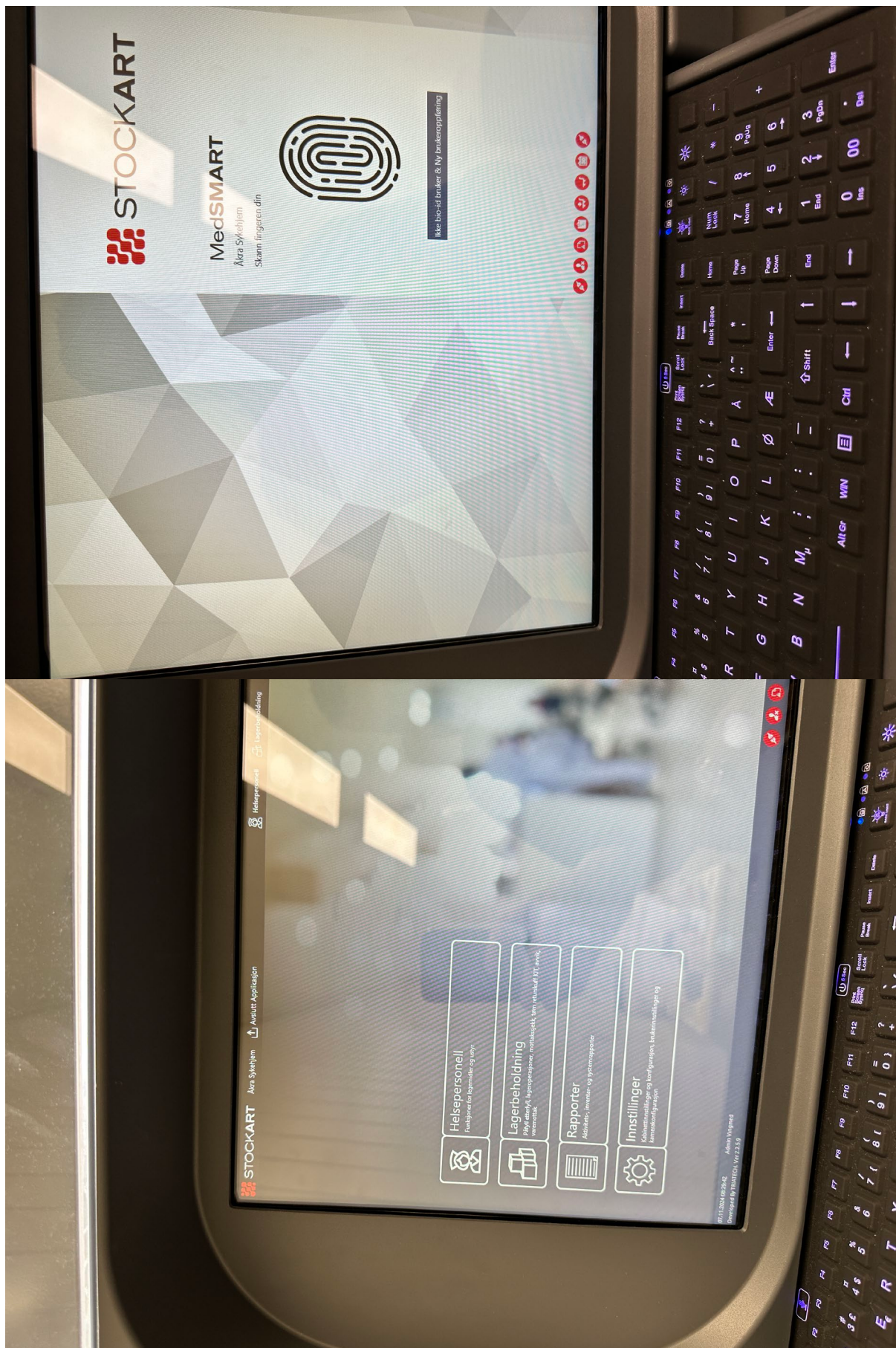

Vingmed AS – Sobråveien 13, N-1383 Asker, Norway
Phone +47 67 58 06 80 – Telefax: +47 67 10 12 12 – Acc.no. 7159.05.06243
A/C for international payments: NO07 7159 0506 243 – Swift: DNBANOKKTNS
Org.no.: 848 236 632 MVA

