

På legemiddelkabinettet – V. 5.9 til 2.2.5.94 (oppdatert 16.12.25)

Innhold

Logge inn.....	2
Uttak av legemidler	4
Uttak av endoser.....	8
Retur	9
Avfall.....	12
Opprette pasient - hvis den ikke kommer over fra journalsystemet.....	14
Avvikshåndtering på kabinettet.....	15
Rapporter / se info om legemidler på lager	17
Lagerbeholdning.....	18
Ved første gangs påfylling av legemiddel.....	19
Påfylling som endoser	23
Etterfylle legemidler påfylt som endoser	26
Påfylling i kjøleskap.....	27
Påfylling via plukklister.....	29
Individuell etterfylling.....	30
Lagertelling / endring av innstillinger på legemidler	32
Utløpte legemidler.....	34
Flytte legemidler	36
Opprette lommer i kjøleskap og åpne hyller	37
Gjenoppretting av skuff – Utføres av superbruker.....	39
Tømme returskuff.....	40
Endre konfigurasjon / layout i skuffer og dører	42

Logge inn


Ved første gangs innlogging- trykk ikke bio id bruker for deretter:

Logg deg på med brukernavn, trykk neste, så passord.




Legge til bio id:

Gå på innstillinger og deretter brukerinnsstillinger

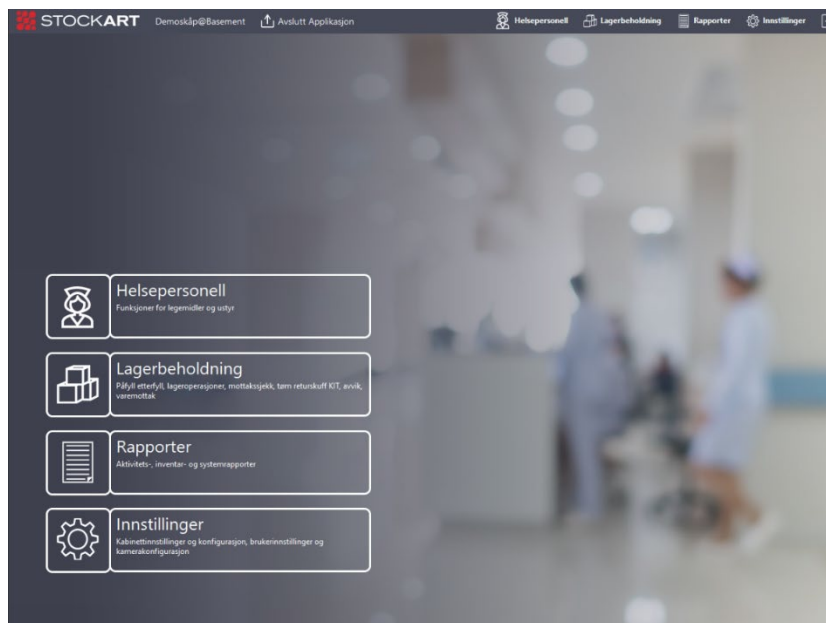

Velg skann finger

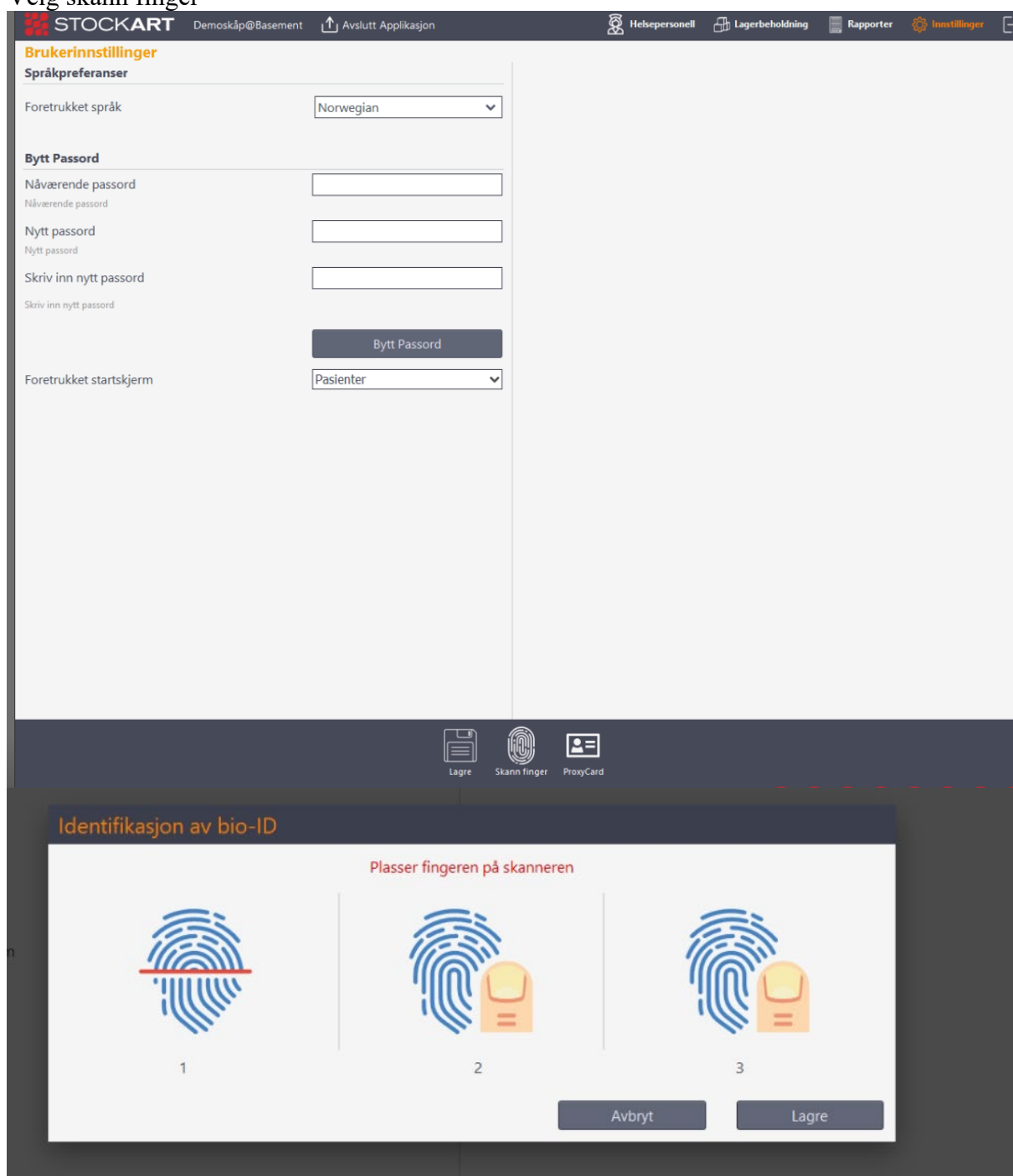


The screenshot shows the STOCKART application interface. At the top, there's a navigation bar with the STOCKART logo, a demo email address, and links for 'Avslutt Applikasjon', 'Helsepersonell', 'Lagerbeholdning', 'Rapporter', and 'Innstillinger'. The main content area is titled 'Brukerinnstillinger' (User Settings) and contains sections for 'Språkpreferanser' (Language preferences) with a dropdown for 'Foretrukket språk' (Preferred language) set to 'Norwegian', 'Bytt Passord' (Change Password) with fields for 'Nåværende passord' (Current password), 'Nytt passord' (New password), and 'Skriv inn nytt passord' (Enter new password), and a 'Bytt Passord' button. Below this is a dropdown for 'Foretrukket startskjerm' (Preferred start screen) set to 'Pasienter' (Patients). At the bottom of the settings panel are icons for 'Lagre' (Save), 'Skann finger' (Scan finger), and 'ProxyCard'. Below the settings panel is a modal window titled 'Identifikasjon av bio-ID' (Bio-ID identification) with the instruction 'Plasser fingeren på skanneren' (Place finger on scanner). It shows three sequential steps: 1. A blue fingerprint icon with a red line across it. 2. The same icon with an orange scanner icon below it. 3. The same icon with the scanner icon and a green checkmark below it. At the bottom of the modal are 'Avbryt' (Cancel) and 'Lagre' (Save) buttons.

Skann 3 ganger, det skal bli grønn hake på alle tre, deretter lagre.


Da er det klart for å logge inn med bio id. Man kan selv bytte finger hvis det skulle bli sår etc på finger som er registrert.

På foretrukken startskjerm kan dere sette pasienter, da kommer dere rett inn på pasientoversikten når dere logger inn. Husk å trykk lagre før dere går ut av bildet med brukerinnsstillinger.

Uttak av legemidler

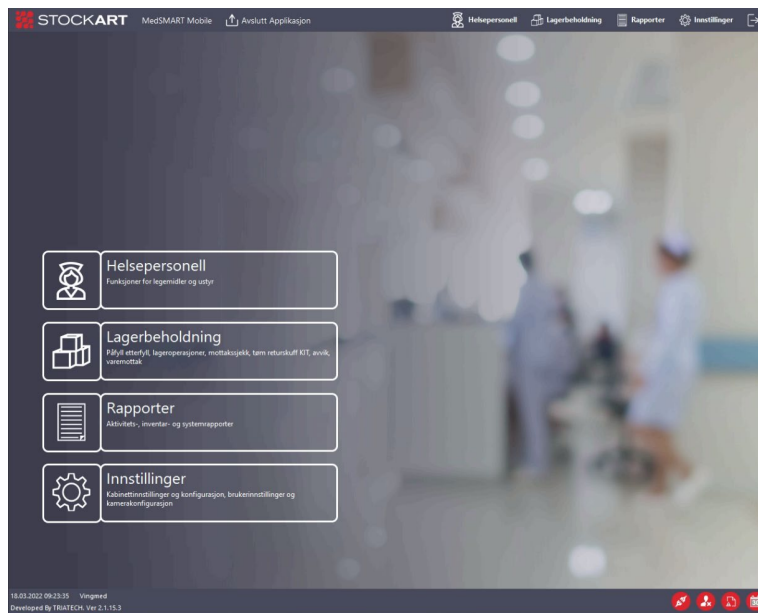

For uttak av legemidler: velg Helsepersonell:

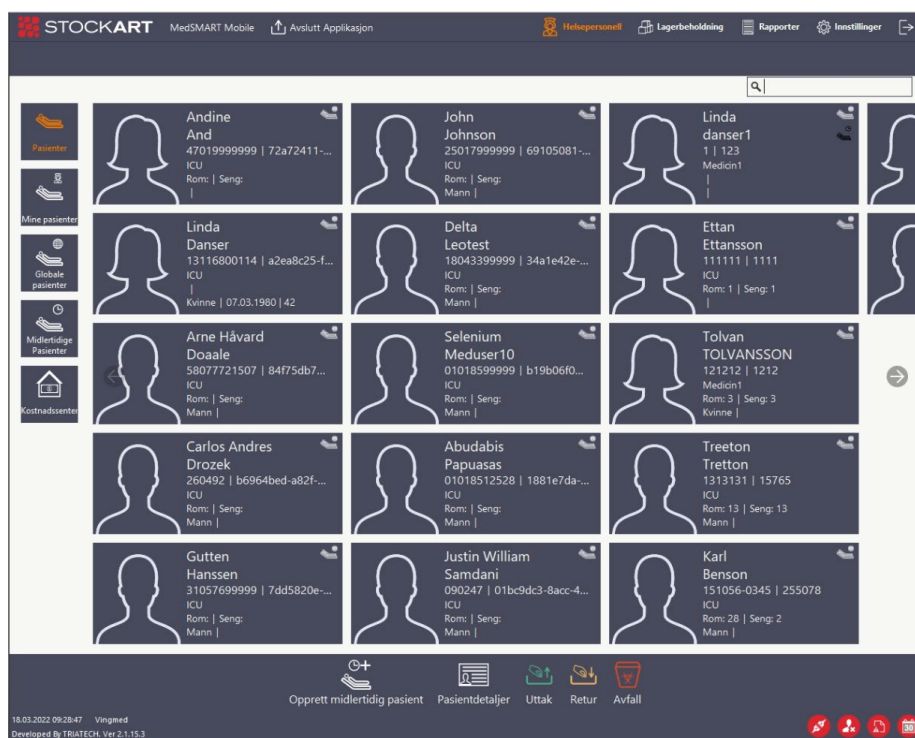

Velg pasient, deretter uttak:

Da kommer alle legemidler som er påfylt i skapet opp, med riktig lagerantall.
Søk etter legemiddel.

Hvis du er usikker på synonym – skriv inn virkestoff i søkefeltet.

STOCKART MedSMART Mobile Avslutt Applikasjon

Andine And | 47019999999 | 72a72411-def7-4395-a1c6-1b565d239d54

- | - | Uidentifisert | - | - | -

Legemidler

Legemiddel	Antall	Utgangspunkt
511873 Acetylsalisylyre	99	Enterot...
Alblyl-E enterotab 75 mg 75 mg Enterotablett		
064543 Metoklopramid	43	Tablett
Afipran tab 10 mg 10 mg Tablett		
022708 Valsartan og diuretika	32	Tablett
Diovan Comp tab 160 mg/12.5 mg 12.5 mg Tablett		
588471 Buprenorfin	20	Depotp...
Buprefarm depotplaster 5 mikrog/time 5 mikrog/1 time Depotplaster		
000362 Esomeprazol	16	Enterot...
Nexium enterotab 20 mg 20 mg Enterotablett		
083621 Paracetamol	13	Tablett
Panodil tab 500 mg 500 mg Tablett		
003112 Levitracetam	5	Tablett
Keppra tab 500 mg 500 mg Tablett		
111481 Acetylcystein	3	Bruseta...
Acetylcystein Sandoz bruseta 200 mg 200 mg Bruseta		
001878 Brinzolamid	2	Oyedra...
Azopt eyedr 10 mg/ml 10 mg/1 ml Oyedråper		
011866 Morfin	2	Injeksjo...
Morfin inj. oppl 10 mg/ml 10 mg/1 ml Injeksjonsvæske, oppløsning		

Utvalgsliste

Tilbake til pasienter Uttak Legemiddel liste Tidligere uttak

18.03.2022 09:29:21 Vingmed
Developed By TRIATECH, Ver 2.1.15.3

Velg antallet du skal ha:

STOCKART MedSMART Mobile Avslutt Applikasjon

Andine And | 47019999999 | 72a72411-def7-4395-a1c6-1b565d239d54

- | - | Uidentifisert | - | - | -

Legemidler

Legemiddel	Antall	Utgangspunkt
511873 Acetylsalisylyre	99	Enterot...
Alblyl-E enterotab 75 mg 75 mg Enterotablett		
064543 Metoklopramid	43	Tablett
Afipran tab 10 mg 10 mg Tablett		
022708 Valsartan og diuretika	32	Tablett
Diovan Comp tab 160 mg/12.5 mg 12.5 mg Tablett		
588471 Buprenorfin	20	Depotp...
Buprefarm depotplaster 5 mikrog/time 5 mikrog/1 time Depotplaster		
000362 Esomeprazol	16	Enterot...
Nexium enterotab 20 mg 20 mg Enterotablett		
083621 Paracetamol	13	Tablett
Panodil tab 500 mg 500 mg Tablett		
003112 Levitracetam	5	Tablett
Keppra tab 500 mg 500 mg Tablett		
111481 Acetylcystein	3	Bruseta...
Acetylcystein Sandoz bruseta 200 mg 200 mg Bruseta		
001878 Brinzolamid	2	Oyedra...
Azopt eyedr 10 mg/ml 10 mg/1 ml Oyedråper		
011866 Morfin	2	Injeksjo...
Morfin inj. oppl 10 mg/ml 10 mg/1 ml Injeksjonsvæske, oppløsning		

Utvalgsliste

Inngående mengde

511873 Acetylsalisylyre
Alblyl-E enterotab 75 mg 75 mg Enterotablett

- 1.00 +

X ✓

Tilbake til pasienter Uttak Legemiddel liste Tidligere uttak

18.03.2022 09:30:49 Vingmed
Developed By TRIATECH, Ver 2.1.15.3

Når du har lagt til alle legemidlene som pasienten skal ha på listen som heter utvalgsliste, velg uttak.

The screenshot shows the STOCKART MedSMART Mobile application interface. At the top, there's a header with the application name and navigation icons. Below the header, there's a search bar and a list of medications under the 'Legemidler' tab. The list includes various drugs like Acetylsalicylsyre, Albyl-E enterotab, Afipran tab, etc. To the right, there's a 'Utgang' (Exit) button. At the bottom, there's a navigation bar with icons for 'Tilbake til pasienter', 'Uttak', 'Legemiddel liste', and 'Tidligere uttak'.

Da kommer dette bildet opp – for C og F medisiner, trykk grønn knapp med Neste

The screenshot shows the 'Inngående mengde' (Incoming quantity) screen in the STOCKART MedSMART Mobile application. It displays a grid of medication codes (A01-A08, B01-B08, C01-C08, D01-D08, E01-E08, F01-F08, G01-G08, H01-H08, I01-I08) and a list of medications. The 'Utgang' (Exit) button is visible on the right. Below the grid, there's a section for 'Inngående mengde' (Incoming quantity) with a dropdown menu for 'Antall' (Quantity) and a date picker for 'Utlepsdato' (Dispensing date). At the bottom, there's a navigation bar with icons for 'Avbryt', 'Hopp over', and 'Prosess'.

For A og B preparater må det bekreftes antallet som man finner i lommen **FØR** man tar ut valgte antall.



	1	2	3	4	5	6	7	8
A	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08
B	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08
C	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08
D	D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08
E	E01	E02	E03	E04	E05	E06	E07	E08
F	F01	F02	F03	F04	F05	F06	F07	F08
G	G01	G02	G03	G04	G05	G06	G07	G08
H	H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07	H08
I	I01	I02	I03	I04	I05	I06	I07	I08

588471 Buprenorfin

Buprefarm depotplaster 5 mikrog/time 5 mikrog/1 time Depotplaster

Komponent : 2 - Single SMARTMatrix Drawer Lomme : A03-1*1 Enhet : Depotplaster

Funnet mengde

Er lagermengden riktig?

20 Depotplaste

Avbryt
Ja
Nei

Helsepersonell

Lage

Utvalgsliste

A ta

588471 | Buprenorfin

Buprefarm depotplaster 5 mikrog/time 5 mikrog/1 time

Tatt

511873 | Acetylsalicylsyre

Albyl-E enterotab 75 mg 75 mg

003112 | Levitracetam

Keppra tab 500 mg 500 mg Ta

Utdel liste Tidligere uttak

Uttak av endoser

Ved uttak av legemidler som er påfylt som endoser får dere opp følgende bilde

Tell endoser

432994 - Oksykodon - Oxycodone Hameln inj/inf, oppl 10 mg/ml (10x1 ml)
6 - Double Sliding Drawer - K01-1*1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	A01			A04			A07	A08	A09	A10		
B							B07	B08	B09			
C							C07	C08	C09			
D	D01	D02			D05	D06				D10		D12
E	E01											
F	F01					F06						
G	G01	G02	G03	G04								
H	H01	H02										
I	I01									I10	I11	I12
J	J01	J02	J03	J04	J05					J10	J11	J12
K	K01	K02	K03		K05	K06				K10	K11	K12
L	L01	L02			L05					L10	L11	L12
M	M01	M02			M05	M06	M07	M08		M11	M12	
N	N01	N02	N03	N04	N05	N06	N07			N11	N12	

Tom lomme
Påfylte lomme

Oppdater

Hvis lommen er tom – marker den oransje ruten slik at den blir hvit, og trykk oppdater

Tell endoser

432994 - Oksykodon - Oxycodone Hameln inj/inf, oppl 10 mg/ml (10x1 ml)
6 - Double Sliding Drawer - K01-1*1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	A01			A04			A07	A08	A09	A10		
B							B07	B08	B09			
C							C07	C08	C09			
D	D01	D02			D05	D06				D10		D12
E	E01											
F	F01					F06						
G	G01	G02	G03	G04								
H	H01	H02										
I	I01									I10	I11	I12
J	J01	J02	J03	J04	J05					J10	J11	J12
K	K01	K02	K03		K05	K06				K10	K11	K12
L	L01	L02			L05					L10	L11	L12
M	M01	M02			M05	M06	M07	M08		M11	M12	
N	N01	N02	N03	N04	N05	N06	N07			N11	N12	

Tom lomme
Påfylte lomme

Oppdater

Da kommer dere tilbake til uttaksbildet og tar uttak på nytt, og blir guidet til riktig lomme

Utvalgsliste

Til uttak

432994 | Oksykodon
Oxycodone Hameln inj/inf, oppl 10 mg/ml (10x1 ml)


1
Injeksjons-/inf us

Retur

Samme oppskrift for retur av alle preparater.

Kan kun returnere **innen 48 timer** etter uttak.

Velg pasient, trykk deretter på gul knapp for retur

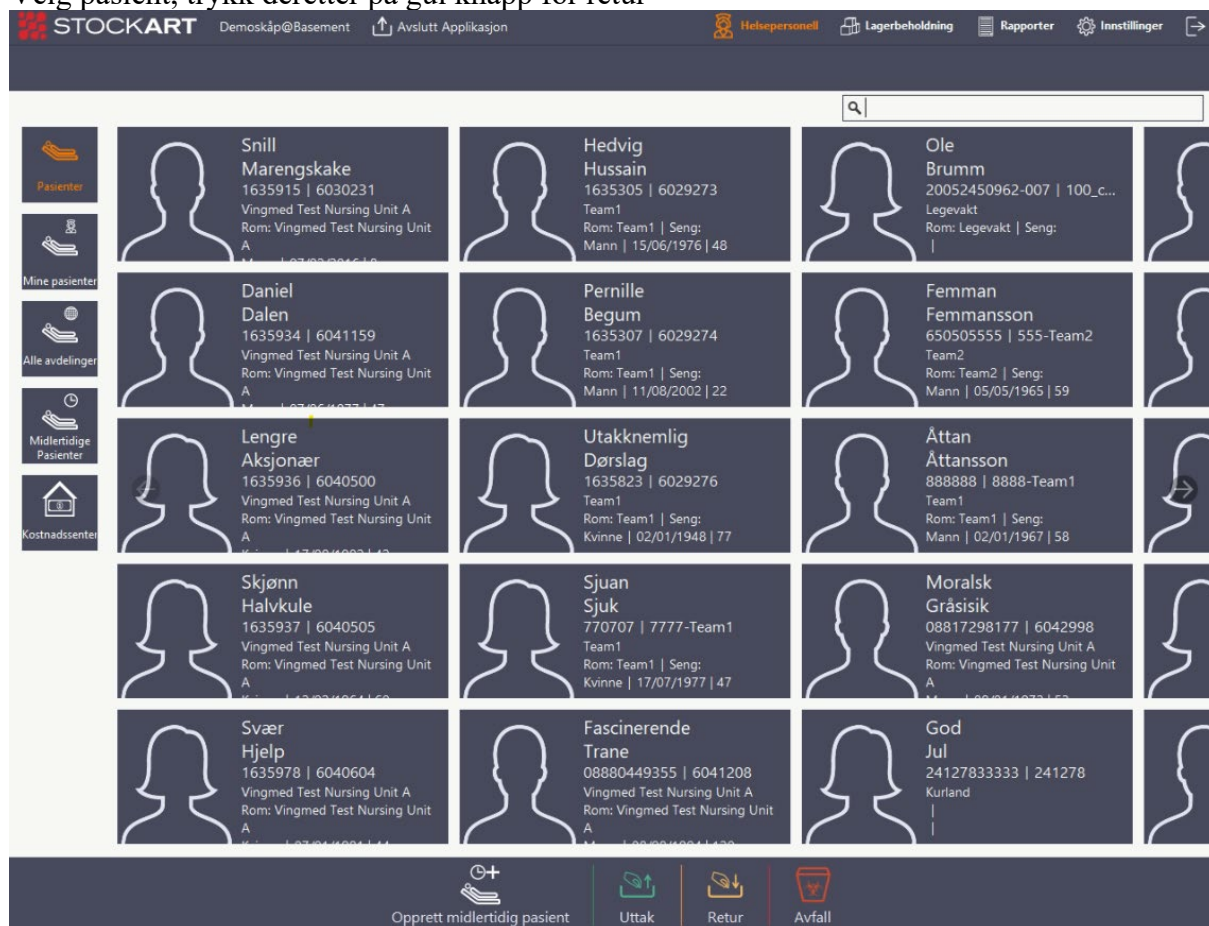

STOCKART Demoskåp@Basement Avslutt Applikasjon Helsepersonell Lagerbeholdning Rapporter Innstillinger

Search:

Pasienter

Mine pasienter

Alle avdelinger

Midlertidige Pasienter

Kostnadscenter

Snill Marengskake 1635915 6030231 Vingmed Test Nursing Unit A Rom: Vingmed Test Nursing Unit A Mann 15/06/1976 48	Hedvig Hussain 1635305 6029273 Team1 Rom: Team1 Seng: Mann 15/06/1976 48	Ole Brumm 20052450962-007 100_c... Legevakt Rom: Legevakt Seng:
Daniel Dalen 1635934 6041159 Vingmed Test Nursing Unit A Rom: Vingmed Test Nursing Unit A Mann 15/06/1976 48	Pernille Begum 1635307 6029274 Team1 Rom: Team1 Seng: Mann 11/08/2002 22	Femman Femmansson 650505555 555-Team2 Team2 Rom: Team2 Seng: Mann 05/05/1965 59
Lengre Aksjonær 1635936 6040500 Vingmed Test Nursing Unit A Rom: Vingmed Test Nursing Unit A Kvinne 02/01/1967 58	Utakknemlig Dørslag 1635823 6029276 Team1 Rom: Team1 Seng: Kvinne 02/01/1948 77	Åttan Åttansson 888888 8888-Team1 Team1 Rom: Team1 Seng: Mann 02/01/1967 58
Skjønn Halvkule 1635937 6040505 Vingmed Test Nursing Unit A Rom: Vingmed Test Nursing Unit A Kvinne 17/07/1977 47	Sjuan Sjuk 770707 7777-Team1 Team1 Rom: Team1 Seng: Kvinne 17/07/1977 47	Moralsk Gråsisik 08817298177 6042998 Vingmed Test Nursing Unit A Rom: Vingmed Test Nursing Unit A Mann 15/06/1976 48
Svær Hjelp 1635978 6040604 Vingmed Test Nursing Unit A Rom: Vingmed Test Nursing Unit A Mann 15/06/1976 48	Fascinerende Trane 08880449355 6041208 Vingmed Test Nursing Unit A Rom: Vingmed Test Nursing Unit A Mann 15/06/1976 48	God Jul 24127833333 241278 Kurland

Opprett midlertidig pasient Uttak Retur Avfall

Velg legemidlene som skal returneres og antall.

STOCKART

Demosk p@Basement

Avslutt Applikasjon

Helsepersonell

Lagerbeholdning

Rapporter

Innstillinger

Snill Marengske | 1635915 | 6030231

06/02/2016 | 8 | Mann | - | - | -

Tatt

009587 | Oksykodon

18/01/2025 11:32

3

Mikstur

092188 | Esomeprazol

18/01/2025 11:31

4

Enterokapsel

089019 | Kodein og paracetamol

18/01/2025 11:31

1

Tablett

089019 | Kodein og paracetamol

18/01/2025 11:31

1

Tablett

080314 | Fentanyl

18/01/2025 11:31

1

Depotplaster

Utvalgsliste

Tilbake til pasienter

Pasientdetaljer

Retur

Legemiddel liste

Tidligere returnerte varer

STOCKART

Demosk p@Basement

Avslutt Applikasjon

Helsepersonell

Lagerbeholdning

Rapporter

Innstillinger

Snill Marengske | 1635915 | 6030231

06/02/2016 | 8 | Mann | - | - | -

Tatt

009587 | Oksykodon

18/01/2025 11:32

3

Mikstur

092188 | Esomeprazol

18/01/2025 11:31

4

Enterokapsel

089019 | Kodein og paracetamol

18/01/2025 11:31

1

Tablett

089019 | Kodein og paracetamol

18/01/2025 11:31

1

Tablett

080314 | Fentanyl

18/01/2025 11:31

1

Depotplaster

Utvalgsliste

A returnere

092188 | Esomeprazol

18/01/2025 11:31

1

Enterokapsel

009587 | Oksykodon

18/01/2025 11:32

1

Mikstur

Tilbake til pasienter

Pasientdetaljer


Retur

Legemiddel liste


Tidligere returnerte varer

Trykk deretter p  retur.

Ved retur av a og b preparater kommer følgende bildet opp – da åpner skuff 2 seg.

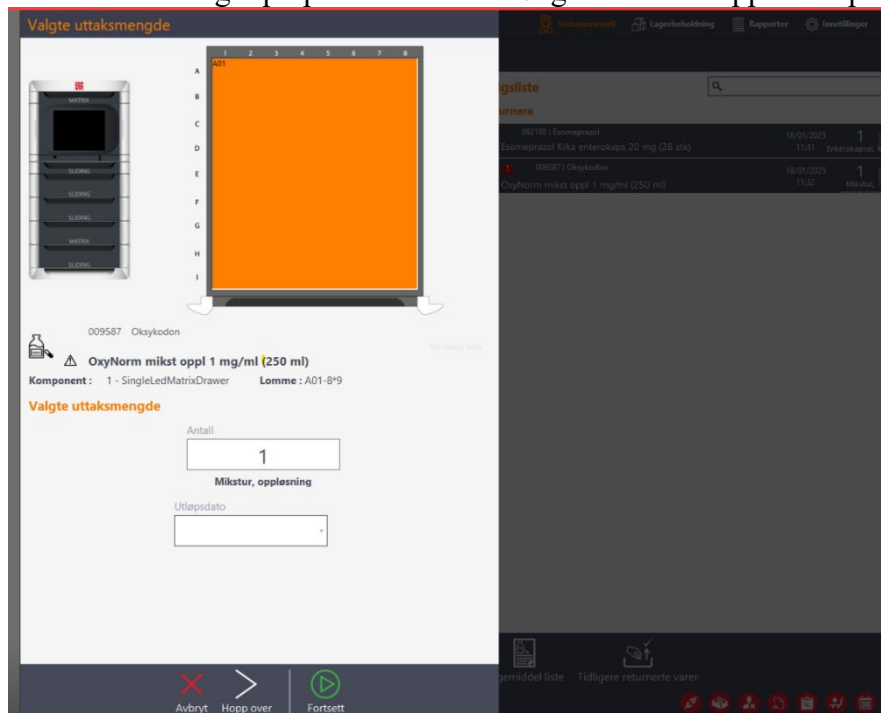

Ved retur av c og f preparater får man beskjed om å bruke en ekstern retur skuff utenfor skapet.

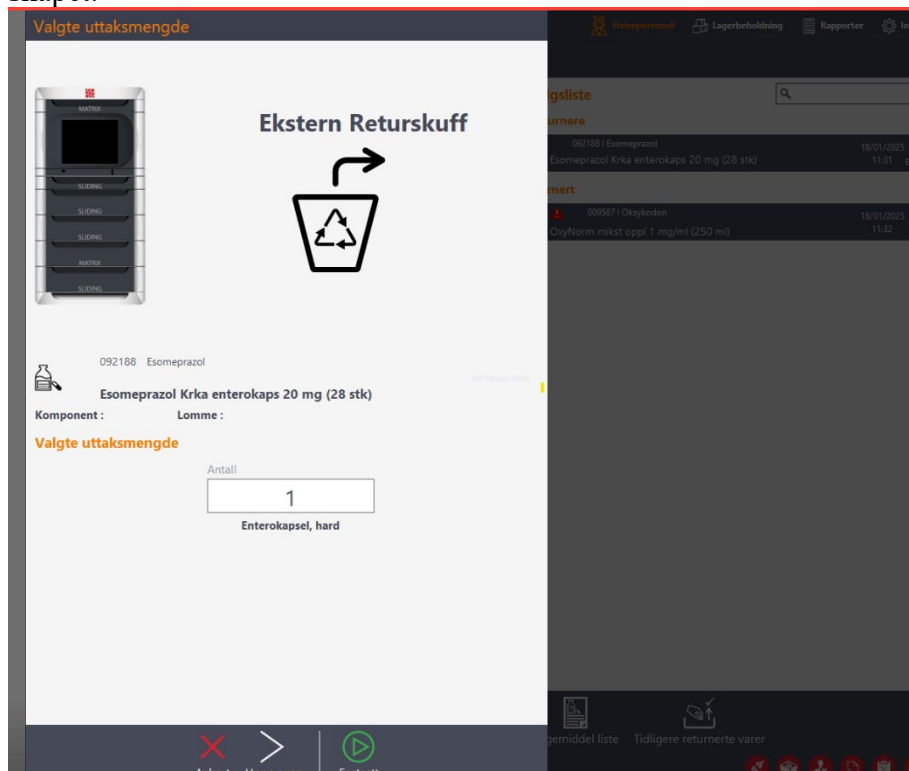


Avfall

Samme oppskrift for avfall av alle preparater.

Kan kun kassere innen **48 timer etter uttak**. Hvis det er satt på delmengde kan man kassere deler av uttaket.

Velg pasient, trykk deretter på rød knapp for avfall.

Velg legemidlene som skal returneres og antall.

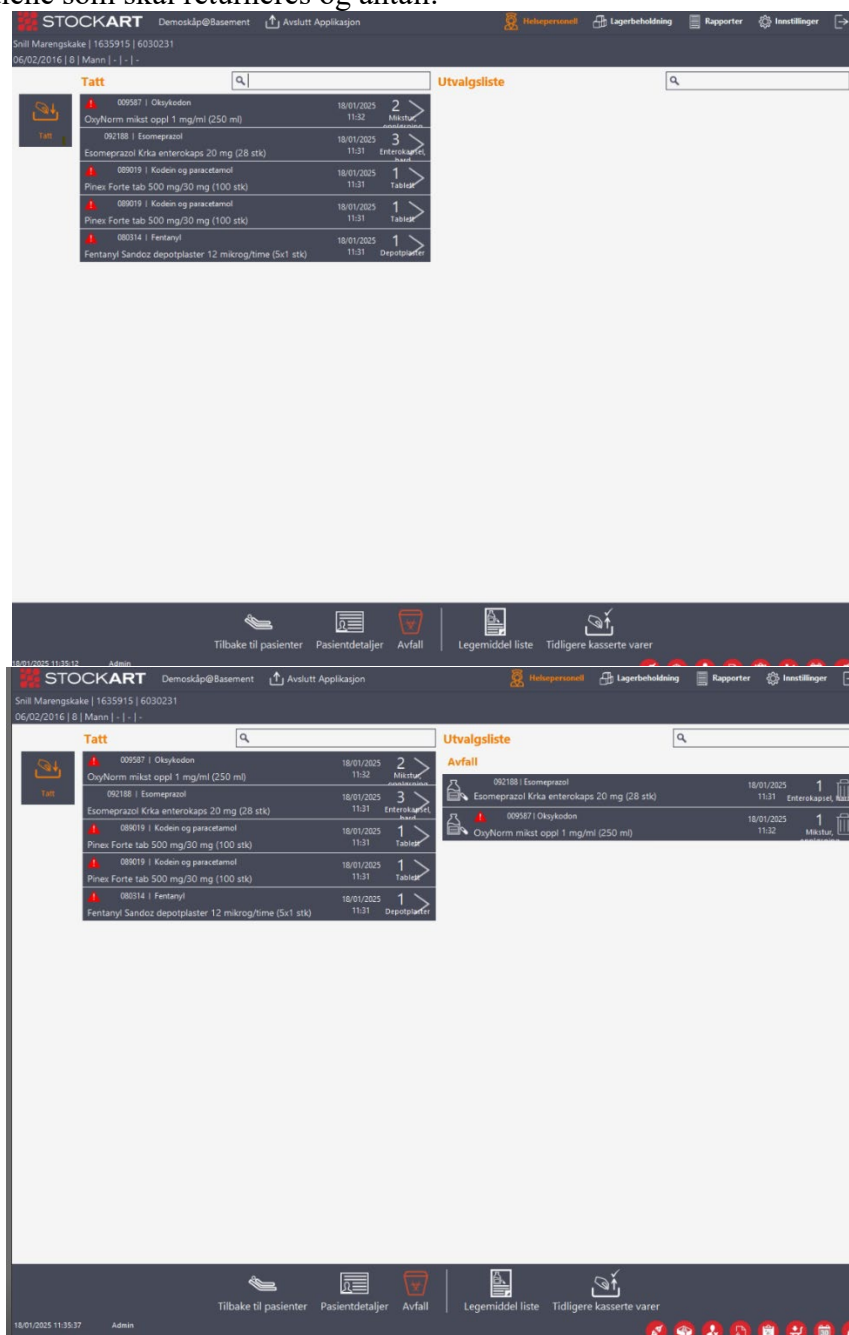


The screenshot shows the STOCKART application interface. The top bar includes the STOCKART logo, user information (Demoskjp@Basement), and navigation icons. The main area is divided into two tabs: 'Tatt' (Taken) and 'Avfall' (Waste). The 'Avfall' tab is active, displaying a list of medications to be discarded. The list includes:

- OxyNorm mikst oppl 1 mg/ml (250 ml) - 2 Mikstur
- Esomeprazol Krika enterokaps 20 mg (28 stk) - 3 Enterokapsler
- Koden og paracetamol - 1 Tablett
- Pinex Forte tab 500 mg/50 mg (100 stk) - 1 Tablett
- Fentanyl Sandoz depotplaster 12 mikrog/time (5x1 stk) - 1 Depotplaster

The interface also shows a search bar, a date selector, and a patient selection dropdown. The bottom bar includes navigation icons for 'Tilbake til pasienter', 'Pasientdetaljer', 'Avfall', 'Legemiddel liste', and 'Tidligere kasserte varer'.

Trykk deretter på avfall

Avfall A og B preparat- her må ett vitne logge seg på før man kan fortsette.

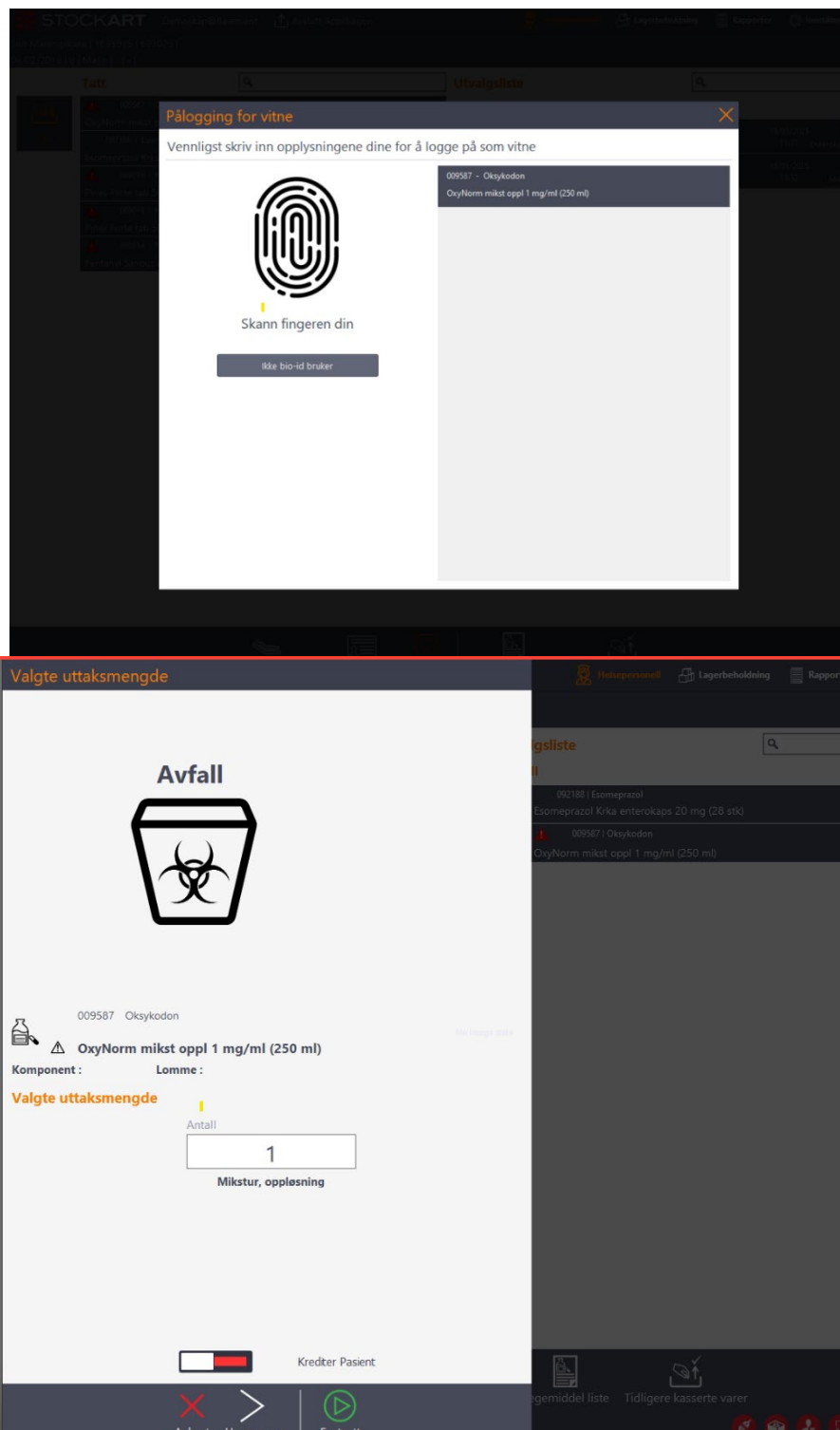

Avfall kasseres i seponett eller gule bokser etter lokale retningslinjer utenfor skapet.

.


Velg legemiddel som skal returneres / kasseres. Følg beskrivelse på skjermen.

Opprette pasient - hvis den ikke kommer over fra journalsystemet

(må inn på smartcenter etterpå for å endre utskrivelsesdato hvis dere ikke vil at den skal skrives ut automatisk)

Velg opprett pasient, fyll inn feltene Navn, Etternavn, Pasientnummer og lagre

OBS. Pasientnummer **MÅ** være unikt, vi anbefaler **fødselsdato**

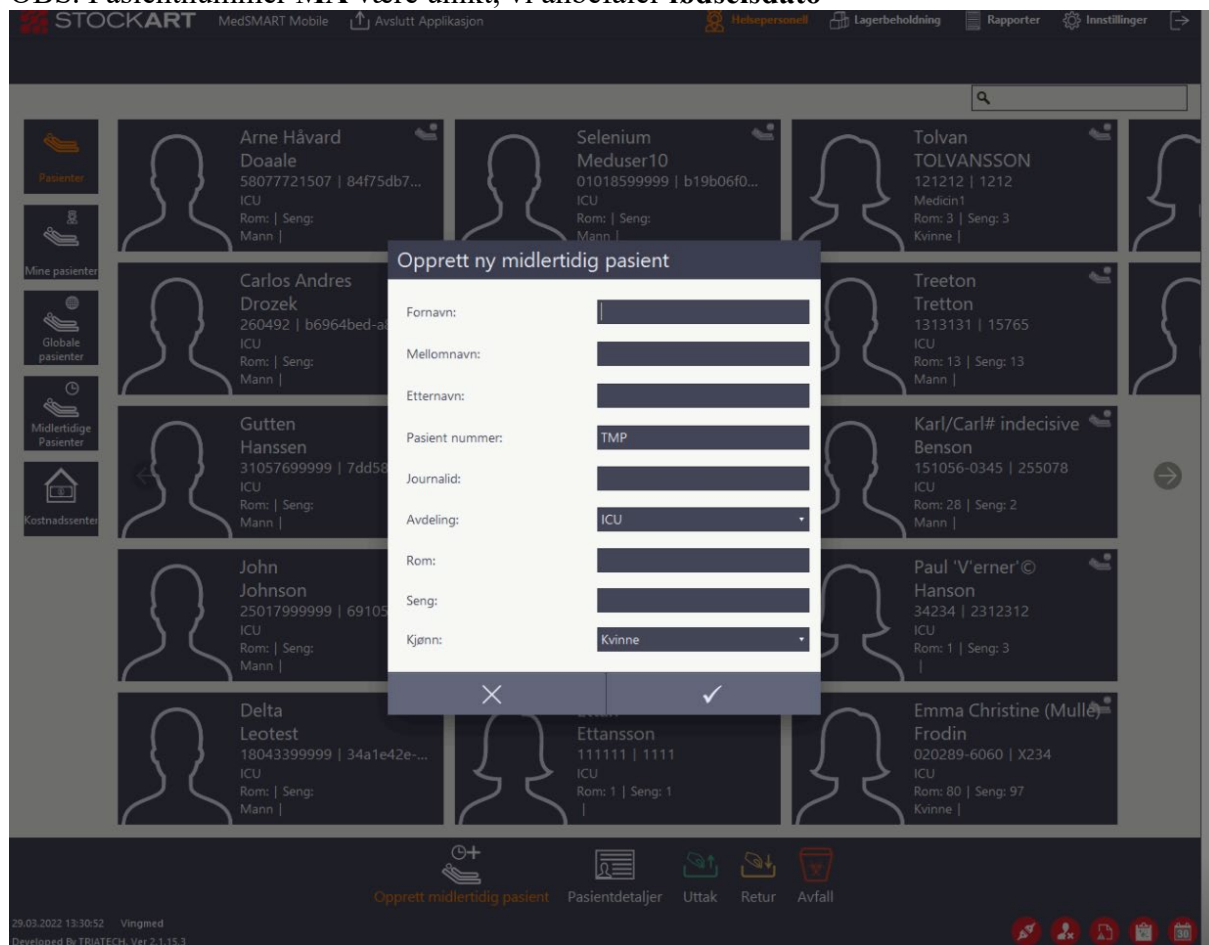


The screenshot shows the STOCKART application interface. At the top, there's a navigation bar with 'STOCKART', 'MedSMART Mobile', and 'Avslutt Applikasjon'. Below this are icons for 'Hjelpersområd', 'Lagerbeholdning', 'Rapporter', and 'Innstillinger'. The main area displays a grid of patient cards. A modal window titled 'Opprett ny midlertidig pasient' is open in the center, containing the following fields:

- Fornavn: [Text input]
- Mellomnavn: [Text input]
- Etternavn: [Text input]
- Pasient nummer: [Text input with 'TMP' entered]
- Journalid: [Text input]
- Avdeling: [Dropdown menu with 'ICU' selected]
- Rom: [Text input]
- Seng: [Text input]
- Kjønn: [Dropdown menu with 'Kvinne' selected]

At the bottom of the modal are 'X' and '✓' buttons. The background shows patient cards for Arne Håvard Doaale, Selenium Meduser10, Tolvan TOLVANSSON, Carlos Andres Drozek, Gutten Hanssen, John Johnson, Delta Leotest, Treeton Tretton, Karl/Carl# indecisive Benson, Paul 'V'erner© Hanson, and Emma Christine (Mulle) Frodin. The bottom status bar includes 'Opprett midlertidig pasient', 'Pasientdetaljer', 'Uttak', 'Retur', and 'Avfall', along with a timestamp '29.03.2022 13:30:52' and 'Vingmed'.

Avvikshåndtering på kabinettet

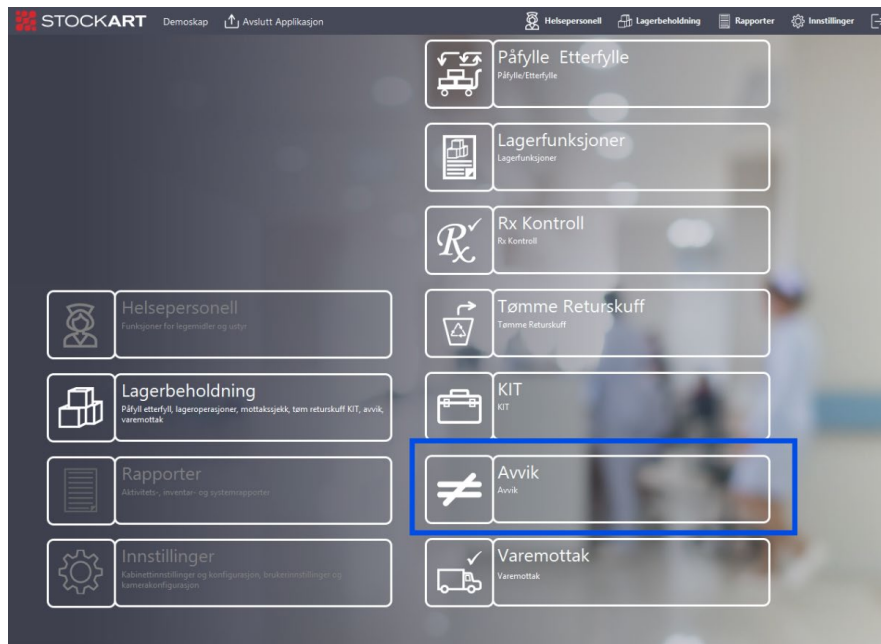

Her kan man kommentere på avvik, og de rollene som har tilgang kan også løse avvikene fra denne funksjonen.

Marker avviket du vil kommentere / løse, slik at det blir oransje. Trykk deretter legg til notat for å kommentere.

Avviksliste									
197809 - Diazepam Stesolid rektalvæske, oppl 10 mg/2,5 ml (5x2,5 ml)	12.11.2025 09:45:12 Telle - Uttak	Tidligere bruker Cecile	Funnert av Cecile	4 Single Sliding Drawer forventet MO1-6*2	4 Raktalvæ...	7 Raktalvæ...	3 Raktalvæ...		
303933 - Morfin Dolcontin depottab 10 mg (50x1 stk)	12.11.2025 08:32:46 Telle - Uttak	Tidligere bruker Cecile	Funnert av Test DEMO	4 Single Sliding Drawer forventet KO2-1*1	1 Depottab...	0 Depottab...	-1 Depottab...		
197809 - Diazepam Stesolid rektalvæske, oppl 10 mg/2,5 ml (5x2,5 ml)	11.11.2025 14:29:11 Telle - Uttak	Tidligere bruker Cecile	Funnert av Cecile	4 Single Sliding Drawer forventet MO1-6*2	8 Raktalvæ...	7 Raktalvæ...	-1 Raktalvæ...		
197809 - Diazepam Stesolid rektalvæske, oppl 10 mg/2,5 ml (5x2,5 ml)	07.11.2025 11:53:44 Telle - Uttak	Tidligere bruker Admin	Funnert av Cecile	4 Single Sliding Drawer forventet MO1-6*2	6 Raktalvæ...	5 Raktalvæ...	-1 Raktalvæ...		
139881 - Morfin Dolcontin depottab 100 mg (100 stk)	19.08.2025 08:12:53 Tømme Returskuff	Tidligere bruker Admin	Funnert av Admin	2 Single SMARTMatrix forventet E0000000	1 Depottab...	0 Depottab...	-1 Depottab...		
002124 - Midazolam Midazolam hameln inj/inf, oppl 5 mg/ml (5x3 ml)	25.08.2025 14:20:38 Telle - Uttak	Tidligere bruker Cecile	Funnert av Admin	6 Double Sliding Drawer forventet AO4-1*1	4 Injeksjon...	3 Injeksjon...	-1 Injeksjon...		
073471 - Oksykodon og naltrexon Tanonalla depottab 10 mg/5 mg (28x1 stk)	10.07.2025 10:23:03 Telle - Uttak	Tidligere bruker Cecile	Funnert av Admin	4 Single Sliding Drawer forventet KO3-1*2	1 Depottab...	2 Depottab...	1 Depottab...		
073471 - Oksykodon og naltrexon Tanonalla depottab 10 mg/5 mg (28x1 stk)	10.07.2025 10:22:34 Telle - Uttak	Tidligere bruker Cecile	Funnert av Admin	4 Single Sliding Drawer forventet KO2-1*1	0 Depottab...	1 Depottab...	1 Depottab...		
073471 - Oksykodon og naltrexon Tanonalla depottab 10 mg/5 mg (28x1 stk)	10.07.2025 10:21:29 Telle - Uttak	Tidligere bruker Cecile	Funnert av Admin	4 Single Sliding Drawer forventet IO7-2*1	1 Depottab...	4 Depottab...	3 Depottab...		
171174 - Morfin Morfin Abcur inj, oppl 10 mg/ml (10x1 ml)	10.07.2025 10:21:07 Telle - Uttak	Tidligere bruker Test DEMO	Funnert av Admin	4 Single Sliding Drawer forventet GO9-2*2	0 Injeksjon...	3 Injeksjon...	3 Injeksjon...		
303933 - Morfin Dolcontin depottab 10 mg (50x1 stk)	25.06.2025 13:35:55 Telle - Uttak	Tidligere bruker Admin	Funnert av Admin	3 Single Sliding Drawer forventet AO1-1*1	1 Depottab...	0 Depottab...	-1 Depottab...		
110699 - Koden og paracetamol Pinex Forte tab 500 mg/30 mg (20 stk)	02.05.2025 13:29:52 Telle - Uttak	Tidligere bruker Cecile	Funnert av Admin	8 Double Sliding Drawer forventet J10-3*5	20 Tablett	15 Tablett	-5 Tablett		
478000 - Morfin Oramorph dråper, oppl 20 mg/ml (20 ml)	29.04.2025 09:36:06 Telle - Uttak	Tidligere bruker Test DEMO	Funnert av Cecile	4 Single Sliding Drawer forventet MO7-6*2	17 Dråper	12 Dråper	-5 Dråper		
197809 - Diazepam	12.11.2025 09:45:12	Tidligere bruker	Funnert av	4 Single Sliding Drawer forventet					

Eller for å løse avviket

Avviksløsing
Hjelpspersonell Egenbehandling Rapporter Innstillinger

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	A01				A05		A07		A09			
B												
C	C01		C03		C05		C07		C09		C11	
D												
E	E01		E03		E05		E07		E09		E11	E1
F												
G	G01		G03		G05		G07		G09		G11	
H												
I	I01		I03		I05		I07		I09		I11	
J			J03				J07					
K	K01	K02	K03	K04	K05		K07		K09		K11	
L		L02					L07					
M	M01						M07					
N												

(No storage slots)

Komponent : 4 - Single Sliding Drawer **Lomme :** M01-6*2

Forventet
4

Funnnet
7

Forskjeller
3

Årsak

Husk å kommenter avvik

Skriv årsak

Notater

✗ Avbryt
 ✓ Løsne

Legg til notat


Rapporter / se info om legemidler på lager

For å søke opp legemidler på skapet – for å se antall, utløpsdato, standard lager, maks og min etc:

Rapporter



Lagerbeholdning – lagerrapport.

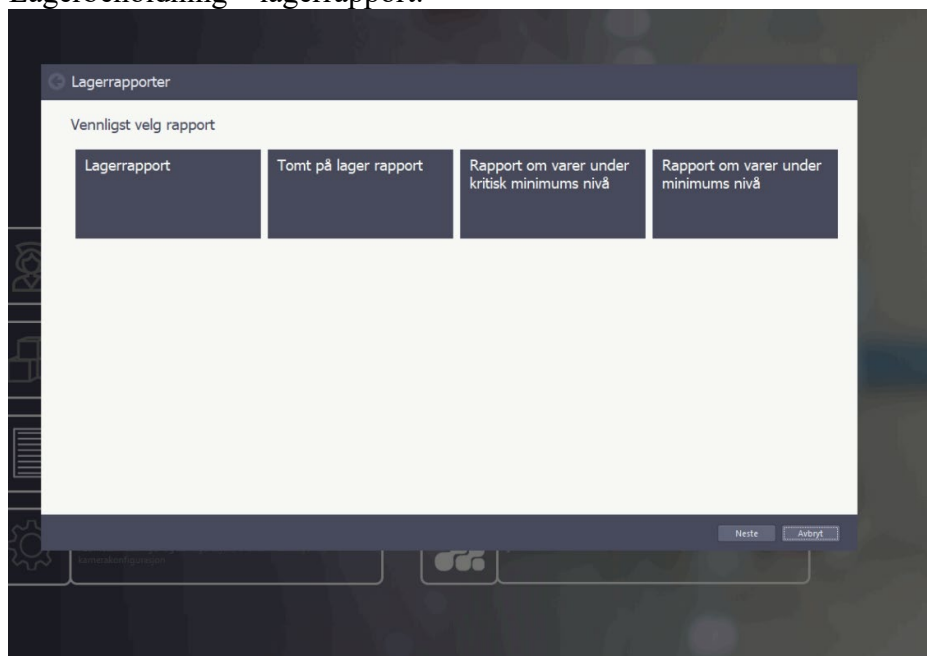

Velg deretter generer rapport – trenger ikke å fylle ut noen filter.

Lagerrapporter

Filtrer rapporten

Varenummer

Varetype

Legemiddelgruppe

Varenavn

Sikkerhetsklasse

Generisk Navn

☒ Pasientens egne legemidler

Generer rapport

Avbryt

Lagerrapport

Parameters

Kabinett 1 selected (All)

Vare ID 10 selected (All)

Varenavn 10 selected (All)

Vareklasse 10 selected (All)

Result

Submit

STOCKART


Lagerrapport

Kabinett/varehus	Adresse	Vare ID	Varenavn	Falsk mengde	Maks	Min	Totalt på kabinett	Returskuff lagerstall	Antall ubrukte dager	Sikkerhets- spesifiser	Utl	Veg vernsak	Varekode	Vareklasse	Utstedt sent
2	Single	064543	Alipran tab 10 mg 10 mg Tablet (Metoklopramid)	43	50	10	43	0	9	0	31.10.2 022 00:00:00		A03FA0	1	Tablet
2	Single	000362	Nexium enterotab 20 mg 20 mg Enterotablett (Esomeprazol)	16	20	10	16	0	9	0	31.10.2 022 00:00:00		A02BC05	5	Enterotablett
2	Single	588471	Buprefam depotplaster 5 mikrogr/1 time Depotplaster (Buprenorfin)	19	20	10	19	0	0	0	30.11.2 022 00:00:00		N02AE01	1	Depotplaster
2	Single	022708	Diovan Comp tab 160 mg/12.5 mg 12.5 mg Tablet (Valsartan og diuretika)	32	98	20	32	0	9	0	31.10.2 022 00:00:00		C09DA03	3	Tablet
2	Single	083621	Panodil tab 500 mg 500 mg Tablett (Paracetamol)	13	20	1	13	0	9	0	31.10.2 022 00:00:00		N02BA01	1	Tablet
2	Single	001878	Azopt eyedr 10 mg/ml 10 mg/ml Øyedråper (Brimonid)	2	3	0	2	0	0	0	19.04.2 022 00:00:00		S01ED04	4	Øyedråper
2	Single	511873	Allyl-E enterotab 75 mg 75 mg Enterotablett (Acetylsalicylsyre)	98	100	10	98	1	0	0	28.05.2 022 00:00:00		B01AC06	6	Enterotablett
2	Single	111481	Acetylcystein Sandozbrusetab 200 mg 200 mg Brusetablett (Acetylcystein)	3	4	2	3	0	9	0	09.03.2 022 00:00:00		R05CB01	1	Brusetablett
2	Single	011866	Morfing inj, oppl 10 mg/ml 10 mg/ml Injeksjonsvæske, oppløsning (Morfing)	1	1	1	2	0	9	0	30.03.2 022 00:00:00		N02AA01	1	Injeksjonsvæske, oppløsning
2	Single	011866	Morfing inj, oppl 10 mg/ml 10 mg/ml Injeksjonsvæske, oppløsning (Morfing)	1	1	1	2	0	9	0	30.03.2 022 00:00:00		N02AA01	1	Injeksjonsvæske, oppløsning

Lagerbeholdning

Vingmed 16.12.25
19

Under lagerfunksjoner: Funksjoner for første gangs påfylling, lagertelling, reduksjon, tømme lommer, utløpte medisiner.

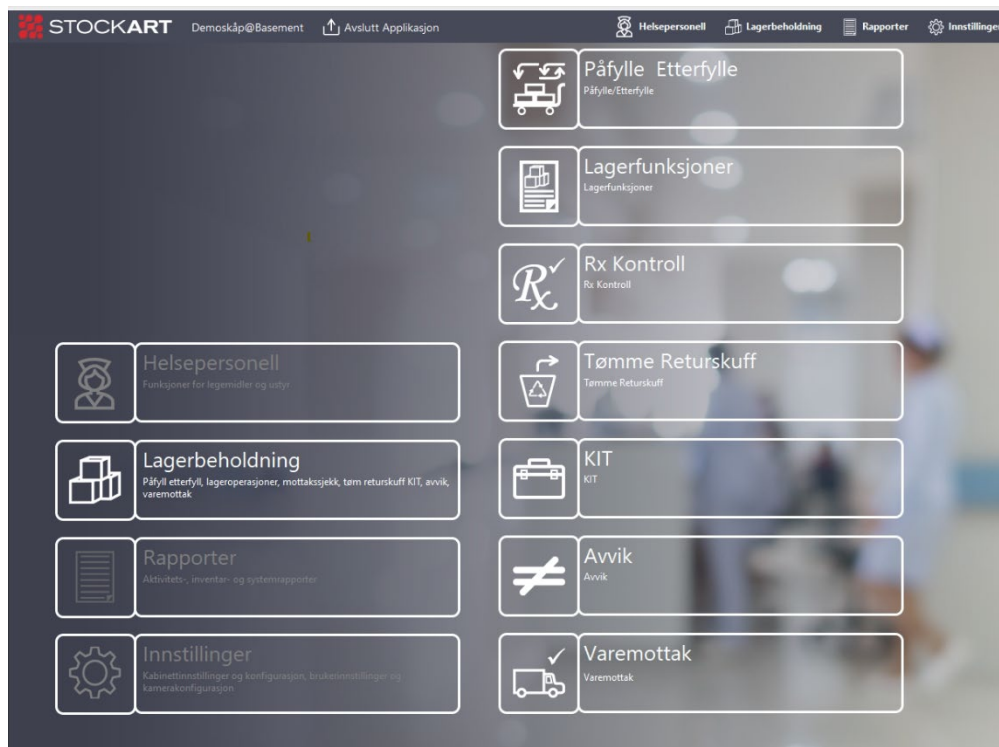


Ved første gangs påfylling av legemiddel


Velg lagerfunksjoner

Hak av valgt skuff / dør og Velg layoutvisning




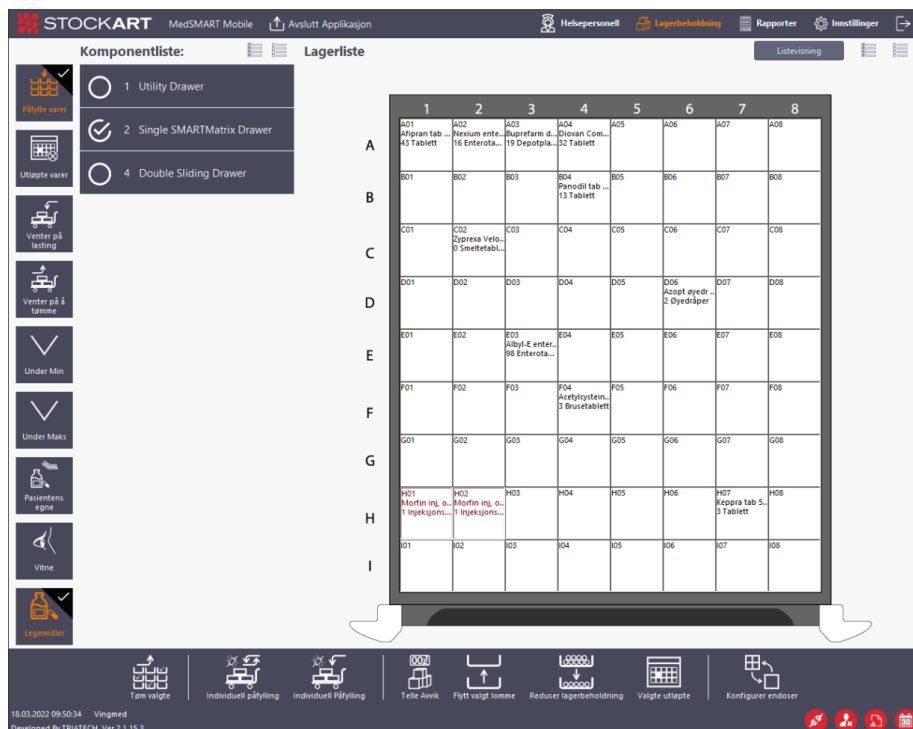

Velg deretter lomme, så individuell påfylling.

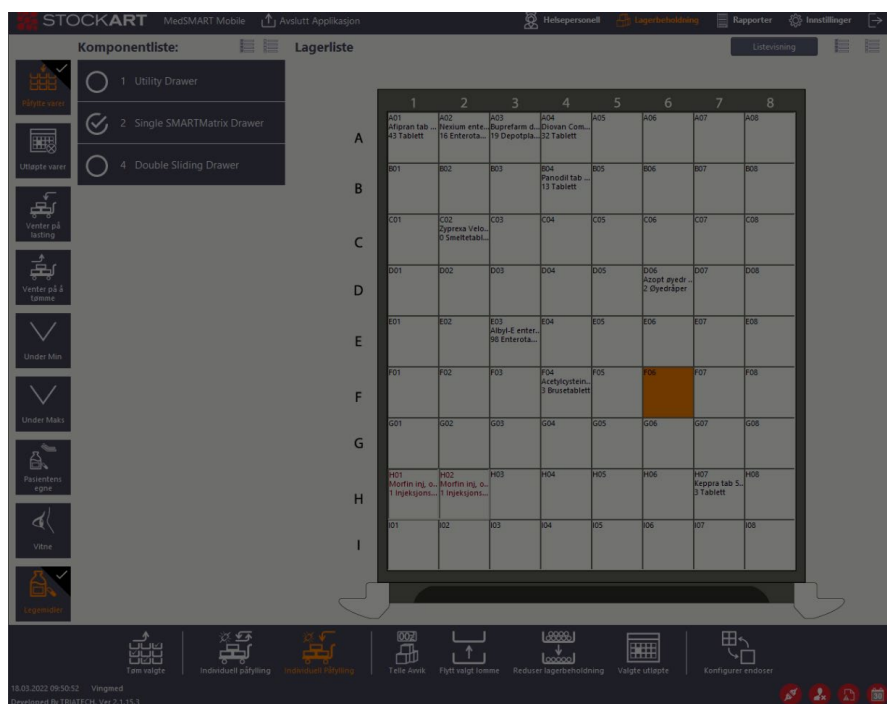

Søk opp valgte legemiddel, dobbel klikk og deretter velg:

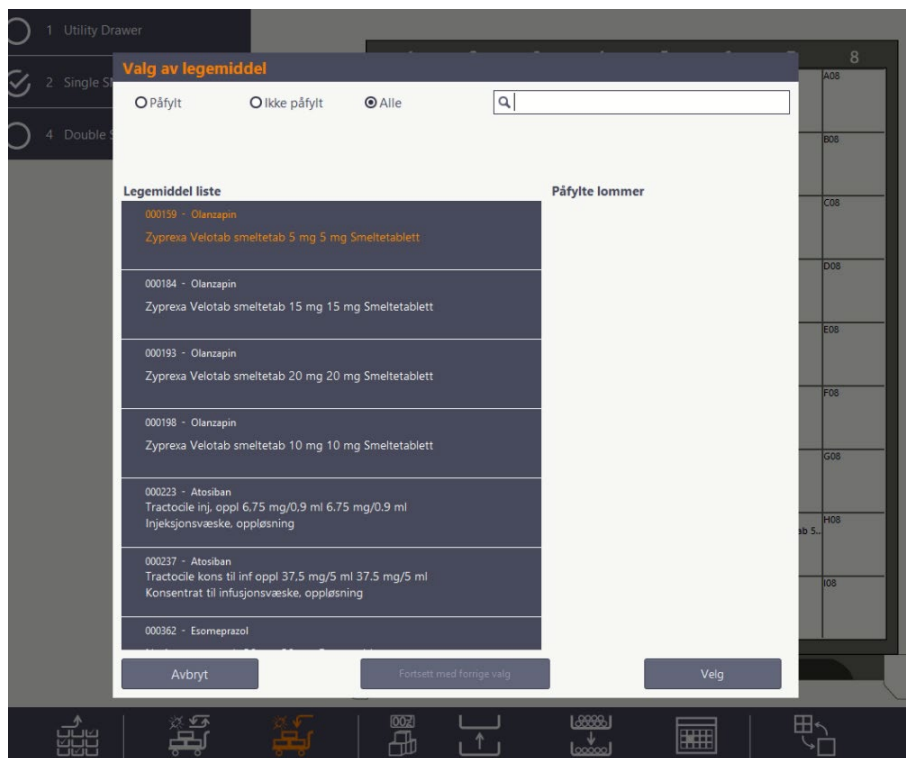

Velg maks, min, fysisk maks og antall som skal fylles på.
Standard lager velges for varer dere skal ha på lager – disse vil komme på bestillingslister.

Fyll På

000193 Olanzapin
Zyprexa Velotab smeltetab 20 mg 20 mg Smeltetablett

Komponent : 2 - Single SMARTMatrix Drawer Lomme : F06-1*1 Enhet : Smeltetablett

Maksimalt mengde: 0
Minimumt mengde: 0

Fysisk maks. antall: 0
Kritisk lavt antall: 0
Mengde for påfyll: 0

Standardlager
Tillat delmengde

Spor holdbarhet
Pasientens egne legemidler

Avbryt Rediger lomme Godta

Fyll På

000193 Olanzapin
Zyprexa Velotab smeltetab 20 mg 20 mg Smeltetablett

Komponent : 2 - Single SMARTMatrix Drawer Lomme : F06-1*1 Enhet : Smeltetablett

Maksimalt mengde: 20
Minimumt mengde: 5

Fysisk maks. antall: 25
Kritisk lavt antall: 0
Mengde for påfyll: 7

Standardlager
Tillat delmengde

Spor holdbarhet: 30.03.22
Pasientens egne legemidler

Avbryt Rediger lomme Godta

Fysisk maks skal være det totale antallet som – maks + min (men er mengden som skal fylle på høyere enn fysisk maks må fysisk maks endres til samme antall som skal Sett på tillat delmengde hvis dere ønsker delmengder på uttak eller avfall.

Påfylling som endoser

Velg skuff som skal ha endoser. Deretter velg konfigurer endoser

Komponentliste:

- ☐ 1 Single SMARTMatrix Drawer
- ☒ 2 Single Sliding Drawer
- ☐ 4 Double SMARTMatrix Drawer
- ☐ 6 Double Sliding Drawer
- ☐ 8 Double SMARTMatrix Drawer
- ☐ 10 Double Sliding Drawer
- ☐ 1 Dør Remote Stock
- ☐ Kjøleskap Remote Stock
- ☐ Utenfor Remote Stock

Lagerliste

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
A	A01 Nexium enterotab 20 mg (56 stk) 59 Enterotablett	A05 Midazo... 1 Injek...	A06 Midazo... 1 Injek...	A07 Pinex Forte tab ... 1 Tablett	A09 Targiniq depott... 24 Depottablett	A11 Oxycod... 1 Injek...	A12 Oxycod... 1 Injek...						
B	B01	B05 Midazo... 1 Injek...	B06 Midazo... 1 Injek...	B07 Pinex Forte tab ... 1 Tablett	B09	B11 Oxycod... 1 Injek...	B12 Oxycod... 1 Injek...						
C	C01	C05 Midazo... 1 Injek...	C06 Midazo... 1 Injek...	C07 Pinex Forte tab ... 1 Tablett	C09	C11 Oxycod... 1 Injek...	C12 Oxycod... 1 Injek...						
D	D01	D05 Midazo... 1 Injek...	D06 Midazo... 1 Injek...	D07	D09 Robinul inj. opp... 1 Injeksjonsvæs...	D11 Oxycod... 1 Injek...	D12 Oxycod... 1 Injek...						
E	E01 Midazolam Accord inj/int, oppl 1 m... 1 Injeksjons-/infusjonsvæske, oppl.	E05 Midazo... 1 Injek...	E06 Midazo... 1 Injek...	E07	E09 Robinul inj. opp... 1 Injeksjonsvæs...	E11 Oxycod... 1 Injek...	E12 Oxycod... 1 Injek...						
F	F01 Midazolam Accord inj/int, oppl 1 m... 1 Injeksjons-/infusjonsvæske, oppl.	F05 Midazo... 1 Injek...	F06 Midazo... 1 Injek...	F07	F09 Robinul inj. opp... 1 Injeksjonsvæs...	F11 Oxycod... 1 Injek...	F12 Oxycod... 1 Injek...						
G	G01 Midazolam Accord inj/int, oppl 1 m... 1 Injeksjons-/infusjonsvæske, oppl.	G05 Midazo... 1 Injek...	G06 Midazo... 1 Injek...	G07	G09 Robinul inj. opp... 1 Injeksjonsvæs...	G11 Oxycod... 1 Injek...	G12 Oxycod... 1 Injek...						
H	H01 Midazolam Accord inj/int, oppl 1 m... 1 Injeksjons-/infusjonsvæske, oppl.	H05 Midazo... 1 Injek...	H06 Midazo... 1 Injek...	H07	H09	H11 Oxycod... 1 Injek...	H12 Oxycod... 1 Injek...						
I	I01 Midazolam Accord inj/int, oppl 1 m... 1 Injeksjons-/infusjonsvæske, oppl.	I05 Midazo... 1 Injek...	I06 Midazo... 1 Injek...	I07	I09	I11 Oxycod... 1 Injek...	I12 Oxycod... 1 Injek...						
J	J01	J05 Midazo... 1 Injek...	J06 Midazo... 1 Injek...	J07	J09	J11 Oxycod... 1 Injek...	J12 Oxycod... 1 Injek...						
K	K01	K05 Midazo... 1 Injek...	K06 Midazo... 1 Injek...	K07	K09	K11 Oxycod... 1 Injek...	K12 Oxycod... 1 Injek...						
L		L05 Midazo... 1 Injek...	L06 Midazo... 1 Injek...		L09	L11 Oxycod... 1 Injek...	L12 Oxycod... 1 Injek...						
M		M05 Midazo... 1 Injek...	M06 Midazo... 1 Injek...		M09 Fentanyl Sandoz... 1 Depotplaster	M11 Oxycod... 1 Injek...	M12 Oxycod... 1 Injek...						
N		N05 Midazo... 1 Injek...	N06 Midazo... 1 Injek...			N11 Oxycod... 1 Injek...	N12 Oxycod... 1 Injek...						

Bottom Toolbar:

- Tøm valgte
- Individuell etterfylling
- Individuell Påfylling
- Lagertelling
- Flytt valgt lomme
- Reduser lagerbeholdning
- Valgte utslapte legemidler
- Konfigurer endoser

Marker lommene som skal være endoser av samme preparat. Og deretter sett som enkeltdoselommer.

De endrer da fra svart til rød skrift.

Komponentliste:

- ☐ 1 Single SMARTMatrix Drawer
- ☒ 2 Single Sliding Drawer
- ☐ 4 Double SMARTMatrix Drawer
- ☐ 6 Double Sliding Drawer
- ☐ 8 Double SMARTMatrix Drawer
- ☐ 10 Double Sliding Drawer
- ☐ 1 Dør Remote Stock
- ☐ Kjøleskap Remote Stock
- ☐ Utenfor Remote Stock

Lagerliste:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	A01 Nexium enterotab 20 mg (56 stk) 59 Enterotablett	A05 Midazo. Midazo.	A06 Midazo. 1 Injek...	A07 Pinex Forte tab ... 1 Tablet	A09 Targinid depott... 24 Depottablet	A11 Oxycod. 1 Injek...	A12 Oxycod. 1 Injek...					
B	B01 	B05 Midazo. 1 Injek...	B06 Midazo. 1 Injek...	B07 Pinex Forte tab ... 1 Tablet	B09 	B11 Oxycod. 1 Injek...	B12 Oxycod. 1 Injek...					
C	C01 	C05 Midazo. 1 Injek...	C06 Midazo. 1 Injek...	C07 Pinex Forte tab ... 1 Tablet	C09 	C11 Oxycod. 2 Injek...	C12 Oxycod. 2 Injek...					
D	D01 	D05 Midazo. 1 Injek...	D06 Midazo. 1 Injek...	D07 	D09 Robinol inj. opp. 1 Injektjonsvæsk...	D11 Oxycod. 2 Injek...	D12 Oxycod. 2 Injek...					
E	E01 Midazolam Accord inj/inj, oppl 1 m... 1 Injektjons-infusjonsvæske, oppl...	E05 Midazo. 1 Injek...	E06 Midazo. 1 Injek...	E07 	E09 Robinol inj. opp. 1 Injektjonsvæsk...	E11 Oxycod. 2 Injek...	E12 Oxycod. 2 Injek...					
F	F01 Midazolam Accord inj/inj, oppl 1 m... 1 Injektjons-infusjonsvæske, oppl...	F05 Midazo. 1 Injek...	F06 Midazo. 1 Injek...	F07 	F09 Robinol inj. opp. 1 Injektjonsvæsk...	F11 Oxycod. 2 Injek...	F12 Oxycod. 2 Injek...					
G	G01 Midazolam Accord inj/inj, oppl 1 m... 1 Injektjons-infusjonsvæske, oppl...	G05 Midazo. 1 Injek...	G06 Midazo. 1 Injek...	G07 	G09 Robinol inj. opp. 1 Injektjonsvæsk...	G11 Oxycod. 2 Injek...	G12 Oxycod. 2 Injek...					
H	H01 Midazolam Accord inj/inj, oppl 1 m... 1 Injektjons-infusjonsvæske, oppl...	H05 Midazo. 1 Injek...	H06 Midazo. 1 Injek...	H07 	H09 	H11 Oxycod. 2 Injek...	H12 Oxycod. 2 Injek...					
I	I01 Midazolam Accord inj/inj, oppl 1 m... 1 Injektjons-infusjonsvæske, oppl...	I05 Midazo. 1 Injek...	I06 Midazo. 1 Injek...	I07 	I09 	I11 Oxycod. 2 Injek...	I12 Oxycod. 2 Injek...					
J	J01 	J05 Midazo. 1 Injek...	J06 Midazo. 1 Injek...	J07 	J09 	J11 Oxycod. 2 Injek...	J12 Oxycod. 2 Injek...					
K	K01 	K05 Midazo. 1 Injek...	K06 Midazo. 1 Injek...	K07 	K09 	K11 Oxycod. 2 Injek...	K12 Oxycod. 2 Injek...					
L	L01 	L05 Midazo. 1 Injek...	L06 Midazo. 1 Injek...	L07 	L09 	L11 Oxycod. 2 Injek...	L12 Oxycod. 2 Injek...					
M	M01 	M05 Midazo. 1 Injek...	M06 Midazo. 1 Injek...	M07 	M09 Fentanyl Sandoc 1 Depotpiller	M11 Oxycod. 2 Injek...	M12 Oxycod. 2 Injek...					
N	N01 	N05 Midazo. 1 Injek...	N06 Midazo. 1 Injek...	N07 	N09 	N11 Oxycod. 2 Injek...	N12 Oxycod. 2 Injek...					

Legemidler

Tøm valgte Individuell etterfylling Individuell Påfylning Laeggetilling Flytt valgt innlede Reduser lagerbeholdning Valgte utlagte legemidler Lukk Sett som enkelt-dokumenter

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	A01 Paxium enterotab 20 mg (56 tk) 59 Enterotablett				A05 Midazol. 1 Injek...	A06 Midazol. 1 Injek...	A07 Pnex Forte tab ... 1 Tablett		A09 Targiniq depott... 24 Depottablett		A11 Oxyd... 1 Injek...	A12 Oxyd... 1 Injek...
B					B05 Midazol. 1 Injek...	B06 Midazol. 1 Injek...	B07 Pnex Forte tab ... 1 Tablett		B09		B11 Oxyd... 1 Injek...	B12 Oxyd... 1 Injek...
C	C01				C05 Midazol. 1 Injek...	C06 Midazol. 1 Injek...	C07 Pnex Forte tab ... 1 Tablett		C09		C11 Oxyd... 0 Injek...	C12 Oxyd... 0 Injek...
D	D01				D05 Midazol. 1 Injek...	D06 Midazol. 1 Injek...	D07		D09 Roburin inj. opp... 1 Injektsvæ...		D11 Oxyd... 0 Injek...	D12 Oxyd... 0 Injek...
E	E01 Midazolam Accord inj/inf. opp 1 m. 1 Injektsjons-infusjonsvæske, oppl.				E05 Midazol. 1 Injek...	E06 Midazol. 1 Injek...	E07		E09 Roburin inj. opp... 1 Injektsvæ...		E11 Oxyd... 0 Injek...	E12 Oxyd... 0 Injek...
F	F01 Midazolam Accord inj/inf. opp 1 m. 1 Injektsjons-infusjonsvæske, oppl.				F05 Midazol. 1 Injek...	F06 Midazol. 1 Injek...	F07		F09 Roburin inj. opp... 1 Injektsvæ...		F11 Oxyd... 0 Injek...	F12 Oxyd... 0 Injek...
G	G01 Midazolam Accord inj/inf. opp 1 m. 1 Injektsjons-infusjonsvæske, oppl.				G05 Midazol. 1 Injek...	G06 Midazol. 1 Injek...	G07		G09 Roburin inj. opp... 1 Injektsvæ...		G11 Oxyd... 0 Injek...	G12 Oxyd... 0 Injek...
H	H01 Midazolam Accord inj/inf. opp 1 m. 1 Injektsjons-infusjonsvæske, oppl.				H05 Midazol. 1 Injek...	H06 Midazol. 1 Injek...	H07		H09		H11 Oxyd... 1 Injek...	H12 Oxyd... 1 Injek...
I	I01 Midazolam Accord inj/inf. opp 1 m. 1 Injektsjons-infusjonsvæske, oppl.				I05 Midazol. 1 Injek...	I06 Midazol. 1 Injek...	I07		I09		I11 Oxyd... 1 Injek...	I12 Oxyd... 1 Injek...
J	J01				J05 Midazol. 1 Injek...	J06 Midazol. 1 Injek...	J07		J09		J11 Oxyd... 1 Injek...	J12 Oxyd... 1 Injek...
K	K01				K05 Midazol. 1 Injek...	K06 Midazol. 1 Injek...	K07		K09		K11 Oxyd... 1 Injek...	K12 Oxyd... 1 Injek...
L					L05 Midazol. 1 Injek...	L06 Midazol. 1 Injek...			L09		L11 Oxyd... 1 Injek...	L12 Oxyd... 1 Injek...
M					M05 Midazol. 1 Injek...	M06 Midazol. 1 Injek...			M09 Fentanyl Sandoz. 1 Depottaster		M11 Oxyd... 1 Injek...	M12 Oxyd... 1 Injek...
N					N05 Midazol. 1 Injek...	N06 Midazol. 1 Injek...					N11 Oxyd... 1 Injek...	N12 Oxyd... 1 Injek...

Trykk på lukk.

Velg så det antall lommer du ønsker å fylle på, så individuell påfylling.

Velg varenummer

Da er det automatisk fylt inn maks, fysisk maks, min og antall for påfylling.

Fyll inn utløpsdato og sett på tillatt delmengde hvis dette skal brukes.

Fylle På

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	A01				A05	A06	A07		A09		A11	A1
B	B01				B05	B06	B07		B09		B11	B1
C	C01				C05	C06	C07		C09		C11	C1
D	D01				D05	D06	D07		D09		D11	D1
E	E01				E05	E06	E07		E09		E11	E1
F	F01				F05	F06	F07		F09		F11	F1
G	G01				G05	G06	G07		G09		G11	G1
H	H01				H05	H06	H07		H09		H11	H1
I	I01				I05	I06	I07		I09		I11	I1
J	J01				J05	J06	J07		J09		J11	J1
K	K01				K05	K06	K07		K09		K11	K1
L					L05	L06			L09		L11	L1
M					M05	M06			M09		M11	M1
N					N05	N06					N11	N1

481337 Oksykodon og nalokson

Tanonalla depottab 20 mg/10 mg (28x1 stk)

Komponent: 2 - Single Sliding Drawer Lomme: D07-243

Maksimal mengde: Fysisk maks. antall:

Minimums mengde: Kritisk lavt antall:

Mengde for påfy:

Depottabiett:

Standardlager ☐ Spor holdbarhet ☐

Tillat delmengde ☐ Pasientens egne legemidler ☐

Helsepersonell

Lagerbeholdning

Rapporter

innstillinger

Listenvisning

	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(56 stk)	A05 Midazo. 1 Injek...	A06 Midazo. 1 Injek...	A07 Pinex Forte tab... 1 Tablett	A09 Targinq depott... 24 Depottabiett	A11 Oxycod. 1 Injek...	A12 Oxycod. 1 Injek...			
	B05 Midazo. 1 Injek...	B06 Midazo. 1 Injek...	B07 Pinex Forte tab... 1 Tablett	B09	B11 Oxycod. 1 Injek...	B12 Oxycod. 1 Injek...			
	C05 Midazo. 1 Injek...	C06 Midazo. 1 Injek...	C07 Pinex Forte tab... 1 Tablett	C09	C11 Oxycod. 1 Injek...	C12 Oxycod. 1 Injek...			
	D05 Midazo. 1 Injek...	D06 Midazo. 1 Injek...	D07 Pinex Forte tab... 1 Tablett	D09 Robinul inj. opp... 1 Injektsjonsvæ...	D11 Oxycod. 1 Injek...	D12 Oxycod. 1 Injek...			
	E05 Midazo. 1 Injek...	E06 Midazo. 1 Injek...	E07 Pinex Forte tab... 1 Tablett	E09 Robinul inj. opp... 1 Injektsjonsvæ...	E11 Oxycod. 1 Injek...	E12 Oxycod. 1 Injek...			
	F05 Midazo. 1 Injek...	F06 Midazo. 1 Injek...	F07 Pinex Forte tab... 1 Tablett	F09 Robinul inj. opp... 1 Injektsjonsvæ...	F11 Oxycod. 1 Injek...	F12 Oxycod. 1 Injek...			
	G05 Midazo. 1 Injek...	G06 Midazo. 1 Injek...	G07 Pinex Forte tab... 1 Tablett	G09 Robinul inj. opp... 1 Injektsjonsvæ...	G11 Oxycod. 1 Injek...	G12 Oxycod. 1 Injek...			
	H05 Midazo. 1 Injek...	H06 Midazo. 1 Injek...	H07 Pinex Forte tab... 1 Tablett	H09 Robinul inj. opp... 1 Injektsjonsvæ...	H11 Oxycod. 1 Injek...	H12 Oxycod. 1 Injek...			
	I05 Midazo. 1 Injek...	I06 Midazo. 1 Injek...	I07 Pinex Forte tab... 1 Tablett	I09 Robinul inj. opp... 1 Injektsjonsvæ...	I11 Oxycod. 1 Injek...	I12 Oxycod. 1 Injek...			
	J05 Midazo. 1 Injek...	J06 Midazo. 1 Injek...	J07 Pinex Forte tab... 1 Tablett	J09 Robinul inj. opp... 1 Injektsjonsvæ...	J11 Oxycod. 1 Injek...	J12 Oxycod. 1 Injek...			
	K05 Midazo. 1 Injek...	K06 Midazo. 1 Injek...	K07 Pinex Forte tab... 1 Tablett	K09 Robinul inj. opp... 1 Injektsjonsvæ...	K11 Oxycod. 1 Injek...	K12 Oxycod. 1 Injek...			
	L05 Midazo. 1 Injek...	L06 Midazo. 1 Injek...	L07	L09 Robinul inj. opp... 1 Injektsjonsvæ...	L11 Oxycod. 1 Injek...	L12 Oxycod. 1 Injek...			
	M05 Midazo. 1 Injek...	M06 Midazo. 1 Injek...	M07	M09 Robinul inj. opp... 1 Injektsjonsvæ...	M11 Oxycod. 1 Injek...	M12 Oxycod. 1 Injek...			
	N05 Midazo. 1 Injek...	N06 Midazo. 1 Injek...	N07	N09 Robinul inj. opp... 1 Injektsjonsvæ...	N11 Oxycod. 1 Injek...	N12 Oxycod. 1 Injek...			

Redusert lagereholdning

Valgte utvalgte legemidler

Konfigurer endringer


Etterfylle legemidler påfylt som endoser

1. Gå på lagerbeholdning
2. velg lagerfunksjoner
3. For å fylle i en skuff av gangen velg skuff i komponentliste på venstre side.
4. Trykk på layout og velg legemiddel som skal fylles på.
5. Da kommer følgende bildet opp.

Hvit = tom lomme

Oransje = påfylt lomme for valgt legemiddel.

Tell over og sett det til hvit hvis lommen er tom og den står som påfylt. Velg oppdater

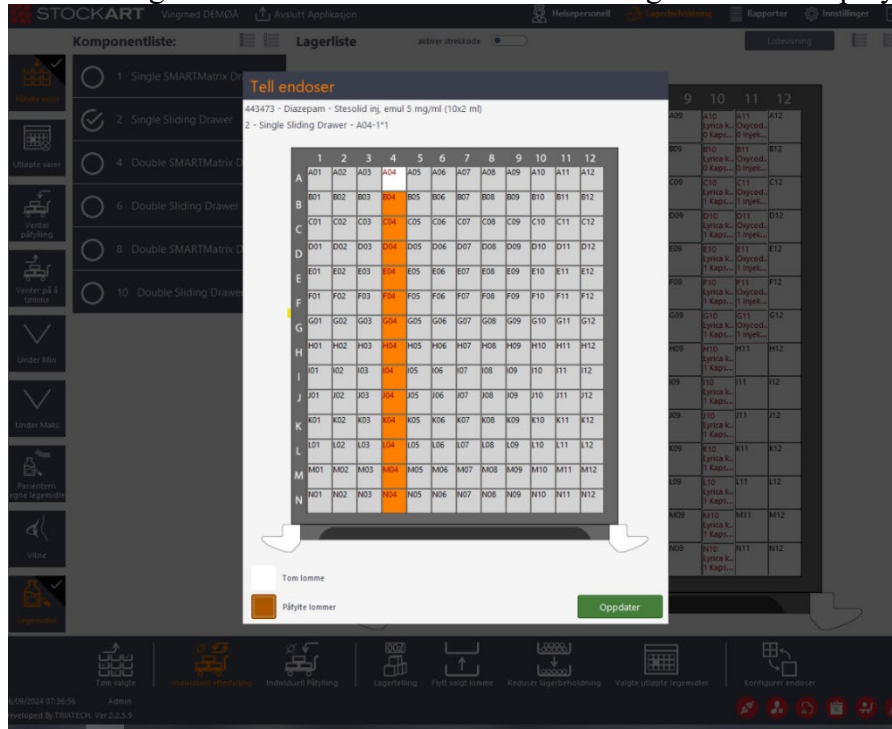

6. Da kommer neste bildet for etterfylling.

Husk å dra spor holdbarhet til høyre hvis denne er rød.

Påfylling i kjøleskap

- Vingmed 16.12.25
28

STOCKART

Demoskap

Avslutt Applikasjon

Hekepersonell

Lagerbeholdning

Rapporter

Innstillinger

Komponentliste:

Påfyllte varer

Utlåpte varer

Venter påfylling

Venter på å levere

Under Min

Under Maks

Pasientens egne legemidler

Vitne

Legemidler

1 Med Door

2 Single SMARTMatrix Drawer

3 Single Sliding Drawer

4 Single Sliding Drawer

6 Double Sliding Drawer

8 Double Sliding Drawer

10 Double SMARTMatrix Drawer

12 Double SMARTMatrix Drawer

14 Double SMARTMatrix Drawer

Fredag Remote Stock

Hylle 1 Remote Stock

Hylle 14 Remote Stock

Lagerliste

Tom lomme

Tom lomme

Tom lomme

Tom lomme

Tom lomme

Tom lomme

Tom lomme

905795 - N/A
Tranebær mikst 93 mg/ml (250 ml)

Tom lomme

Tom lomme

Tom lomme

Tom lomme

Tom lomme

Fredag Remote Stock

Fredag Remote Stock A1

Fredag Remote Stock A10

Fredag Remote Stock A2

Fredag Remote Stock A3

Fredag Remote Stock A4

Fredag Remote Stock A5

Fredag Remote Stock A6

Fredag Remote Stock A7
30.12.2030

Fredag Remote Stock A8

Fredag Remote Stock A9

Fredag Remote Stock B1

Fredag Remote Stock B10

Fredag Remote Stock B2

Fredag Remote Stock

245

Mikstur

Tom valgte

Individuell etterfylling

Individuell Påfylling

Lagertelling

Plytt valgt lomme


Reduser lagerbeholdning

Valgte utlåpte legemidler

Konfigurer endoser

Påfylling via plukkliste

Velg lagerbeholdning, deretter påfyll / etterfyll.

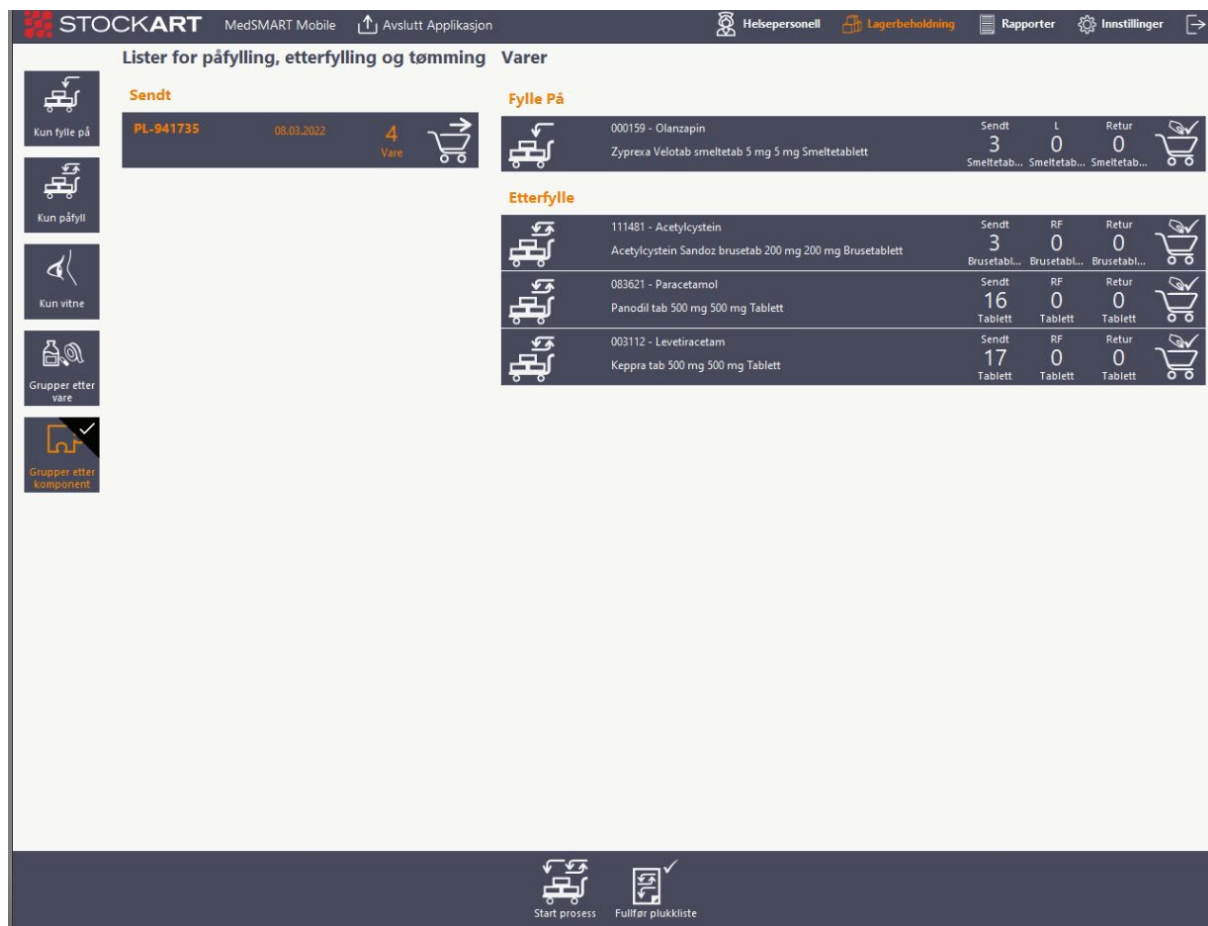

STOCKART MedSMART Mobile  Avslutt Applikasjon

Helsepersonell  Lagerbeholdning  Rapporter  Innstillinger 

Lister for påfylling, etterfylling og tømning Varer

 Kun fylle på
 Kun påfyll
 Kun vitne
 Grupper etter vare
 Grupper etter komponent

Sendt

PL-941735	08.03.2022	4 Vare	
------------------	------------	--------	---

Fyll På

000159 - Olanzapin	Sendt	L	Retur	
Zyprexa Velotab smeltetab 5 mg 5 mg Smeltetablett	3	0	0	
	Smeltetab...	Smeltetab...	Smeltetab...	

Etterfyll

111481 - Acetylcystein	Sendt	RF	Retur	
Acetylcystein Sandoz brusetab 200 mg 200 mg Bruasetablett	3	0	0	
	Bruasetabl...	Bruasetabl...	Bruasetabl...	
083621 - Paracetamol	Sendt	RF	Retur	
Panodil tab 500 mg 500 mg Tablett	16	0	0	
	Tablett	Tablett	Tablett	
003112 - Levetiracetam	Sendt	RF	Retur	
Keppra tab 500 mg 500 mg Tablett	17	0	0	
	Tablett	Tablett	Tablett	

Start prosess  Fullfør plukkliste 

Velg start prosess og følg instruksjoner på skjermen.

Individuell etterfylling

Søk opp preparat og lomme, eller velg på under min

Velg deretter individuell etterfylling og bekreft antallet som er i lommen før påfylling

Etterfyll



	1	2	3	4	5	6	7	8
A	A01	A02	A03	A04	A05	A06	A07	A08
B	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08
C	C01	C02	C03	C04	C05	C06	C07	C08
D	D01	D02	D03	D04	D05	D06	D07	D08
E	E01	E02	E03	E04	E05	E06	E07	E08
F	F01	F02	F03	F04	F05	F06	F07	F08
G	G01	G02	G03	G04	G05	G06	G07	G08
H	H01	H02	H03	H04	H05	H06	H07	H08
I	I01	I02	I03	I04	I05	I06	I07	I08


001878 Brinzolamid
Azopt øyedråper 10 mg/ml 10 mg/1 ml Øyedråper
[No image data](#)

Komponent : 2 - Single SMARTMatrix Drawer
Lomme : D06-1*1
Enhet : Øyedråper

Nåværende lager

-

2

+

Påfyllingsmengde

-

0

+

Standardlager

Tillat delmengde

Antall etter påfylling

2 Øyedråper

Spor holdbarhet

19.04.2022

Pasientens egne legemidler

Avfall



Avbryt

Rediger lomme

Godta

Lagertelling / endring av innstillinger på legemidler

Hak av valgt vare – deretter lagertelling

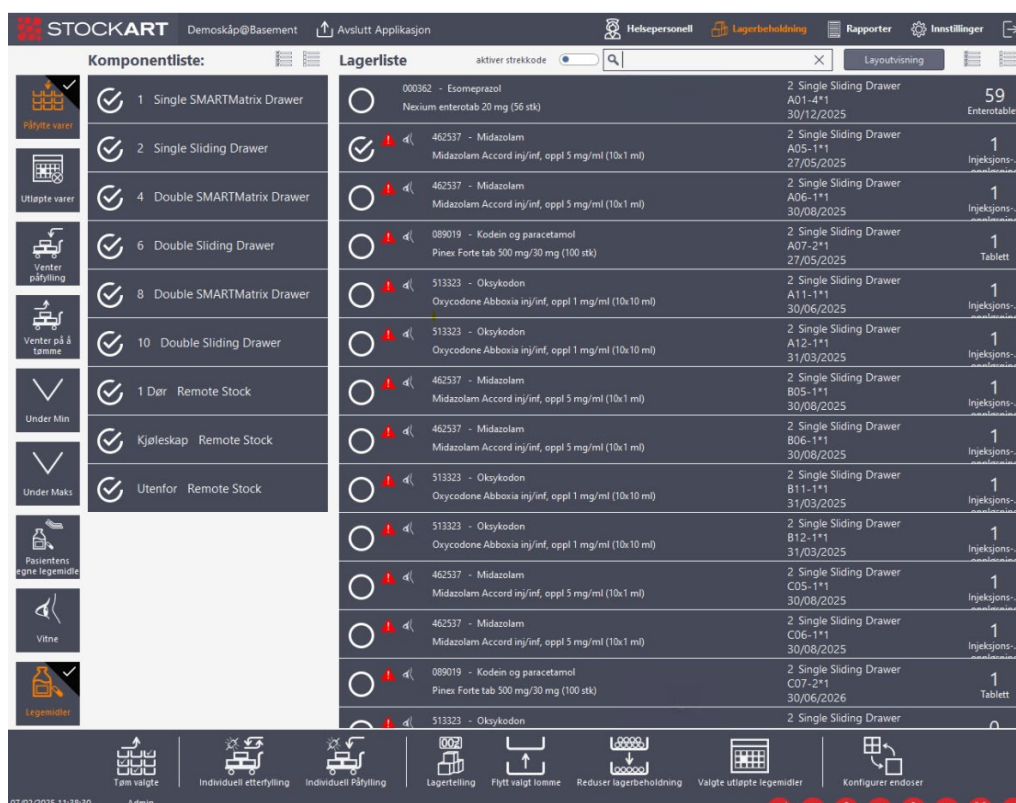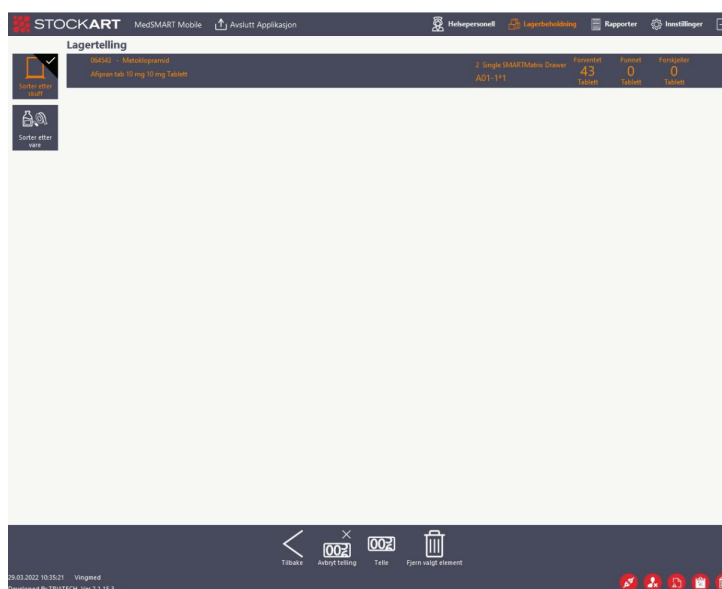Deretter telle :

Når dere er ferdig, velg fullfør telling og gå ut av bildet.

Telle Avvik

083621 Paracetamol

Panodil tab 500 mg 500 mg Tablett

Komponent : 2 - Single SMARTMatrix Drawer

Lomme : B04-1*1

Enhet : Tablett

Vennligst bekreft gjeldende lager eller skriv inn det faktiske antallet.

Nåværende lager

11

Virkelig telling

11

Spor holdbarhet

31.10.2022

Forskjeller

0

Avbryt

Rediger lomme

Godta

Fjern valgt element

For å endre maks og min, velg rediger lomme.
Endre og deretter Godta.


Vingmed 16.12.25
34

Utløpte legemidler

Gå på lager funksjoner, marker utløpte varer på venstre side.


Da får dere oversikt over varer som har gått ut, og som går ut de neste 90 dagene.

Det står dato og – x dager på de som har gått ut.

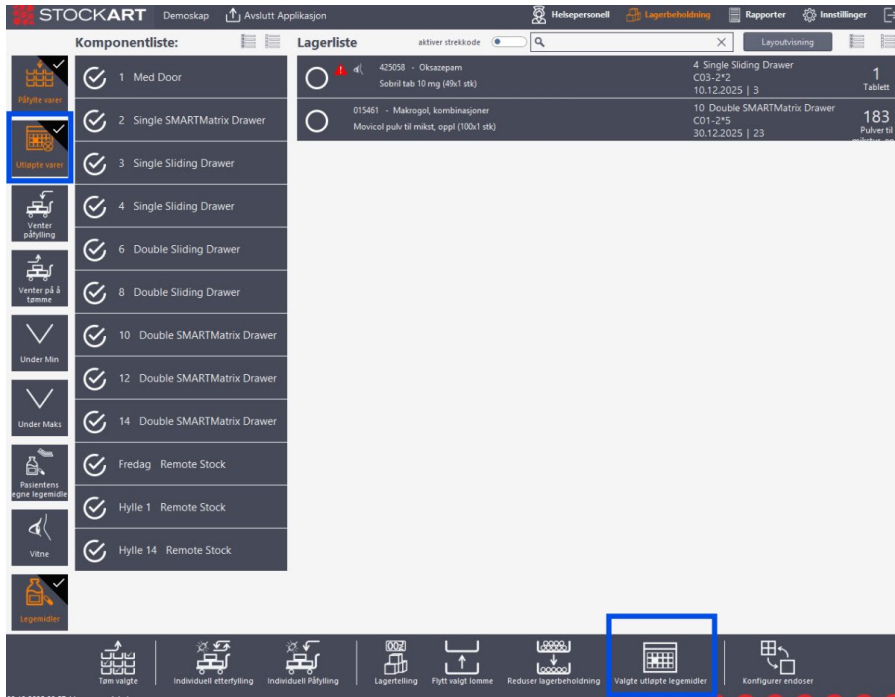

Hak på de legemidlene dere vil tømme, velg deretter valgte utløpte legemidler

Da kommer dette opp:

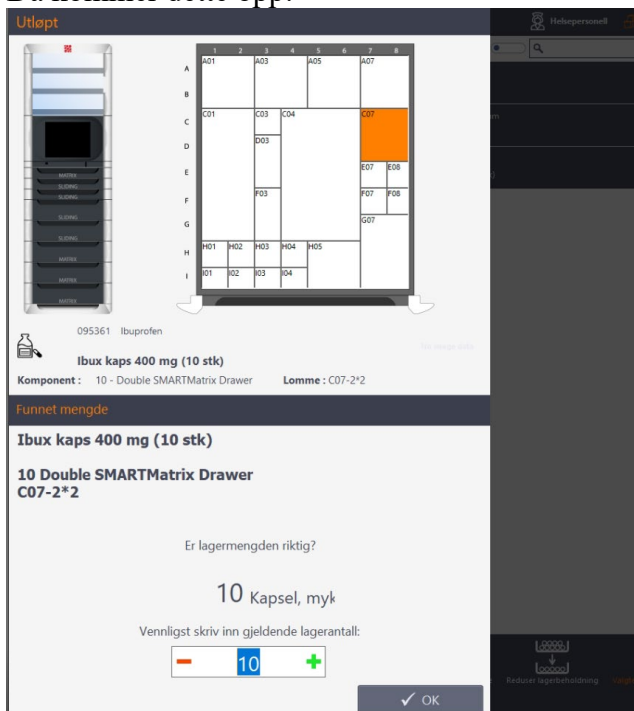

Trykk ok- da kommer dette bildet opp: Legg inn antallet som har gått ut og deretter godta, må være 1 som minimum.

Utløpt



095361 Ibuprofen

Ibux kaps 400 mg (10 stk)

Komponent : 10 - Double SMARTMatrix Drawer

Lomme : C07-2*2

Forventet mengde

10

Antall funnet

-

10

+

Utløpsdato

10.12.2025

Utløpt mengde

-

0

+

Avbryt

Rediger lomme

Godta

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

G

H

I

A01

A03

A05

A07

C01

C03

C04

C07

D03

E07

E08

F07

F08

G07

H01

H02

H03

H04

H05

I01

I02

I03

I04

4 Single Sliding Drawer

C03-2*2

10.12.2025 | 3

10 Double SMARTMatrix Dra

C07-2*2

10.12.2025 | 3

10 Double SMARTMatrix Dra

C01-2*5

30.12.2025 | 23

Reduser lagerbeholdning

Vælg utløst legemiddel


Konfigurer endoser

Vingmed 16.12.25
36


Flytte legemidler

Velg legemiddel – velg flytt valgte lomme.

Velg deretter til hvilken skuff/ lomme det skal flyttes til, deretter flytt valgt lomme

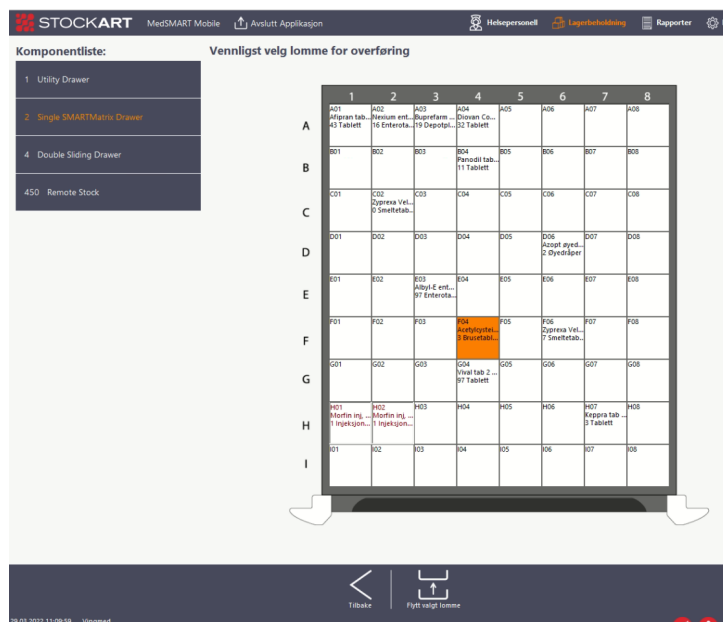


Sjekk at det er riktig innstillinger i ankomst adressen. Deretter godkjenn.

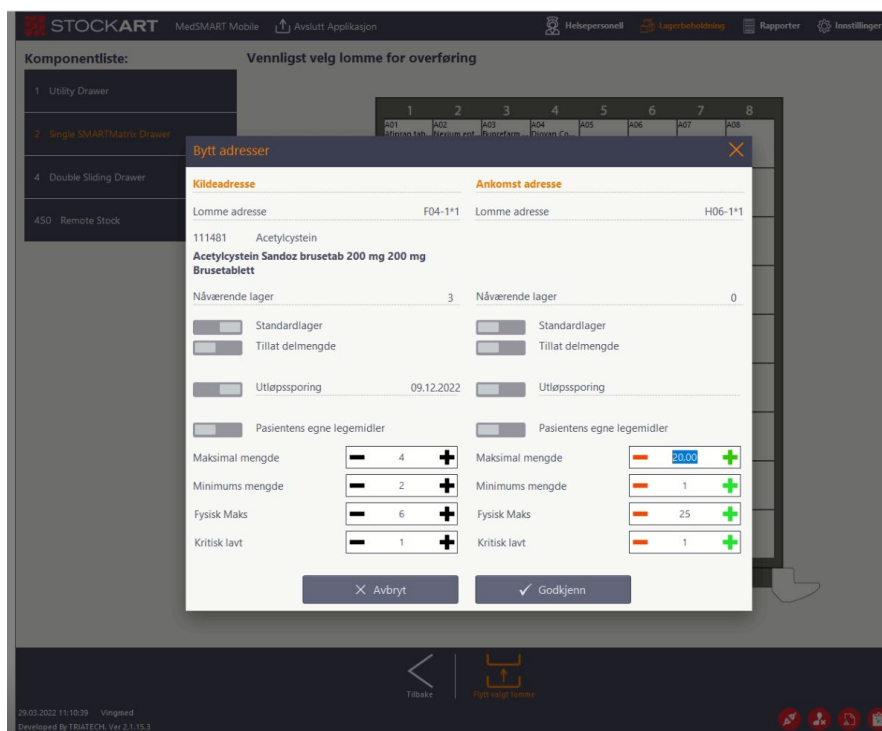

Følg så instruksjoner på skjermen.

Opprette lommer i kjøleskap og åpne hyller

1. Gå på kabinett konfigurasjon, velg kjøleskap. Velg konfigurer komponent.
Da kommer dette bildet opp

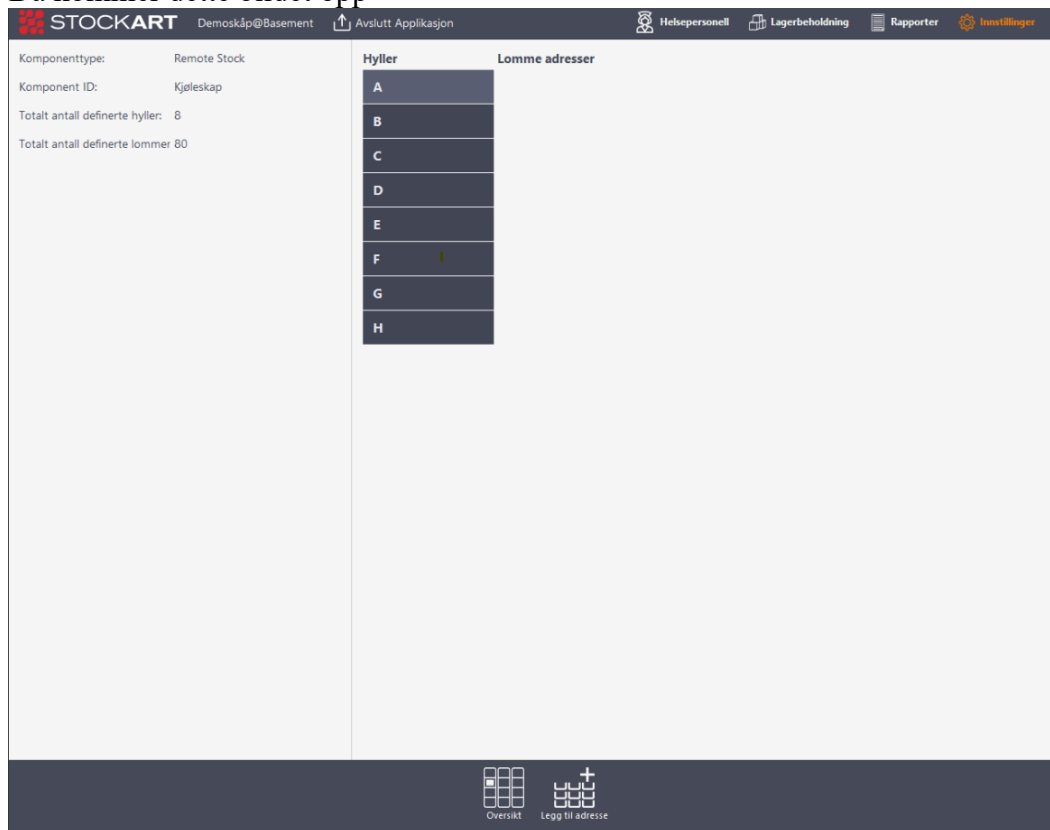

STOCKART Demoskåp@Basement Avslutt Applikasjon

Helsepersonell Lagerbeholdning Rapporter Innstillinger


Komponenttype: Remote Stock
Komponent ID: Kjøleskap
Totalt antall definerte hyller: 8
Totalt antall definerte lommer: 80

Hyller **Lomme adresser**

A
B
C
D
E
F
G
H

Oversikt Legg til adresse

2. Velg legg til adresse, skriv inn hvor mange hyller og lommer dere ønsker. deretter Opprett adresse

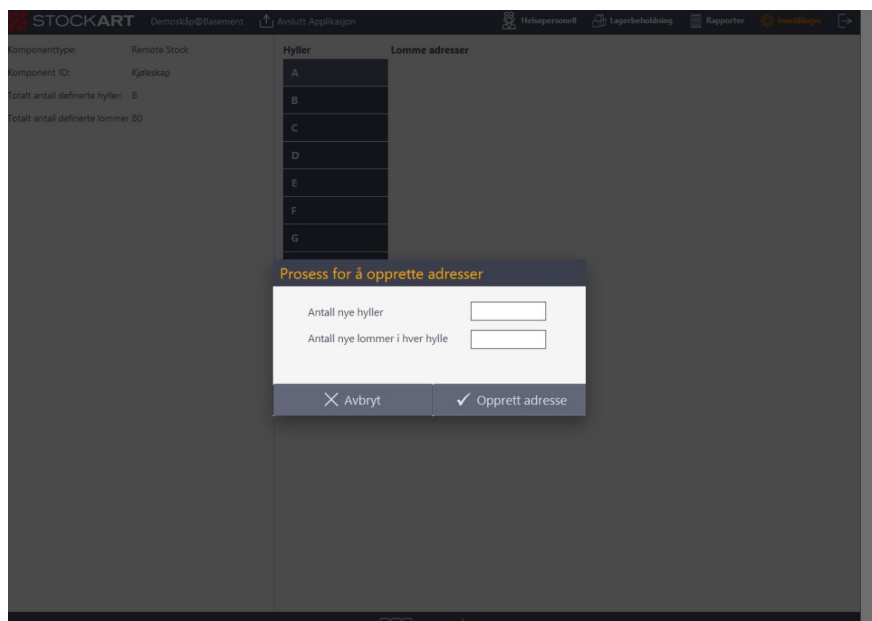

STOCKART Demoskåp@Basement Avslutt Applikasjon

Helsepersonell Lagerbeholdning Rapporter Innstillinger

Komponenttype: Remote Stock
Komponent ID: Kjøleskap
Totalt antall definerte hyller: 8
Totalt antall definerte lommer: 80

Hyller **Lomme adresser**

A
B
C
D
E
F
G

Prosess for å opprette adresser


Antall nye hyller
Antall nye lommer i hver hylle

✕ Avbryt ✓ Opprett adresse


Vingmed 16.12.25
39

Gjenoppretting av skuff – Utføres av superbruker

Dersom en skuff «feiler» er det behov for at denne gjenopprettes. Du finner ut hvilken skuff som har feilet ved å gå på **Innstillinger -> Kabinettkonfigurasjon**. Feilet skuff vil vises med en rød marg. Gå inn på feilet skuff ved å trykke på **Konfigurer komponent**.

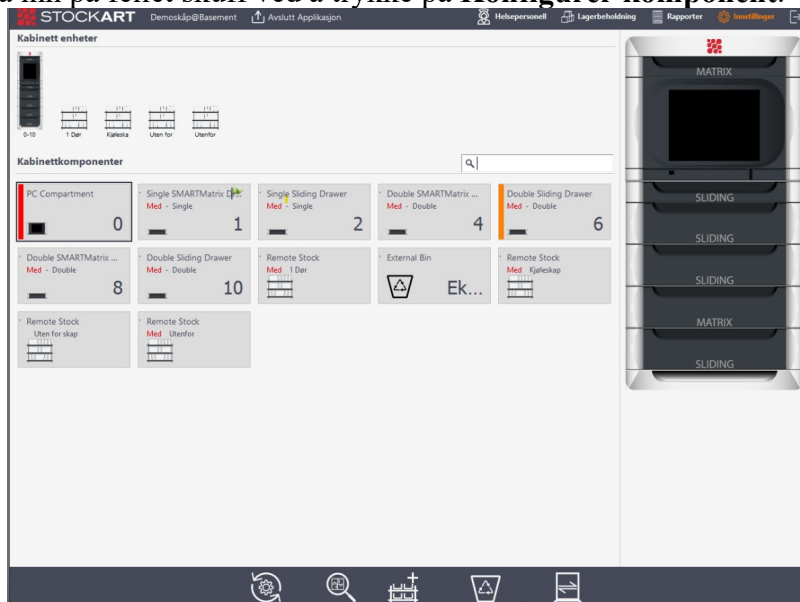

Du får nå opp skuffens layoutvisning. I bunntlinjen vil du få opp et oppdateringssymbol. Trykk på dette og skuffen er gjenopprettet, følg så instruksene på skjermen.

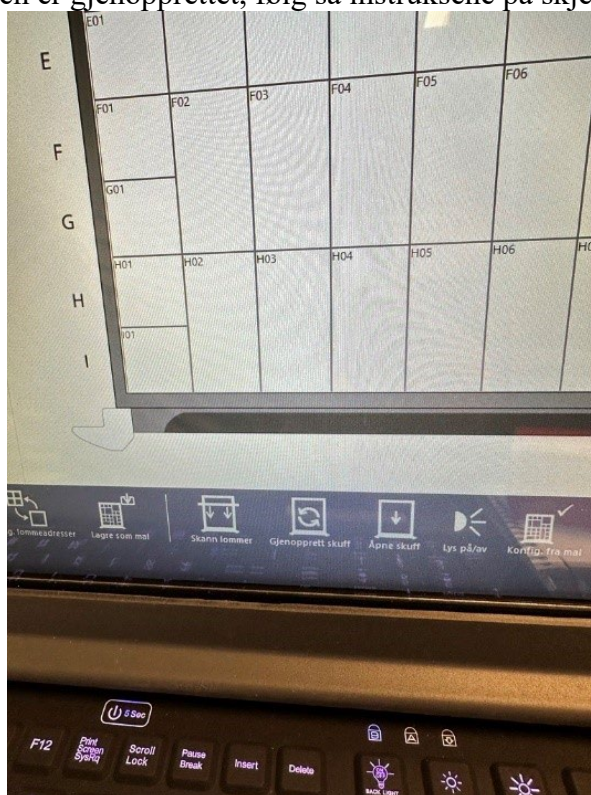


Oransje strek foran skuffen / dør betyr at man får feil meldingen finner ikke kort- id ved uttak eller påfylling av legemiddel. Da trenger skapet en restart. Bruk win tastet og deretter start på nytt.

Tømme returskuff

Husk å ha med nøkler og vær 2 pga vitne.

Velg lagerbeholdning – tømme returskuff

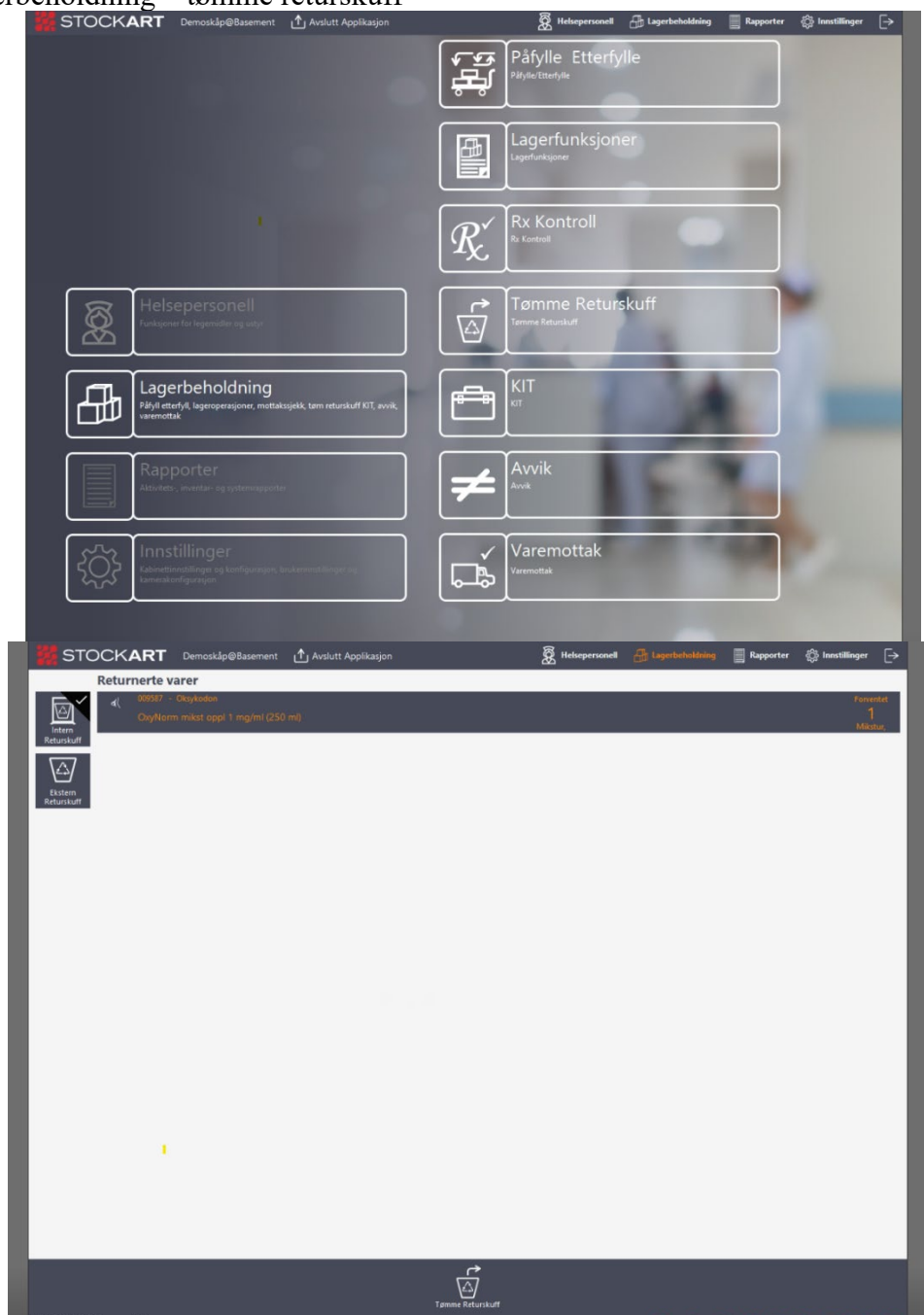

Velg tøm returskuff

Husk at det er både en intern og en ekstern returskuff.

Avfall hvis det ikke kan gjenbrukes. Lagerbeholdning hvis det skal tilbake i kabinettet. Utløpe hvis det har gått ut på dato.

Tømme Returskuff



	1	2	3	4	5	6	7	8
A	A01							
B								
C								
D								
E								
F								
G								
H								
I								

009587 Oksykodon

 **OxyNorm mikst oppl 1 mg/ml (250 ml)**

Komponent : 1 - Single SMARTMatrix Drawer Lomme : A01-8*4

Vennligst skriv inn antall funnet i returskuffen.

Forventet mengde 1 Mikstur, oppløsning Forskjeller 0

Antall funnet

Vennligst spesifiser stedet for å returnere funnet gjenstander

Lagerbeholdning	0	Avfall	1.00
Lager	0	Utløpe	0

✗ Avbryt
> Hopp over
✓ Godta



Helsetpersonell

Lagerbeholdning

Rapporter

Innstillinger


Forventet
1
Mikstur

Når du velger lagerbeholdning legger preparatet seg på en returliste som dere finner under påfylling og etterfyllingslister.


Endre konfigurasjon / layout i skuffer og dører

Velg innstillinger, deretter kabinett konfigurasjon.


Velg skuff og deretter konfigurer komponent.

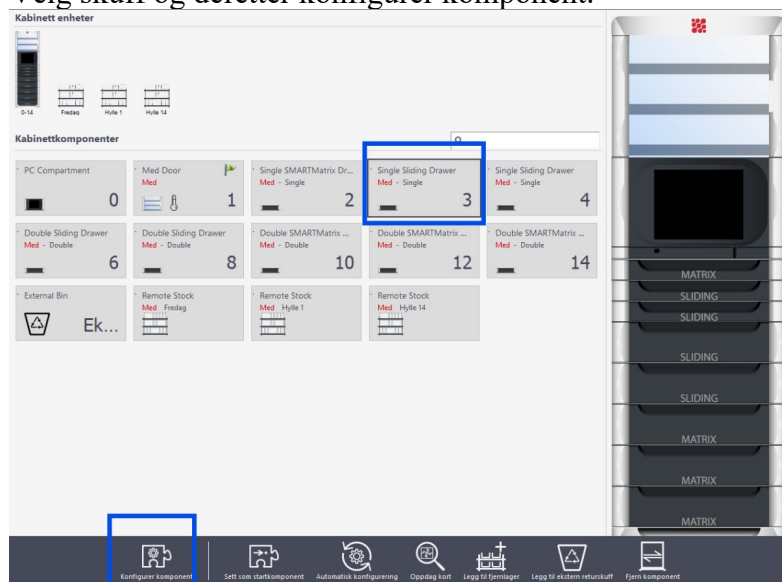

Velg konfigur. lommeadresser

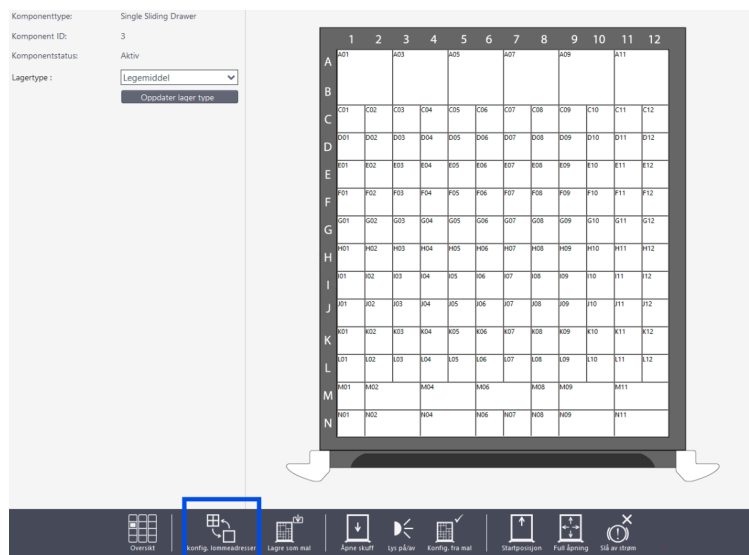

Marker lommene du vil slå sammen- det må være tomme lommer!
Trykk slå sammen.

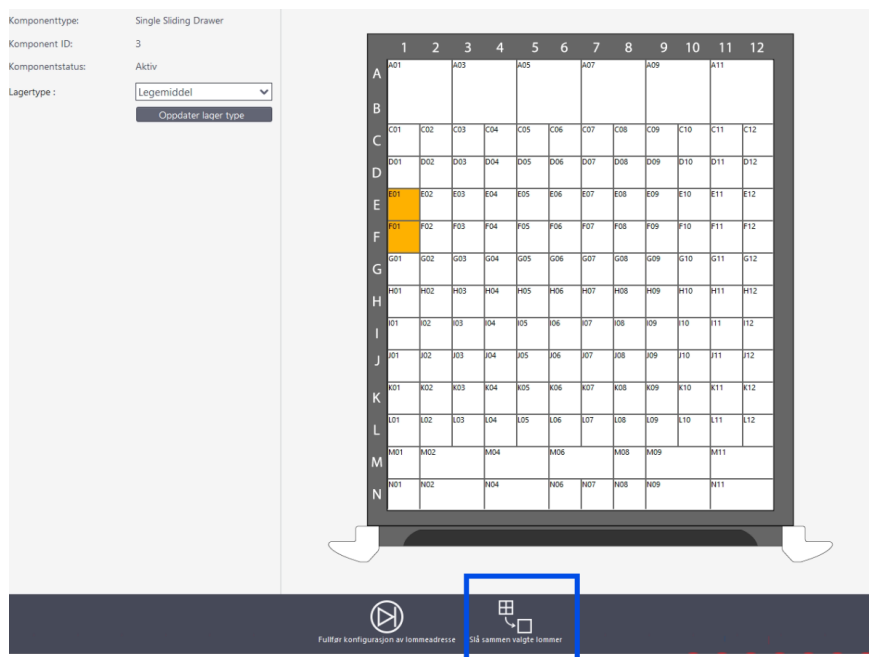

Gjør ferdig alle endringer av lommer før du trykker fullfør konfigurasjon.

