

På Smartcenter


Versjoner frem til og med 2.1.5.92, oppdatert 16.12.25

Innhold

Legge til nye pasienter- hvis de ikke kommer fra journalsystemet	2
Utskrivelse av pasient.....	3
Skriv inn pasient igjen.....	3
Nurseconnect	4
Bestille legemidler	6
Brukere	9
Sperret bruker	11
Når ansatte slutter	11
Legge til varer på listen over godkjente legemidler	12
Vitne på legemidler	14
CDM – kliniske data meldinger.....	16
Sette på etiketter.....	18
Se hva andre kabinetter har på lager	19
Rapporter	20
Administrasjon av lagerbeholdning.....	23
Endre maks og min på legemidler fylt på som endoser med unik modus	24
Avvikshåndtering.....	25
Delmengde	33
Forberede påfylling fra Smartcenter	35

Legge til nye pasienter- hvis de ikke kommer fra journalsystemet

Velg Pasienter

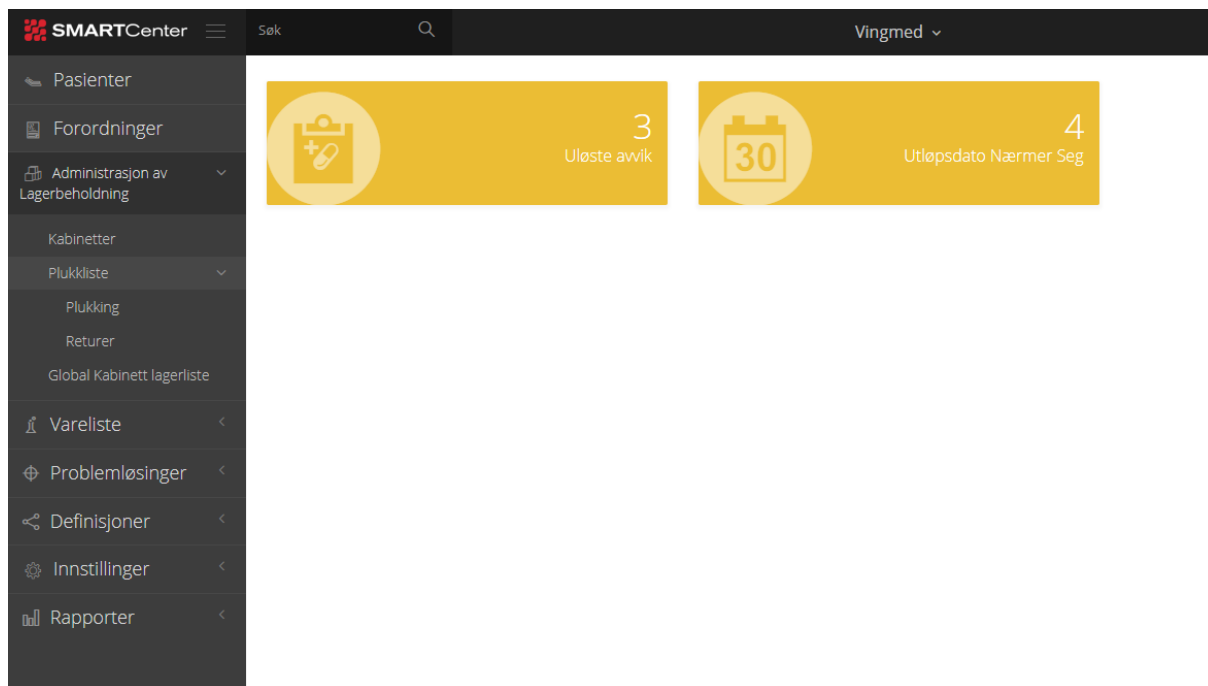

The screenshot shows the SMARTCenter interface. On the left is a dark sidebar menu with options: Pasienter, Forordninger, Administrasjon av Lagerbeholdning, Kabinetter, Plukklister, Plukking, Returer, Global Kabinett lagerliste, Vareliste, Problemløsinger, Definisjoner, Innstillinger, and Rapporter. The main area has a top bar with 'Søk' and 'Vingmed'. Below the menu, there are two yellow summary cards: 'Uløste avvik' with a value of 3, and 'Utløpsdato Nærmer Seg' with a value of 4.

Velg Ny pasient

Pasienter Nytt pasient

Totalt 17 Pasienter Innlagt ☒ Utskrive ☐ Alle ☐

Fullt navn	Pasientnummer	Journal ID	Avdeling	Innleggelsesstatus	Pasientklasse	Kjønn	Fødselsdato	Innleggingsdato	Utskrivningsdato	Handlinger
Arne Håvard Doaale	58077721507	84f75db7-3e18-4e52-aa27-d10aef31da4f	ICU	Innleggelse	Innlagt pasient	Mann		2/4/2022 1:00 PM		<button>Handlinger</button>
Carlos Andres Drozek	260492	b6964bed-a82f-4669-9325-eebb72df49bd	ICU	Innleggelse	Innlagt pasient	Mann		2/4/2022 1:00 PM		<button>Handlinger</button>
Gutten Hanssen	31057699999	7dd5820e-1606-417d-84e4-0201f9c6a7e6	ICU	Innleggelse	Innlagt pasient	Mann		2/4/2022 1:00 PM		<button>Handlinger</button>

Fyll inn alle felter.

Under lokalisering kan dere bare skrive 1.

Dere kan skrive samme nummer under journal id og pasientnummer. Fødselsdato legges inn senere.

Ny pasient

Fyll inn ny pasientinformasjon

Fornavn

Efternavn

Pasient Lokalisering

Journal ID

Pasientnummer

Avdeling

Velg pasient og deretter handling, vis detaljer

Pasienter >

Generell informasjon Innleggelsesinformasjon Klinisk Informasjon Pasientoverføringer

Grunnleggende Informasjon

Fornavn Linda Fødselsdato Begrenset Tilgang ☐

Mellomnavn Kjønn

Pasientnummer 1 Etternavn danser1 Sivilstatus

Journal ID 123 Prefiks Suffix Pasientklasse

I live ☐

Midlertidig Pasient ☐

Fyll inn fødselsdato og kjønn.

Utskrivelse av pasient

Velg pasient, så handling og deretter utskrive

Linda danser1	1	123	Medicin1	Innleggelse		3/7/2022 3:19 PM	Handlinger
Ettan Ettansson	111111	1111	ICU	Innleggelse	Innlagt pasient	3/8/2022 12:00 PM	Vis detaljer Utskrive

Page 1 of 2 (17 items) < 1 2 > Page size: 10

Skriv inn pasient igjen

SMARTCenter VINGMED AS Admin - Norgeplan-NO

Pasienter

Totalt 1 Pasienter

☐ Innlagt ☒ Utskrevet ☐ Midlertidig pasient ☐ Alle

Fullt navn	Fødselsnummer	Journal ID	Avdeling	Innleggelsesstatus	Pasientklasse	Kjønn	Fødselsdato	Innleggingsdato	Utskrivningsdato	Handling
123456	11045010303	jowho389	Vingmed Test Nursing Unit A	Utskrevet					06.06.2025 16:46:53	Skriv inn på nytt


Page 1 of 1 (1 items) < 1 > Page size: 10

Nurseconnect


Denne funksjonen er for å gjøre klart medisinstillingene som skal hentes på legemiddelkabinettet.

Dette gjør dere klar via smartcenter på sikkersone.

Velg Nurseconnect, velg kabinett

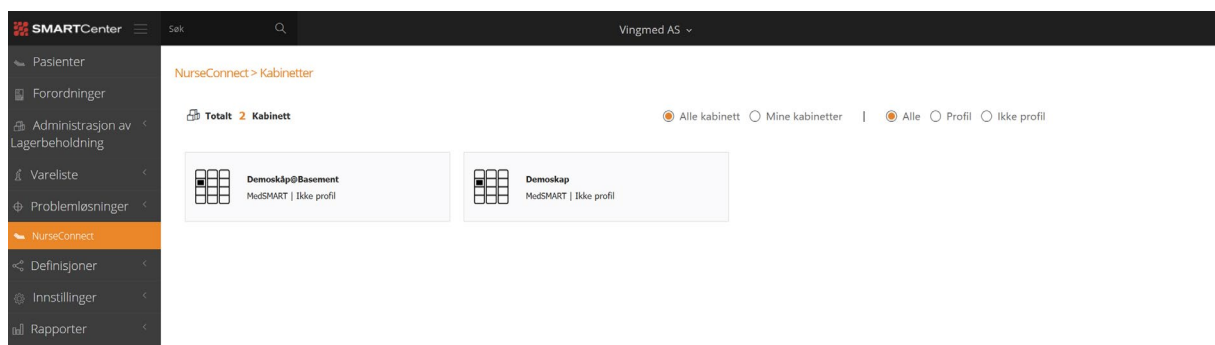

Søk opp pasient, dobbeltklikk på pasienten så ta ut

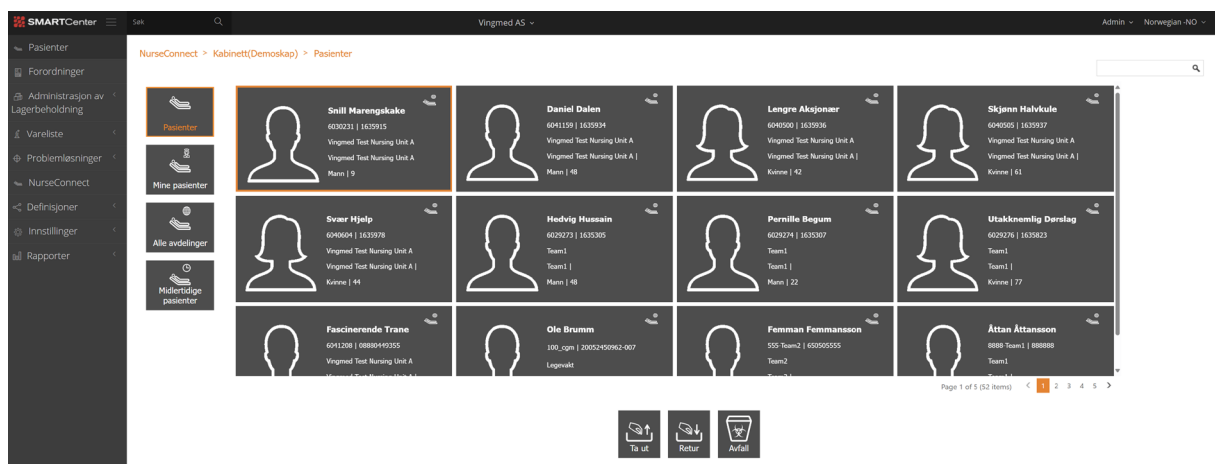

Velg legemidlene pasienten skal ha ved å søke opp i søkefeltet ved siden av medikamenter.

SMARTCenter - VINGMED AS - Admin - Norwegian NO

NurseConnect > Kabinett(Demoskap) > Pasienter > Ta ut

Sivert Hjeltnes
Vingmed Test Nursing Unit A
Fødselsnummer: 1635978
Journal ID: 6040604
Alder: 44
Kjønn: Kvinne
Rom: Vingmed Test Nursing Unit A
Seng:

Legemidler

Medikament	Antall	Uttak
539772 Fentanyl Fentanyl ratiopharm depotplaster 12 mikrog/time (5 stk)	2	Depotplaster
290895 Oksykodon Oxyform kaps 10 mg (50x1 stk)	10	Kapsel, hard
171174 Morfin Morfin Abcur inj, oppl 10 mg/ml (10x1 ml)	6	Injeksjonsvæske, oppløsning
073471 Oksykodon og nalkodon Tanonalla depottab 10 mg/5 mg (28x1 stk)	8	Depottablett
000139 Olonazapin Zyprexa Velotab smeltetab 5 mg (28 stk)	99	Smeltetablett
197809 Dexametason Stesolid rektalvæske, oppl 10 mg/2,5 ml (5x2,5 ml)	7	Rektalvæske, oppløsning
478008 Morfin Oramorph dråper, oppl 20 mg/ml (20 ml)	11	Dråper, oppløsning
110699 Koden og parasetamol Pinex Forte tab 500 mg/30 mg (20 stk)	14	Tablett
332937 Dexametason Vival tab 2 mg (20x1 stk)	15	Tablett
015461 Makropol, kombinasjoner Movicol pulv til mikstur, oppl (100x1 stk)	20	Pulver til mikstur, oppløsning

Page 1 of 2 (14 items) < 1 2 >

Reservasjonsliste

Ingen data å vise

Tilbake til pasienter | Tidligere uttak | Pasientdetaljer | Lagre

Velg antall, og klikk nede til høyre (blir oransje) for å legge over i høyre side klar for uttak, deretter lagre.

SMARTCenter - VINGMED AS - Admin - Norwegian NO

NurseConnect > Kabinett(Demoskap) > Pasienter > Ta ut

Sivert Hjeltnes
Vingmed Test Nursing Unit A
Fødselsnummer: 1635978
Journal ID: 6040604
Alder: 44
Kjønn: Kvinne
Rom: Vingmed Test Nursing Unit A
Seng:

Legemidler

Medikament	Antall	Uttak
539772 Fentanyl Fentanyl ratiopharm depotplaster 12 mikrog/time (5 stk)	2	Depotplaster
290895 Oksykodon Oxyform kaps 10 mg (50x1 stk)	10	Kapsel, hard
171174 Morfin Morfin Abcur inj, oppl 10 mg/ml (10x1 ml)	6	Injeksjonsvæske, oppløsning
073471 Oksykodon og nalkodon Tanonalla depottab 10 mg/5 mg (28x1 stk)	8	Depottablett
000139 Olonazapin Zyprexa Velotab smeltetab 5 mg (28 stk)	99	Smeltetablett
197809 Dexametason Stesolid rektalvæske, oppl 10 mg/2,5 ml (5x2,5 ml)	7	Rektalvæske, oppløsning
478008 Morfin Oramorph dråper, oppl 20 mg/ml (20 ml)	11	Dråper, oppløsning
110699 Koden og parasetamol Pinex Forte tab 500 mg/30 mg (20 stk)	14	Tablett
332937 Dexametason Vival tab 2 mg (20x1 stk)	15	Tablett
015461 Makropol, kombinasjoner Movicol pulv til mikstur, oppl (100x1 stk)	20	Pulver til mikstur, oppløsning

Page 1 of 2 (14 items) < 1 2 >

Reservasjonsliste

Ingen data å vise

Start mengde

171174 Morfin
Morfin Abcur inj, oppl 10 mg/ml (10x1 ml)

Injeksjonsvæske, oppløsning

Kabinettlager: 6

✓


Tilbake til pasienter | Tidligere uttak | Pasientdetaljer | Lagre

Nå ligger bestillingen klar for uttak på kabinettet, på pasienten.


Bestille legemidler

Når dere nå da skal bestille medisiner er oppskriften følgende:

1. logg på i smartcenter
2. Administrasjon av lagerbeholdning, bestillingsliste, bestilling, så opprett ny bestillingsliste

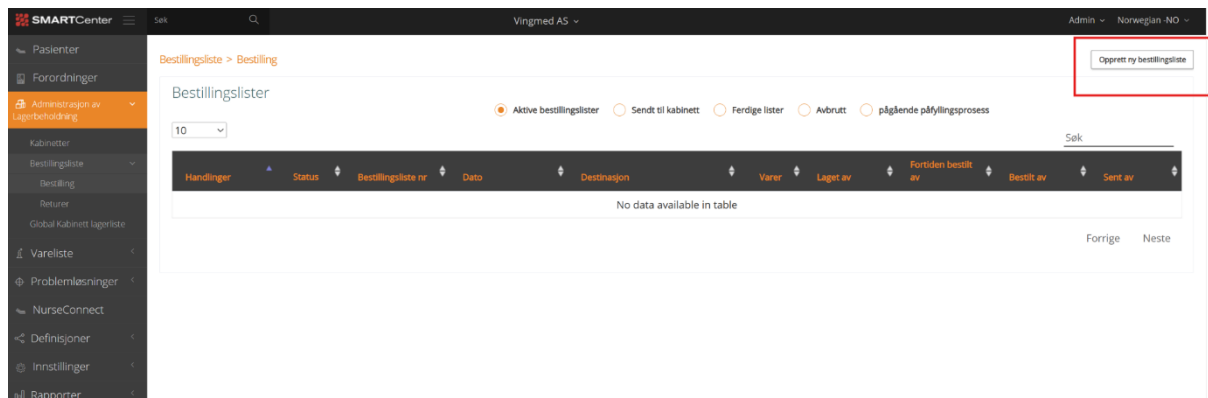

Velg destinasjon, under min og fyll på til maks.

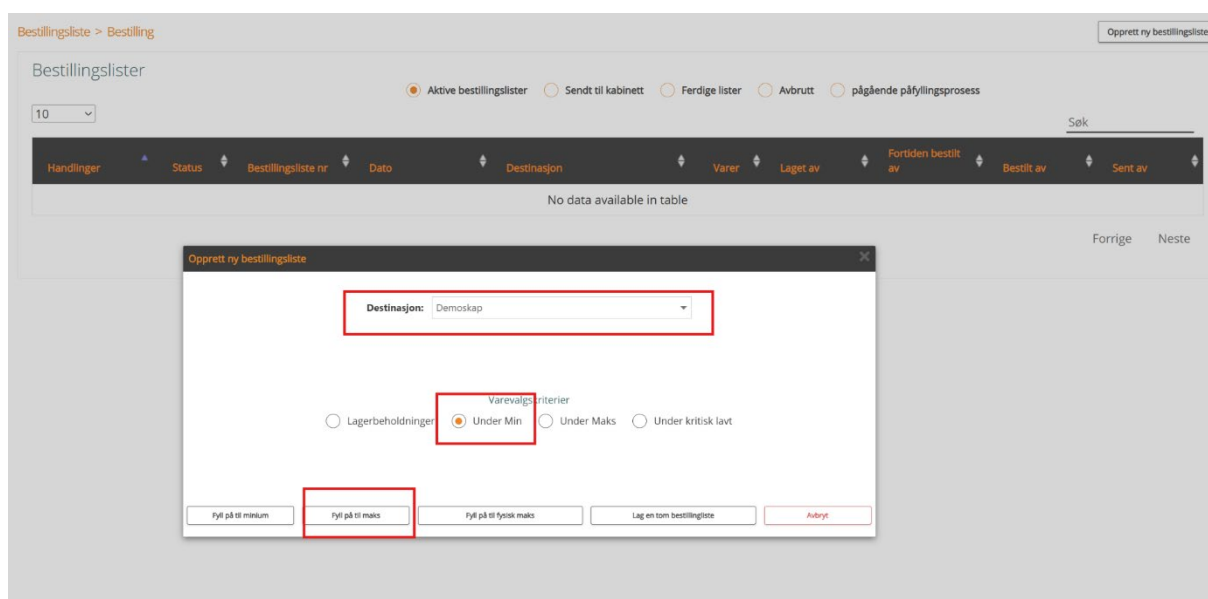

Når listen åpner seg i smartcenter er den sendt til aponet, og ligger under favorittlister.

Åpne en ny fane, logg dere inn i på apoteket sin side.

I handlekurven får dere vite hva som kommer, er restet etc og dere kan legge til andre varer som vanlig.

Når dere har bestilt hos apoteket og fått bekreftelse der.

Gå i smartcenter for å rydde og oppdatere listen.

Søppelbøtte på det dere ikke bestilte

Endre de blå tallene til de antallet dere bestilte, husk at skapet teller antall ikke pakker bortsett fra der dere la inn pakker / enheter.

PL-618FF4
Demoskap

Sjekk ut Send bestillingsliste til kabinett Legg til ny vare Legg liste til senere

Bestillingslister

Sorter etter komponent Sorter etter navn

Reseptgruppe:

Alle A bestille Bestilt

Søk

Transaksjonstype	Status	Varenr	Varenavn	Enhet	Antall A bestille	Bestilt anfall	Destinasjon Lagerantall	Min	Maksimum	Avvik Maks	Utløpsdato	Optimal	NurseConnect	Forsendelse anfall
✓	Etterfylle	015461	Moxicon pulver til mikst, oppl (100ml vsk)	Pulver til mikst, opplanning	50	50	20	30	100	150	31-12-2026			
✓	Etterfylle	083865	Paracetol tab 500 mg (300 stk)	Tablett	300	300	20	300	600	900	31-12-2027			

Følgende 1 Neste

Når listen er ferdig trykker dere på send bestillingsliste til kabinett, og da ligger den under påfylling / etterfylling på kabinettet.

Når varene kommer fra apoteket:

Logg inn på kabinettet



Demoskop
Avslutt Applikasjon
Helsepersonell
Lagerbeholdning
Rapporter
Innstillinger

Kun påfylling

Kun etterfylling

Kun vitne

Grupper etter vare

Grupper etter komponent

Sendt

PL-9C0AF9

06.06.2025

Admin

2

Vare

Bestilt

015461 - Makrogol, kombinasjoner	Sendt	mengde	Retur
Movicol pulv til mikst, oppl (100x1 stk)	50	0	0
	Pulver til	Pulver til	Pulver til
083865 - Paracetamol	Sendt	mengde	Retur
Panodil tab 500 mg (300 stk)	300	0	0
	Tablett	Tablett	Tablett

Start påfyllingsliste

Ferdig påfylt liste

06.06.2025 14:18:09

Admin

Developed By TRIATECH, Ver 2.2.5.29

Da guider skapet dere til en og en lomme, i samme bildet som når dere har brukt individuell etterfylling.

Brukere

Midlertidig brukere opprettes fra smartcenter – AD brukere hentes direkte inn fra integrasjon


Navn Etternavn	Brukernavn	Arbeidsbeskrivelse	konto status	Kontoens utløpsdato	Brukertype	Handling
Administrator User	administrator	System Administrator	Aktiv	Ikke utløpende bruker	Systembruker	Handling
Cecilie	cbm		Passiv	Ikke utløpende bruker	Systembruker	Handling
Vingmed	vingmed		Aktiv	Ikke utløpende bruker	Systembruker	Handling

Velg Brukere, deretter ny bruker, fyll ut røde felter og lagre.


Velg handlinger og deretter tilordnet rolle

Navn Etternavn	Brukernavn	Arbeidsbeskrivelse	konto status	Kontoens utløpsdato	Brukertype	Handling
Administrator User	administrator	System Administrator	Aktiv	Ikke utløpende bruker	Systembruker	Handling
Cecilie	cbm		Passiv	Ikke utløpende bruker	Systembruker	Handling
Vingmed	vingmed		Aktiv	Ikke utløpende bruker	Systembruker	Handling


Dra valgt rolle over til liste over tildelte roller

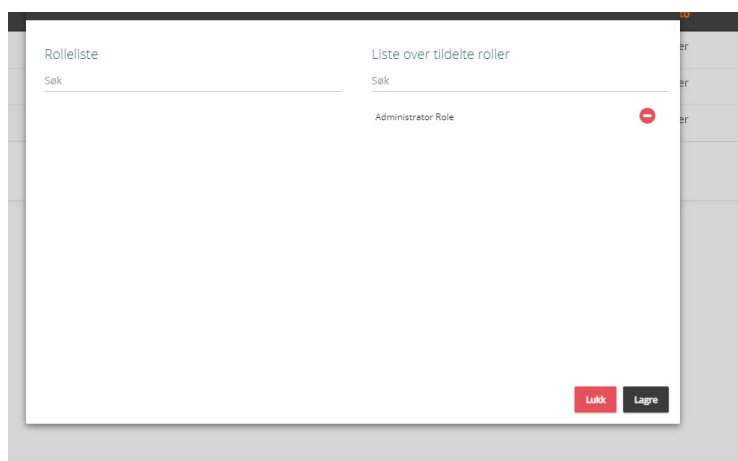

Velg område liste,

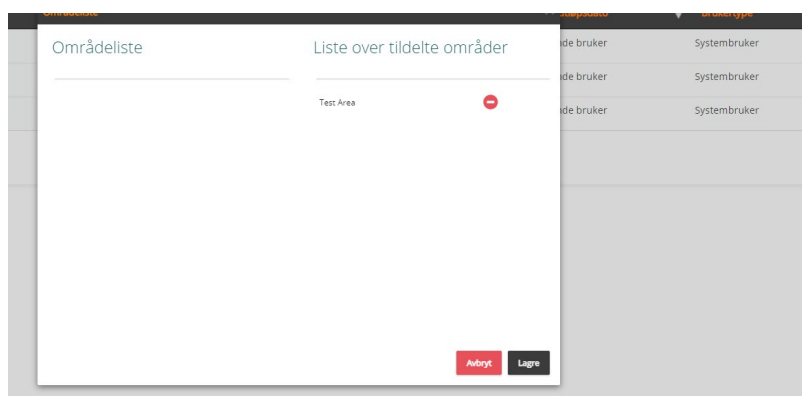

Velg vitne. Ved bio id fritak- velg ikke bio id bruker.

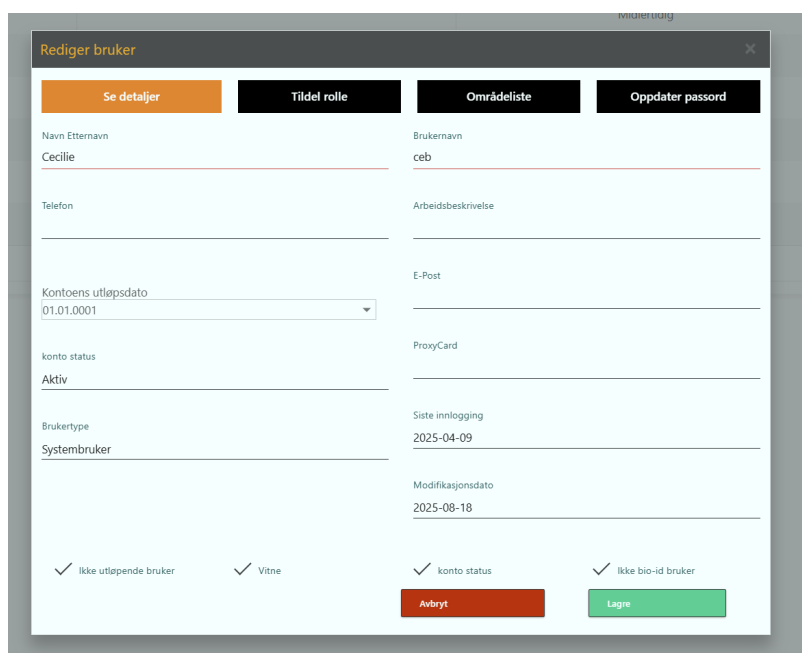

Sperret bruker

Hvis noen sperrer brukeren sin ved å taste feil passord x 3. blir kontostatus satt blank, hak denne på og den ansatte kan logge seg på igjen.

Når ansatte slutter

Ad brukere blir automatisk fjernet fra systemet, men systembrukere (lokale brukere som dere har opprettet) må dere selv sette som passive.

For å slette bio id som er lagret- gå på handlinger og tilbakestill bio id.

Gå deretter på oppdater bruker

Sett utløpsdato og fjern alle hakene nede, trykk deretter lagre.

Aktiv

Rediger bruker

Se detaljer

Tildel rolle

Områdeliste

Oppdater passord

Navn Etternavn

Nok en test

Telefon

Kontoens utløpsdato

26.04.2025

konto status

Passiv

Brukertype

Systembruker

Brukernavn

Tester

Arbeidsbeskrivelse

E-Post

ProxyCard

Siste innlogging

Modifikasjonsdato

2025-11-06

☐ Ikke utløpende bruker
 ☐ Vitne

☐ konto status
 ☐ Ikke bio-id bruker

Avbryt

Lagre

Status endrer seg til passiv når datoen er satt.

Innstillinger > Brukere

My bruker

Navn Etternavn	Brukernavn	Arbeidsbeskrivelse	Konto status	Kontoens utløpsdato	Brukertype	Handlinger
Nok en test	Tester		Passiv	26.04.2025 09:00:00	Systembruker	Handlinger
Handlingsplan	Handlign	Handlign	Midlertidig	Ikke utløpende bruker	Systembruker	Handlinger

Status midlertidig betyr at den ansatte ikke har logget seg på kabinett eller smartcenter.

Legge til varer på listen over godkjente legemidler

1. Logg på i Smartcenter

2. Velg vareliste – deretter legemiddelliste.

SMARTCenter

Pasienter

Forordninger

Administrasjon av

Lagerbeholdning

Vareliste

Problemløsninger

NurseConnect

Definisjoner

Innstillinger

Rapporter

Vareliste > Legemiddelliste

Ny legemiddelliste

Å, Totalt 14413 Legemiddel

Søk

Godkjent

Venter på Godkjenning

Alle

Legemiddel nr	Varenavn	Handelsnavn	Generisk Navn	Doseringsform	Generisk byttekodegruppe	ATC kode	Status	Handlinger
231393	Alyostal negativ kontroll oppl til prikktest(3 stk) 0.000 /O Oppløsning til prikktest	Alyostal negativ kontroll oppl til prikktest(3 stk)	Midler til allergidiagnostikk	Oppløsning til prikktest		V04CL	GOOKJENT	Handlinger
364734	Apovit B-combin sterk tab(100 stk) 0.000 /O Tablett	Apovit B-combin sterk tab(100 stk)	Vitamin B-kompleks, usammensatte	Tablett		A11EA	GOOKJENT	Handlinger
222232	Combivent UDV inh væske, oppl(60 stk) 0.000 /O Inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning	Combivent UDV inh væske, oppl(60 stk)	Salbutamol og Ipratropiumbromid	Inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning		R03AL02	GOOKJENT	Handlinger

3. Trykk på ny legemiddelliste og fyll inn informasjonen som på bildet under:

4. Godkjenn varen ved å dra knappen til høyre, legg til doseringsform og trykk oppdater legemiddel.

5. Gå på Enhetens legemidler – tilgjengelig legemiddelliste. Velg vare, trykk på handlinger og legg til enhet.

6. Da kommer du videre til dette bildet- godkjenn ved å dra til høyre. Velg deretter enhetens spesielle innstillinger og fyll inn slik som bildet viser: deretter oppdater legemiddel.

For A og B preparater:

Bekreft Antall		Lukket	Maksimal uttaksmengde	Ventetid (Day)
Reseptgruppe	Farlig Avfall Klasse	Lokasjon for retur	Kostnad	Innleggsoverførsel (dag)
Reseptgruppe A		Intern Returskuff	0	- 0

Automatisk løsning av avvik	Avfall Under Uttak	Sporing av utleddato	Ladbar
Høyt prisst	Høy Risiko	Vareparti Sporing	Vis konvertering
Retur til avfallsbeholder	Etikettskriver	Serienummersporing	Tilleg uttak med kostnadscenter
Ikke Lagervare	Rx Kontroll	Fakturerbare	For nærmeste tid (minutter)
LOT Capture	Verify Item	Capture Special Code	

Vitnekonfigurasjon

Påfyl/Essefyll	Tam	Ta ut	Retur
Avfall	Lagerbeholdning	Avfall ved utlegholdbarhet	Tam returskuff
Lagerreduksjon	Rx Kontroll	På liste over legemidler uten ordinasjon	

Alle andre preparater skal ha:

Enhetens spesielle innstillinger

Tellmetode	Farekode	Brøkkel	Maksimal uttaksmengde	Ventetid (Day)
Lukket		Stryke	- 0 +	- +
Reseptgruppe	Farlig Avfall Klasse	Lokasjon for retur	Kostnad	Innleggsoverførsel (dag)
Reseptgruppe C		Ekstern	0	- +

Automatisk løsning av avvik	Avfall Under Uttak	Sporing av utleddato	Ladbar
Høyt prisst	Høy Risiko	LOT Sporing	Vis konvertering
Retur til avfallsbeholder	Etikettskriver	Serienummersporing	
Ikke Lagervare	Rx Kontroll	Fakturerbare	For nærmeste tid (minutter)
LOT capture	Bekreft vare	Ta opp spesialkode	

Vitnekonfigurasjon

Påfyl/Essefyll	Tam	Ta ut	Retur
Avfall	Lagerbeholdning	Avfall ved utlegholdbarhet	Tam returskuff
Lagerreduksjon	Rx Kontroll	På liste over legemidler uten ordinasjon	

Vitne på legemidler

Gå i lagerrapport eller administrasjon av lagerbeholdning – kabinetter, for å finne varenummer på de preparatene dere ønsker vitne på. Vitne settes på pr varenummer.

Velg Vareliste – enhetens legemidler

Søk i feltet oppe til høyre etter varenummer på den varen dere ønsker vitne på.

Velg deretter handlinger og vis detaljer – se piler i bildet,


[illegible]

Sett Uttak grønn under vitneinnstillinger


15

CDM – kliniske data meldinger


Gå i smartcenter – definisjoner, generelle definisjoner og deretter cdm. Trykk ny cdm.

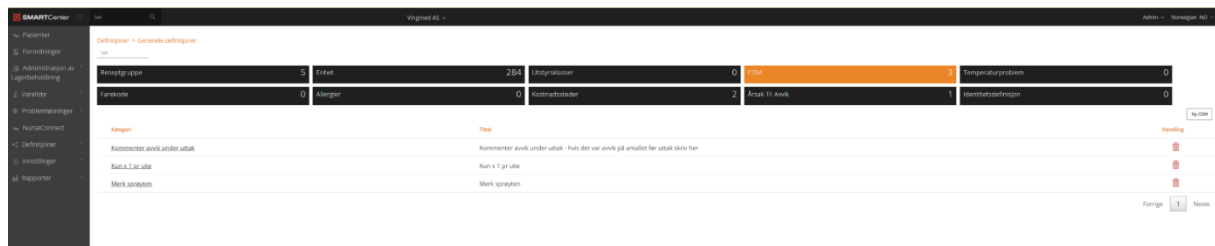


Fyll inn alle felt. For å bare få informasjon på skjermen før uttak velg informasjon og spør en gang. Deretter oppdater.

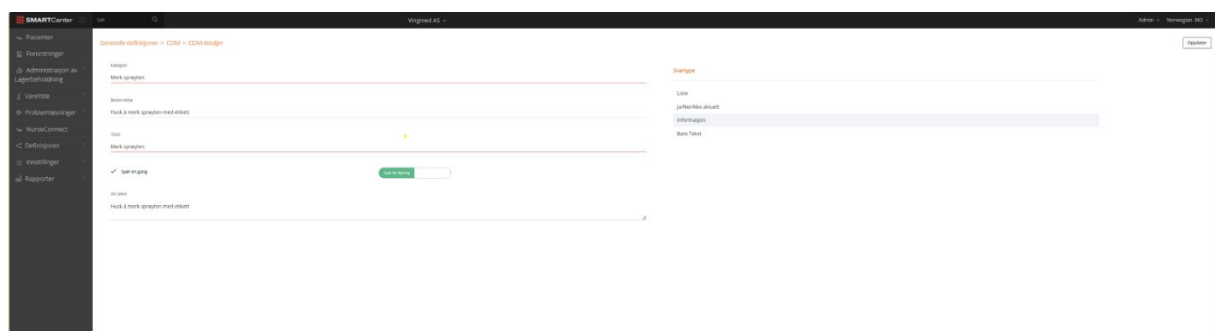

Gå på varelister – velg enhetens legemiddel- søk opp varenummeret du vil legge til cdm på.

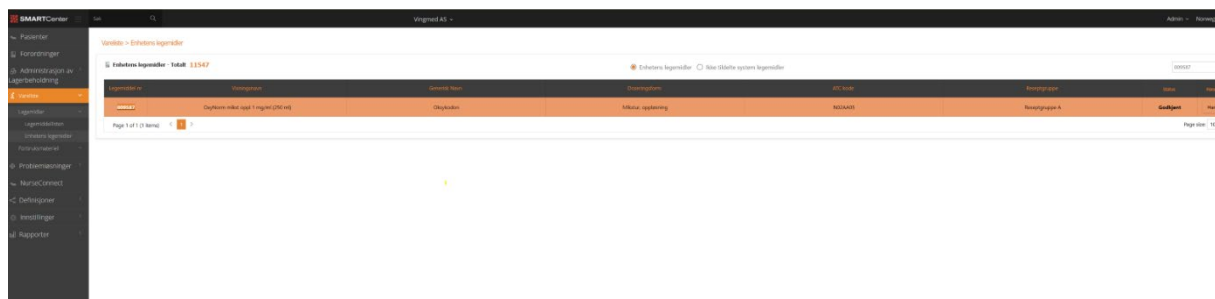


Velg cdm og hak av på når du vil at meldingen skal vises. Deretter oppdater legemiddel

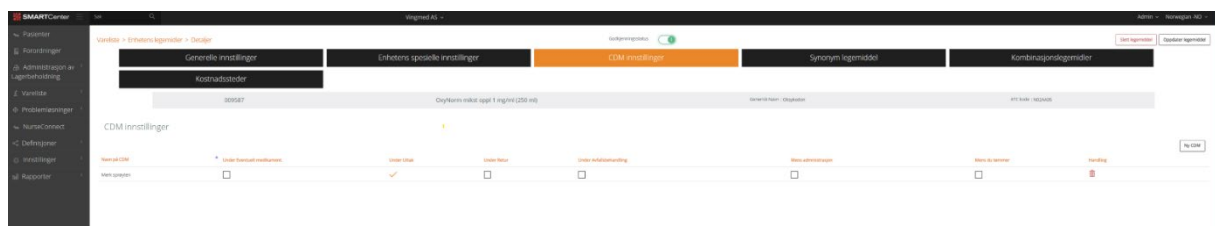


Gå på innstillinger – kabinetter- detaljer – cdm.

Legg til cdm og oppdater kabinett.

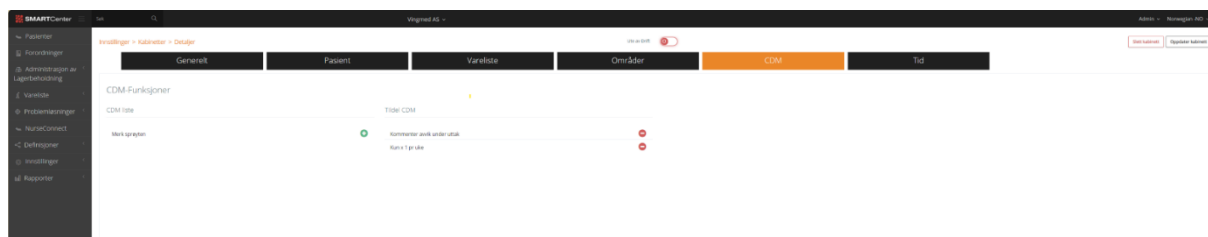

Ved uttak på kabinettet vil det da se slik ut:

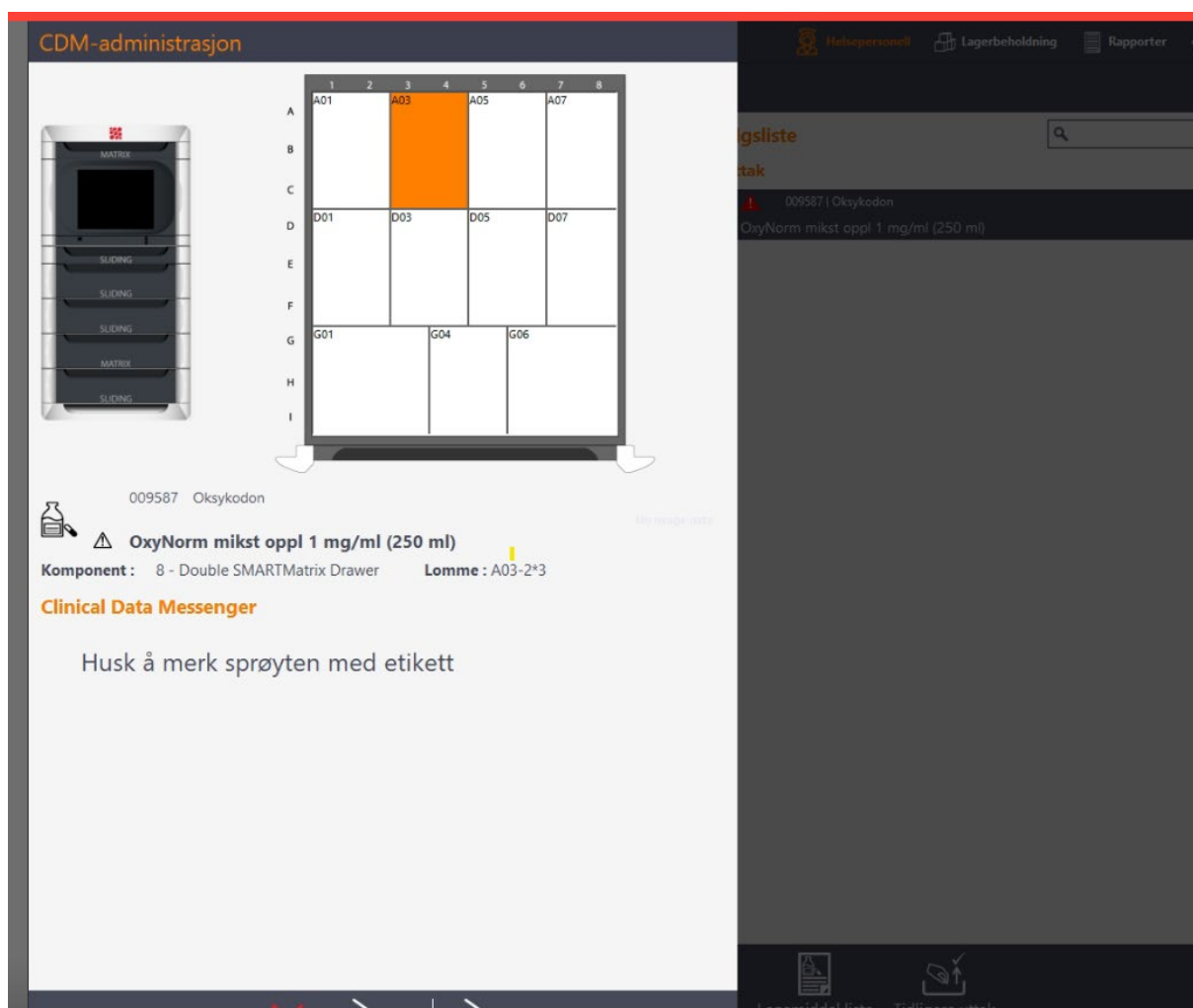

Sette på etiketter

Vareliste- enhetens legemidler- søk opp varenummeret

Legemiddel nr	Navn	Løstid	Dosering	ATC kode	Navngruppe	Styrke	Handl.
000001	Zyrtec 1mg/ml sirup (10 mg/5 ml)	Chlorpheniramin	1mg/ml	N01AA01	Navngruppe C	10 mg	Handl.
000002	Zyrtec 1mg/ml sirup (10 mg/5 ml)	Chlorpheniramin	1mg/ml	N01AA01	Navngruppe C	10 mg	Handl.
000003	Zyrtec 1mg/ml sirup (10 mg/5 ml)	Chlorpheniramin	1mg/ml	N01AA01	Navngruppe C	10 mg	Handl.
000004	Zyrtec 1mg/ml sirup (10 mg/5 ml)	Chlorpheniramin	1mg/ml	N01AA01	Navngruppe C	10 mg	Handl.
000005	Tracheol 1mg/ml sirup (10 mg/5 ml)	Albuterol	1mg/ml	S02AC01	Navngruppe C	10 mg	Handl.
000006	Tracheol 1mg/ml sirup (10 mg/5 ml)	Albuterol	1mg/ml	S02AC01	Navngruppe C	10 mg	Handl.
000007	Nedex 1mg/ml sirup (10 mg/5 ml)	Desloratadin	1mg/ml	A02DA01	Navngruppe C	10 mg	Handl.
000008	Exoran 1mg/ml sirup (10 mg/5 ml)	Montelukast	1mg/ml	S02AC01	Navngruppe C	10 mg	Handl.
000009	Solo 1mg/ml sirup (10 mg/5 ml)	Albuterol	1mg/ml	S02AC01	Navngruppe C	10 mg	Handl.
000010	Compen 1mg/ml sirup (10 mg/5 ml)	Albuterol	1mg/ml	S02AC01	Navngruppe C	10 mg	Handl.

Vareliste - Enhets legemidler - Detaljer

Generelle innstillinger | Enhets spesielle innstillinger | CDM innstillinger | Synonym legemiddel | Kombinasjonslegemiddel

Generell informasjon

Generell navn	Morfine	Produkt	Orimorfin Helsehus AS	Styrke	10 mg
Handelsnavn	Morfine 10 mg/ml (10 mg/5 ml)	ATC kode	N02BA01	Volum	1 ml
Legemiddel nr	071386	Registernummer	071386	Tattelt volum	1 ml
Legemiddel nr 2	071313554481	Registernummer	071313554481	Utsattelt volum	1 ml
Legemiddel nr 3		Registernummer		Utsattelt volum	1 ml
Generell systemgruppe	001902	Generell systemgruppe	001902	Utsattelt volum	1 ml

Generelle innstillinger | Legemiddel | Merknader fra produsenten

Enhets spesielle innstillinger- marker etikettskriver grønn – oppdater legemiddel.

Vareliste - Enhets legemidler - Detaljer

Generelle innstillinger | Enhets spesielle innstillinger | CDM innstillinger | Synonym legemiddel | Kombinasjonslegemiddel

Enhets spesielle innstillinger

171174 Morfin Abucor inj, oppl 10 mg/ml (10x1 ml) Generell navn: Morfine ATC kode: N02BA01

Etikettskriver: ☒ (Markert grønn)

Oppdater legemiddel:

Vitnekonfigurasjon

Gruppe for legemidler uten ordinasjon | Begrensete kabinet


Se hva andre kabinetter har på lager

Her er det flere muligheter

Hvis man bruker nurseconnect:


Velg pasient, deretter ta ut.

Velg legemiddel, når du skal velge hvor mange du vil ha kommer det en oversikt over hvilke andre kabinetter som har dette på lager samt mengde

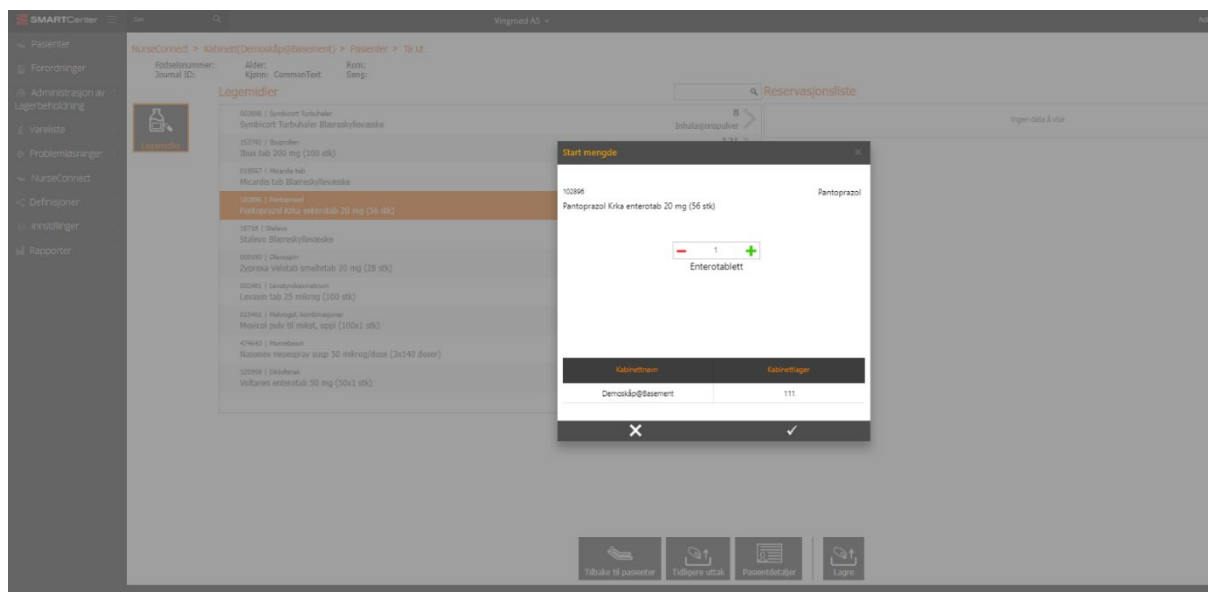

Rapporter

Lagerrapporter og rapporten Sammenendragsrapport for enhetens legemidler

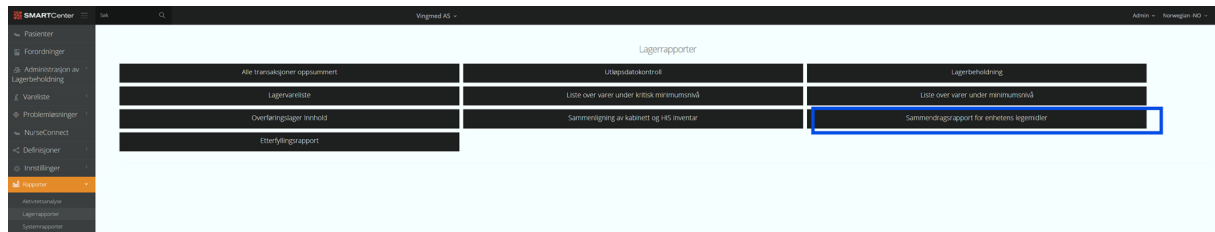

Vis parameter og vis rapport

[Sammendragsrapport for enhetens legemidler - Vis Parameter](#)

Område: Vingmed AS

Legemiddel:

Generisk navn:

Valgt generisknavn:

Valgt legemiddel:

Her kan man søke på legemiddelnavn

Rapporter > Lagerrapporter > Sammenendragsrapport for enhetens legemidler

Vis parameter Innstillinger for målen: Vennligst

Valgte parameter

- Områder Vingmed AS

Legemiddelnavn	Varenr	Generisk navn	Kabinett/Varehus	Fakti... men...	Enhet	Antall ubrukte dager	Totalt antall	Plaks	Min
Symbicort Turbuhaler Blæreskyllevæske	002886	Symbicort Turbuhaler	Demoskåp@Basement	8	Inhalasjo...	58	8	100	10
Celebra kaps 200 mg (10 stk)	001194	Celekolalb	Demoskåp@Basement	18	Kapsel, hard	78	18	10	0
Ibux tab 200 mg (100 stk)	153742	Ibuprofen	Demoskåp@Basement	121	Tablett	32	121	100	20
Micardis tab Blæreskyllevæske	018567	Micardis tab	Demoskåp@Basement	10	Tablett	58	10	100	10
Pantoprazol Krka enterotab 20 mg (56 stk)	102896	Pantoprazol	Demoskåp@Basement	111	Enterota...	33	111	100	20
Stalevo Blæreskyllevæske	15718	Stalevo	Demoskåp@Basement	9	mg	58	9	20	6
Zyprexa Velotab smeltetab 20 mg (28 stk)	000193	Olanzapin	Demoskåp@Basement	81	Smelteta...	86	81	100	20
Levaxin tab 25 mikrog (100 stk)	002481	Levotyrosinnatrium	Demoskåp@Basement	100	Tablett	33	100	100	20
Movicol pulv til mikat, oppl (100x1 stk)	015461	Makrogol, kombinasjoner	Demoskåp@Basement	1	Pulver til mikstus, oppløsning	138	1	100	20
Nasonex nesep spray susp 50 mikrog/dose (2x140 doser)	474643	Mometason	Demoskåp@Basement	3	Nesep spray, suspensjon	127	3	3	1
Voltaren enterotab 50 mg		...	...	...	...	...	...	...	...

Page 1 of 1 (30 items) [1]

Under **aktivitetsrapporter** finner dere:

Alle hendelser på kabinettet, månedlig forbruk og returer

SMARTCenter

Ses

OL

Vingred Enhet

Admin

Nors

Pasienter

Forordninger

Administrasjon av Lagerbeholdning

Vareliste

Problemløsninger

NurseConnect

Definisjoner

Innstillinger

Pasienter

Aktivitetsanalyse

Lagersoppmer

Systemrapporter

Aktivitetsanalyse

20 minst brukte varer	20 mest brukte varer	Aktivitetsanalyse
Alle hendelser på kabinettet	Svar på kliniske datameldinger	Oppsummeringsliste for avvik
Lagerskjudd	Månedlig forbruk	Ikke bevegelige varer
Rapport om utstrekkelig mengde på bestilte legemidler	Bestilte legemidler er ikke pålyst	Bestilte legemidler er ikke tatt ut
Forordninger	Liste over legemidler uten ordinasjon	Næddministrasjon
Pasientfaktura kontroll detaljer	Rapport om retur- og avfallsaktiviteter	Returskuffaktiviteter
Advarsler ved uttak	Midlertidig Pasientaktivitet Konsolidert	Brukdetaljer
Avfallskontroll	Pasientbestillingstatus	RX check

Kun filtrer på eget kabinett under parameter – samt tidsperioden dere er ute etter før vis rapport, resten filtrerer dere i rapporten.

Finne mengde som er tatt ut

Månedlig forbruk forteller hvor mye som er tatt ut pr legemiddel pr måned

[illegible]

Eller alle hendelser på kabinettet: Da søker dere på vare og filtrerer på ta ut

Dere må selv regne sammen antallet pr varenummer

SMARTCenter

Virgined Enhver -

Admin - Norwegian NO -

Pasienter

Førordninger

Administrasjon av Lagerbeholdning

Vareliste

Problemløsninger

NurseConnect

Definisjoner

Innstillinger

Rapporter

Rapporter > Aktivitetsanalyse > Alle hendelser på kabineett

Velg parameter:

Startet On: 11.2024 14:29

Sluttet On: 12.2024 14:29

Innstillinger for måler: Vennligst velg en rapportmal:

Designert

Vis rapport

Term...	Termak...	Vare...	Varenom...	Kabineett	Adressen	Beskriv...	Besk...	Trakk...	Trakk...	Farm...	Fakt...	Fakt...	Past...	Jord...	Pren...	Besk...	Osc...	Målest...	Lag...	AJC...	Ren...	Fert...	Pos...
Elev																							
20.11.2024	10:29:08	513232	Oxydatione Abbosin inj/ml opp 1 mg/ml (10:00-10)	Virgined DMDA	2 Singledingsdraver B12-A17	ch	Cecilia	Ta ut	1	1	1	0	Anamnel Patient	74289	99990102	01:00		Lagend.	MDIADG	Reseptur-			
15.11.2024	13:01:17	513232	Oxydatione Abbosin inj/ml opp 1 mg/ml (10:00-10)	Virgined DMDA	2 Singledingsdraver A12-A74	ch	Cecilia	Ta ut	1	1	1	0	Swar Hylde	6040004	1623976	01:00		Lagend.	MDIADG	Reseptur-			
15.11.2024	11:47:10	513232	Oxydatione Abbosin inj/ml opp 1 mg/ml (10:00-10)	Virgined DMDA	2 Singledingsdraver G11-A74	ch	Cecilia	Ta ut	1	1	1	0	Anamnel Patient	74289	99990102	01:00		Lagend.	MDIADG	Reseptur-			
15.11.2024	10:05:52	513232	Oxydatione Abbosin inj/ml opp 1 mg/ml (10:00-10)	Virgined DMDA	2 Singledingsdraver C12-A74	ch	Cecilia	Ta ut	1	1	1	0	Anamnel Carus Patient	74289	99990102	01:00		Lagend.	MDIADG	Reseptur-			
15.11.2024	10:44:18	513232	Oxydatione Abbosin inj/ml opp 1 mg/ml (10:00-10)	Virgined DMDA	2 Singledingsdraver B12-A74	ch	Cecilia	Ta ut	1	1	1	0	Anamnel Carus Patient	74289	99990102	01:00		Lagend.	MDIADG	Reseptur-			
15.11.2024	09:20:16	513232	Oxydatione Abbosin inj/ml opp 1 mg/ml (10:00-10)	Virgined DMDA	2 Singledingsdraver B12-A74	ch	Cecilia	Ta ut	1	1	1	0	Anamnel Patient	74289	99990102	01:00		Lagend.	MDIADG	Reseptur-			
14.11.2024	15:08:37	513232	Oxydatione Abbosin inj/ml opp 1 mg/ml (10:00-10)	Virgined DMDA	2 Singledingsdraver A12-A74	ch	Cecilia	Ta ut	1	1	1	0	Anamnel Carus Patient	74289	99990102	01:00		Lagend.	MDIADG	Reseptur-			
14.11.2024	15:19:28	513232	Oxydatione Abbosin inj/ml opp 1 mg/ml (10:00-10)	Virgined DMDA	2 Singledingsdraver A11-A74	ch	Cecilia	Ta ut	1	1	1	0	Anamnel Patient	74289	99990102	01:00		Lagend.	MDIADG	Reseptur-			
14.11.2024	14:15:19	513232	Oxydatione Abbosin inj/ml opp 1 mg/ml (10:00-10)	Virgined DMDA	2 Singledingsdraver B12-A74	ch	Cecilia	Ta ut	1	1	1	0	Swar Hylde	6040004	1623976	01:00		Lagend.	MDIADG	Reseptur-			

Page 1 of 1 (21 Items) [1] [2]

Page size: 100

Last ned rapport

Finne mengde som er påfylt

alle hendelser på kabinettet: Da søker dere på vare og filtrerer på laste og påfylling

Dere må selv regne sammen antallet pr varenummer

SMARTCenter

Pasienter

Forordninger

Administration af
Lægebeholdning

Vareliste

Problemløsninger

NurseConnect

Defensører

Indstillinger

Rapporter

Virgine Enhet -

Rapporter > Aktivitetsanalyse > Alle hendelser på kabinettet

Vil du se alle data?

Valgte parametre

Startet 15.11.2024 14:29

Sluttet 01.12.2024 14:29

Indstillinger for makro

Værstillet vej ind rapporten

Indsigel

Vis rapport

Træk...	Træk...	Vare	Varenavn	Kabinett	Adresse	Braker	Brak...	Træk...	Træk...	Param...	Fakt...	Fakt...	Param...	Ind...	Param...	Brak...	Drone...	Vilket...	Lage...	ATC	Ress...	Param...	Vis
			eny																				
22.11.2024	13:06:47	9132	Oxydrono Albedo injekt. opl. 1 mg/ml (10x50 ml)	Virgine DENSA	4 DouklineMatrisdraver CDS 1"	Admin	Admin	Læge	4	0	0	4							Legemid...	A	KasseStp...		
22.11.2024	13:29:19	513323	Oxydrono Albedo injekt. opl. 1 mg/ml (10x50 ml)	Virgine DENSA	2 SingleSlidingDraver K12-1"	Admin	Admin	Påfylding	2	0	0	2							Legemid...	NG24A05	KasseStp...		
22.11.2024	13:29:05	513323	Oxydrono Albedo injekt. opl. 1 mg/ml (10x50 ml)	Virgine DENSA	2 SingleSlidingDraver H11-1"	Admin	Admin	Påfylding	2	0	0	2							Legemid...	NG24A05	KasseStp...		
22.11.2024	13:29:53	513323	Oxydrono Albedo injekt. opl. 1 mg/ml (10x50 ml)	Virgine DENSA	2 SingleSlidingDraver L11-1"	Admin	Admin	Påfylding	2	0	0	2							Legemid...	NG24A05	KasseStp...		
22.11.2024	13:29:41	513323	Oxydrono Albedo injekt. opl. 1 mg/ml (10x50 ml)	Virgine DENSA	2 SingleSlidingDraver K12-1"	Admin	Admin	Påfylding	2	0	0	2							Legemid...	NG24A05	KasseStp...		
22.11.2024	13:29:30	513323	Oxydrono Albedo injekt. opl. 1 mg/ml (10x50 ml)	Virgine DENSA	2 SingleSlidingDraver H11-1"	Admin	Admin	Påfylding	2	0	0	2							Legemid...	NG24A05	KasseStp...		
22.11.2024	13:29:16	513323	Oxydrono Albedo injekt. opl. 1 mg/ml (10x50 ml)	Virgine DENSA	2 SingleSlidingDraver E11-1"	Admin	Admin	Påfylding	2	0	0	2							Legemid...	NG24A05	KasseStp...		
22.11.2024	13:29:03	513323	Oxydrono Albedo injekt. opl. 1 mg/ml (10x50 ml)	Virgine DENSA	2 SingleSlidingDraver G11-1"	Admin	Admin	Påfylding	1	0	0	1							Legemid...	NG24A05	KasseStp...		
22.11.2024	13:28:47	513323	Oxydrono Albedo injekt. opl. 1 mg/ml (10x50 ml)	Virgine DENSA	2 SingleSlidingDraver C12-1"	Admin	Admin	Påfylding	1	0	0	1							Legemid...	NG24A05	KasseStp...		
22.11.2024	13:28:35	513323	Oxydrono Albedo injekt. opl. 1 mg/ml (10x50 ml)	Virgine DENSA	2 SingleSlidingDraver B11-1"	Admin	Admin	Påfylding	2	0	0	2							Legemid...	NG24A05	KasseStp...		
22.11.2024	13:28:24	513323	Oxydrono Albedo injekt. opl. 1 mg/ml (10x50 ml)	Virgine DENSA	2 SingleSlidingDraver A12-1"	Admin	Admin	Påfylding	1	0	0	1							Legemid...	NG24A05	KasseStp...		

Page 1 of 1 (20 Rows)

1 | 11

Page size: 100

Mengde utgått på dato

Alle hendelser på kabinettet- filtrer på utløpt / tømt / utgått på dato

[illegible]

Rapporten utløpsdatokontroll forteller hva som ligger i kabinettet, men som er gått ut på dato

SMARTCenter - Rapport - Utløpsdatokontroll

Valgt parameter: Dager til utløpsdato 30, Områder Vingmed Enhet

Dager til utløpsdato 30


Kabinett/varehus	Adresse	Vare ID	Varenavn	ATC gruppe	Vare...	Vare...	Publ...	Totalt på...	Pluko	Stok	Utlø...	Spørsmål...	Dager for...	Ress...	Vare...	Løst...	Var...
Vingmed ENHET	4 Double SMARTMedin Drøner B2-15	000593	Dumexa Valitab smeltetab 20 mg (28 stk)	N05HA03	Legemid...	3000033...	64	64	100	20	30.10.2024						
Vingmed ENHET	Kjøleskap Remte Stock A2	SW1	Smertebehandling 1 Drogaprometkale oppløsning	A	Legemid...		1	1	1	0	30.11.2024						

Page 1 of 1 (2 items) [1] Page size: 100 Last ned rapport

Administrasjon av lagerbeholdning

Her kan dere endre maks og min, delmengde og standard / ikke standard lager

Velg lagerbeholdning

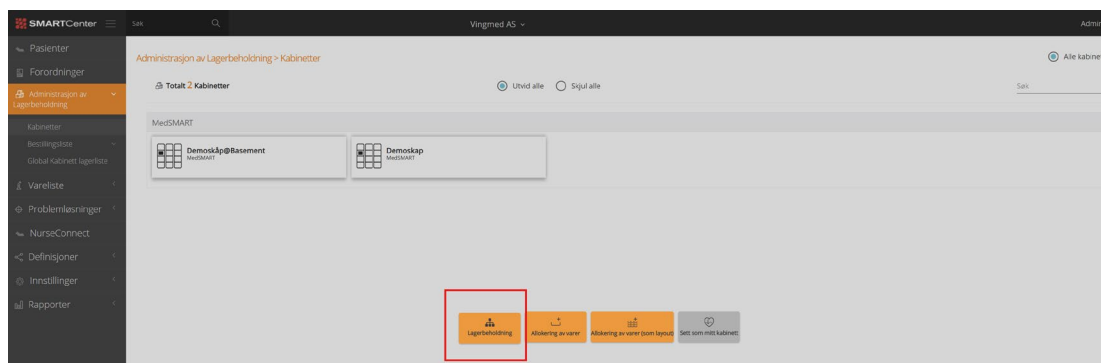

Her er oversikten over alle varene som er på aktuelt kabinett. Trykk på pil til venstre for varen, deretter tannhjul for å redigere lomme

SMARTCenter - Administrasjon av Lagerbeholdning - Varestyring


Vare

Alle varer Hay Risiko Hay pris LØT sporring Sporring av serienummer

Alle lommer Standardlager Brøk Gjenbruk Levering Pasientens egne legemidler Sporring av utløpsdato

Vare ID	Vare	Lager Antall	Kontroll ant	Min	Maksimum	Fornt Maks	Utløpsdato	Antall dager
472759	Amoxi 500 mg (100 (80) (Tablet))	20	1	20	100	200	28.02.2027	43
320031	Atrovent inh væske, oppløst (Inhalasjonsvæske til nebulisator, oppløsning)	20	0	10	60	70	30.12.2027	38
1 Med Oost	DOB-1 5"	20	0	10	60	70	30.12.2027	35
539772	Fentanyl retseptarm depotplaster 12 mikrogramme (5 stk) (Depotplaster)	2	1	1	3	3	27.05.2026	38
171174	Movion Alcur inj, oppløst 10 mg/ml (100 ml)	6	1	1	6	6	30.06.2026	38
015461	Movicol pulv til mikst, oppløst (100x1 vdg) (Pulver til mikst, oppløst)	20	1	30	100	150	31.12.2026	38

Page 1 of 2 (14 items) [1] Page size: 10

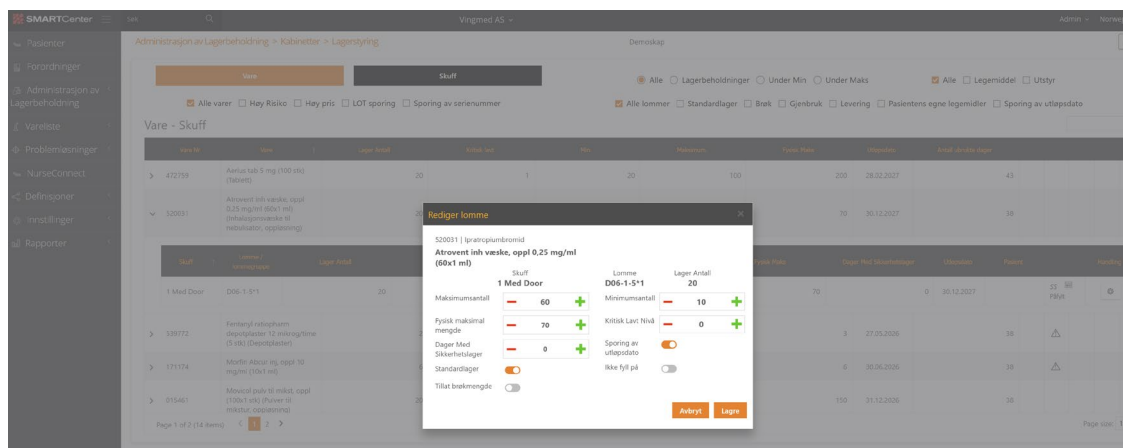


Endre maks og min på legemidler fylt på som endoser med unik modus

Når dere fyller på som endoser er maks og min nivået automatisk 1 pr lomme.

Man kan ikke endre maks nivået da det er det totale antall lommer dere har definert som endoser for aktuelt legemiddel.

Gå i administrasjon av lagerbeholdning, kabinetter og lagerstyring.

Velg legemiddel og velg en av lokasjonene, rediger lomme

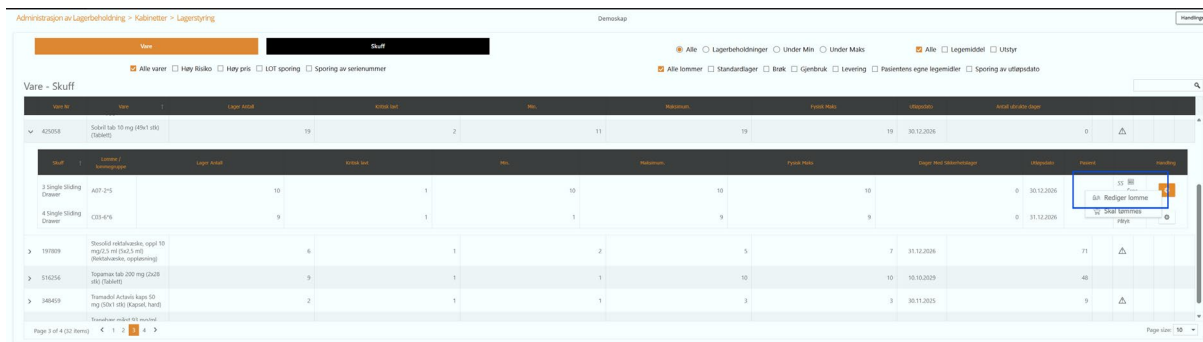

Sett inn ønsket total minimums mengde for legemiddelet, husk at den regner inn de som står som 1 i andre lokasjoner.

I oversikten nå vil maks nivå være totalt antall plasser dere har forhånds definert, og minimum er når det vil gå til bestilling.

Vare - Skuff

Vare nr	Vare	Lager Antall	Kritisk Lavt Nivå	Min	Max	Minimums	Maximums	Sporing av utløpsdato	Ikke fyll på	Lager Antall	Kritisk Lavt Nivå	Min	Max	Minimums	Maximums	Sporing av utløpsdato	Ikke fyll på
425058	Sobril tab 10 mg (49x1 stk) (Sobril)	10	1	10	10	10	10	0	0	10	1	10	10	10	10	0	0
425059	Sobril tab 10 mg (49x1 stk) (Sobril)	10	1	10	10	10	10	0	0	10	1	10	10	10	10	0	0

Avvikshåndtering

Avvik opprettes automatisk for alle preparater når den ansatte endrer lagerbeholdning.

Avvik på c og f preparater løses automatisk, mens a og b preparater må løses av dere.

Innhold:

1. Eksempler på når det lages avvik
2. Avvikshåndtering
 - 2.1 via Smartcenter
 - 2.2 direkte på legemiddelkabinettet

1. Eksempler på når det lages avvik:

- A) **Ved påfylling:** det tas en telling **før** påfylling. Hvis antallet som de finner ikke stemmer med hva skapet sier, endres beholdningen til mer (+) eller mindre (-)

Hvis man fyller på via lagertelling istedenfor individuell etterfylling

- B) **Ved uttak av a og b preparater:** den ansatte må ved uttak av **endoser** enten oppdatere eller sette lommen som hvit hvis den er tom og deretter oppdatere. Hvis den blir satt som tom blir det avvik på -1.

Tell endoser

432994 - Oksykodon - Oxycodone Hameln inj/inf, oppl 10 mg/ml (10x1 ml)

6 - Double Sliding Drawer - K01-1*1

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	A01			A04			A07	A08	A09	A10		
B							B07	B08	B09			
C							C07	C08	C09			
D	D01	D02			D05	D06				D10		D12
E	E01											
F	F01					F06						
G	G01	G02	G03	G04								
H	H01	H02										
I	I01									I10	I11	I12
J	J01	J02	J03	J04	J05					J10	J11	J12
K	K01	K02	K03		K05	K06				K10	K11	K12
L	L01	L02			L05					L10	L11	L12
M	M01	M02				M05	M06	M07	M08		M11	M12
N	N01	N02	N03	N04	N05	N06	N07				N11	N12

Tom lomme
Påfylte lomme

Oppdater

- C) **Ved uttak fra forpakning** blir den ansatte bedt om å bekrefte antall den finner **FØR** uttaket, her står det ett tall og hvis dette er riktig trykker de ja, hvis mengden ikke stemmer trykker de nei

Funnet mengde

Ekstern lagerbeholdning

034616 Klometazol

Heminevrin mikst oppl 50 mg/ml (300 ml)

Komponent: 1 Dose - Remote Stock Lomme: A2


Funnet mengde

Er lagermengden riktig?

281 Mikstur, op

Ja Nei

Ved å trykke nei må de skrive inn det antallet de da finner

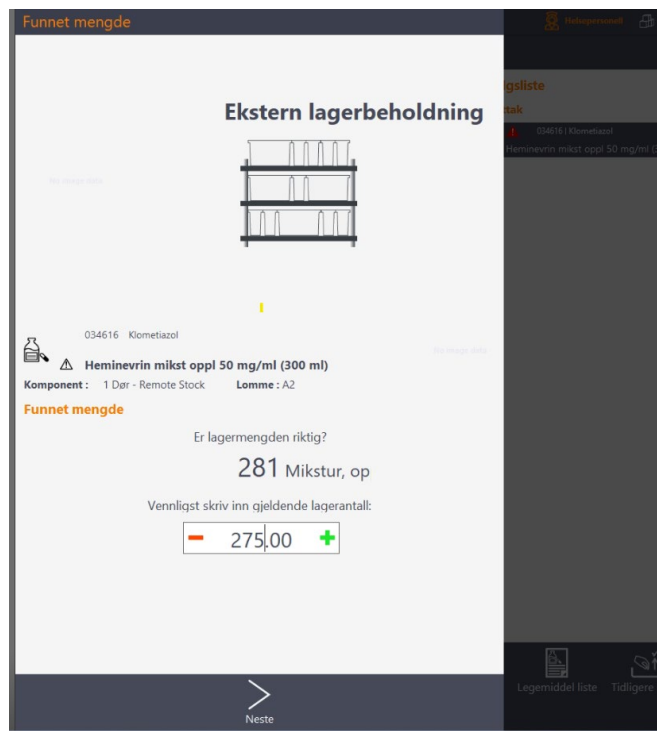

og deretter neste før de får tatt uttaket.

Vanlige avvik Endoser

Hvordan forstå avvikene i rapportene:

F.eks. ved minus i regnskapet og det står telling på transaksjonstype. Her bør ansatt ha blitt guidet til ny skuff = uttak på samme preparat på ny skuff umiddelbart etterpå (= skuff VAR faktisk tom). Hvordan løse avviket: se på tidligere bevegelser i samme skuff som var tom.

Hvis ansatt **ikke** har blitt guidet til ny skuff; sorter alle hendelser på ansatt. Sjekk om vedkommende har denne transaksjonstypen ofte; kan være brukerfeil, ansatt leser ikke på skjermen. Forklaring: Endoseskuff åpnes og får tilgang til legemiddelet, og

- b) glemmer å trykke «oppdater» og i stedet lukker skuff → neste mann kommer til tom skuff
- b) tror man skal trykke orange skuff for å bekrefte at det er denne skuff som åpnes → man registrerer feilaktig skuffen som tom

2.0 Avvikshåndtering

Avvik kan kommenteres og løses enten via smartcenter eller direkte på legemiddelkabinettet.

Kommentarer som legges inn direkte på kabinettet blir ikke synlig i smartcenter før avviket er løst og da finner man det i rapporten oppsummering av avvik.

For å se kommentarer opprettet på kabinettet må man gå på kabinettet.

2.1 Avvikshåndtering via Smartcenter

1. Logg inn på smartcenter
2. Velg uløste avvik på første side- da kommer følgende bildet opp
3. sorter på kabinettet for din avdeling og tidsperioden du vil håndtere.

SMARTCenter

Pasienter

Forordninger

Administrasjon av Lagerbeholdning

Vareliste

Pasienter

Temperaturproblemer

Advarsel om doser

NurseConnect

Definisjoner

Innstillinger

Rapporter

Vingmed Enhet

Admin - Norge

Avvik

Avvik

Ikke godkjent Godkjent Alle

Vingmed DE/MSA

Startdato: 01.11.2024

Sluttdato: 04.12.2024

Avvik

Status	Kabinett	Transaksjonstid	Venn	Medisin	Reseptgruppe	Transaksjonsid	Bruker-ID	Funnet av	Tidligere bruk	Adresse	Antall avvik	Forventet start	Antall funnet	Avvik	Handling	Bruk av for godkjent avvik	Lesingsdato	Handlinger
ULØST	Vingmed DE/MSA	29-11-2024 12:25	080314	Fentanyl Sandoz depotplaster 12 mikrogramme (5x1 100)	Reseptgruppe A	TELE	Admin	Admin	Cecile	M09-212	-2	4	2					Handlinger
ULØST	Vingmed DE/MSA	21-11-2024 11:07	350958	Morfine NAF inj. oppl 1 mg/ml (10x1 ml)	Reseptgruppe A	TELE	Admin	Admin	Cecile	H09-215	2	0	2					Handlinger
ULØST	Vingmed DE/MSA	14-11-2024 14:16	513323	Oxycodone Abobika inj/inf oppl 1 mg/ml (10x10 ml)	Reseptgruppe A	TELE	cb	Cecile	Cecile	A11-214	2	11	13					Handlinger
ULØST	Vingmed DE/MSA	11-11-2024 19:17	513323	Oxycodone Abobika inj/inf oppl 1 mg/ml (10x10 ml)	Reseptgruppe A	TELE	cb	Cecile	Cecile	A11-214	10	8	18					Handlinger
ULØST	Vingmed DE/MSA	11-11-2024 09:45	009587	Oxylorm mikst oppl 1 mg/ml (250 ml)	Reseptgruppe A	TELE	cb	Cecile	Admin	H01-414	-0,5	247,5	247					Handlinger

Page 1 of 1 (5 items)

Page size: 10

Forklaring:

- Transaksjonstid er når man oppdager avviket
- Bruker id og funnet av = den ansatte som finner avviket.
- Tidligere bruker = den ansatte som var i lommen før avviket oppdages
- Antall avvik = mengde som er ulikt forventet start antall og antall funnet
- Forventet start antall = hva skapet mener ligger i den aktuelle lommen
- Antall funnet = det den ansatte sier den finner

4. velg handlinger for å godkjenne avviket og for å legge inn kommentar

SMARTCenter

Sais

Q

Pasienter

Forordninger

Administrasjon av Lagerbeholdning

Vareliste

Problemløsninger

Avvik

Temperaturproblemer

Advarsler om dosed

NurseConnect

Definisjoner

Instillinger

Rapporter

Vingmed Enhet

Avviksløsninger

Tilfølt 5 Avvik

KabinettVingmed DE/MSA

Standard-id01.11.2024

Sjuktid-id04.12.2024

Søk

Status	Kabinett	Transaksjons ID	Venn	Venn	Reseptgruppe	Transaksjons ID	Bruker-ID	Funnet av	Tidligere bruk	Adresse	Antall avvik	Forventet start	Antall funnet	Årsk	Forlänging	Bruker som har gitt inn avvik	Løsningsstatus	Handlinger
ULØST	Vingmed DE/MSA	29-11-2024 12:25	080314	Fentanyl Sandoz depotplaster 12 mikrogramme (5x1 100)	Reseptgruppe A	TELE	Admin	Admin	Cecile	M09-212	-2	4	2					Handlinger ✓ Godkjenn ⌵ Spill av ⌵ Transaksjon
ULØST	Vingmed DE/MSA	21-11-2024 11:07	350958	Morfine NAF inj. oppl 1 mg/ml (10x1 ml)	Reseptgruppe A	TELE	Admin	Admin	Cecile	H09-215	2	0	2					Handlinger
ULØST	Vingmed DE/MSA	14-11-2024 14:16	513323	Oxycodone Abobika inj/inf oppl 1 mg/ml (10x10 ml)	Reseptgruppe A	TELE	cb	Cecile	Cecile	A11-214	2	11	13					Handlinger
ULØST	Vingmed DE/MSA	11-11-2024 19:17	513323	Oxycodone Abobika inj/inf oppl 1 mg/ml (10x10 ml)	Reseptgruppe A	TELE	cb	Cecile	Cecile	A11-214	10	8	18					Handlinger
ULØST	Vingmed DE/MSA	11-11-2024 09:45	009587	Oxylorm mikst oppl 1 mg/ml (250 ml)	Reseptgruppe A	TELE	cb	Cecile	Admin	H01-414	-0,5	247,5	247					Handlinger

Page 1 of 1 (5 items)

<


1

>

Page 2 of 2

Alle tre finnes under aktivitetsrapporter

Husk å sortere kun på ditt eget kabinett og tidsperioden du er ute etter

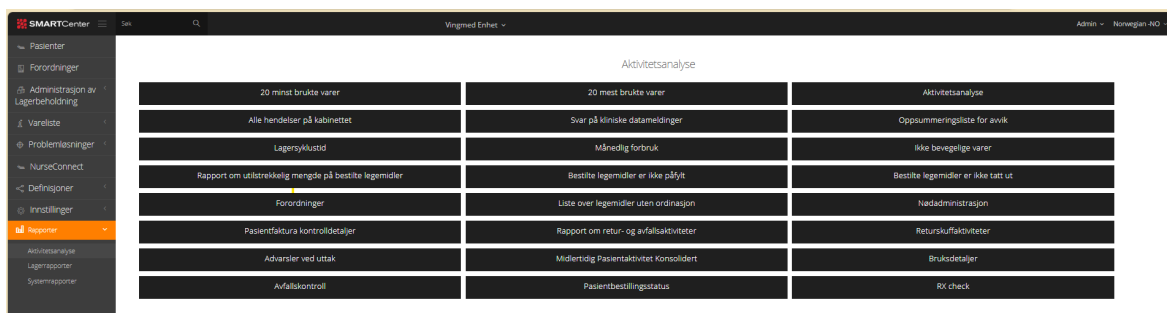

I denne rapporten finner dere informasjon om når avviket er oppdaget, om det er telling før uttak, telling ved påfylling eller telling av lager,

[illegible]

Her finner dere også igjen løste avvik med kommentarer.

2. Alle hendelser på kabinettet

Husk å sortere kun på ditt eget kabinett og tidsperioden du er ute etter
Du sorterer på legemiddel inne i rapporten

SMARTcenter | Virgined Enhver - **SMARTcenter**

Rapporter > Aktivitetsanalyse > Alle hændelser på kabinettet

Vil parametrene? Indstillinger for mailer: Vælgstillet vejen en rapportat:

Følgte parametre
 • Starttid 11.11.2024 11:29
 • Områder Virgined Enhver
 • Sluttid 04.12.2024 11:29
 • Kabinetter Virgined DEMA4

Tidspunkt	Træk...	Type ID	Varenavn	Kabinett	Adresse	Besker ID	Bruk...	Trans...	Trans...	Pas... start...	Publ... antet	Publ... slut...	Pas... efter...	Ecol...	Prem... post... ID	Bedst...	Oms...	Vibeats navn	Lign...	ATC gruppe	Rank...	Fors...	Page size
28.11.2024	12:28:26	080314	Fentanyl Sandoz depotinjection 12 mikrogramme (30x 0,5)	Virgined DEMA4	2 SingleGældSingerDrainer HIG-272	Admin	Admin	To uet	1	2	2		Annual Caries Patient	74289	99990101		01:00		Legemid...	H02AB03	Remotist...	A	☐
29.11.2024	12:25:25	080314	Fentanyl Sandoz depotinjection 12 mikrogramme (30x 0,5)	Virgined DEMA4	2 SingleGældSingerDrainer HIG-272	Admin	Admin	Balveft antet	0	4	2	2							Legemid...	H02AB03	Remotist...	A	☐
21.11.2024	11:10:23	080314	Fentanyl Sandoz depotinjection 12 mikrogramme (30x 0,5)	Virgined DEMA4	2 SingleGældSingerDrainer HIG-272	Admin	Admin	Balveft antet	0	4	4	4							Legemid...	H02AB03	Remotist...	A	☐
21.11.2024	11:10:23	080314	Fentanyl Sandoz depotinjection 12 mikrogramme (30x 0,5)	Virgined DEMA4	2 SingleGældSingerDrainer HIG-272	Admin	Admin	Anbyrt	0	4	4	4		Annual Caries Patient	74289	99990101		01:00	Legemid...	H02AB03	Remotist...	A	☐
18.11.2024	11:55:12	080314	Fentanyl Sandoz depotinjection 12 mikrogramme (30x 0,5)	Virgined DEMA4	2 SingleGældSingerDrainer HIG-272	cb	Cacile	Slyfning	3	1	1	4							Legemid...	H02AB03	Remotist...	A	☐
15.11.2024	11:55:08	080314	Fentanyl Sandoz depotinjection 12 mikrogramme (30x 0,5)	Virgined DEMA4	2 SingleGældSingerDrainer HIG-272	cb	Cacile	Telt for slyfning	0	1	1	1							Legemid...	H02AB03	Remotist...	A	☐
11.11.2024	10:36:38	080314	Fentanyl Sandoz depotinjection 12 mikrogramme (30x 0,5)	Virgined DEMA4	2 SingleGældSingerDrainer HIG-272	cb	Cacile	Balveft antet	0	1	1	1							Legemid...	H02AB03	Remotist...	A	☐
11.11.2024	10:36:38	080314	Fentanyl Sandoz depotinjection 12 mikrogramme (30x 0,5)	Virgined DEMA4	2 SingleGældSingerDrainer HIG-272	cb	Cacile	Anbyrt	0	1	1	1		Annual Caries Patient	74289	99990101		01:00	Legemid...	H02AB03	Remotist...	A	☐
14.11.2024	09:25:52	080314	Fentanyl Sandoz depotinjection 12 mikrogramme (30x 0,5)	Virgined DEMA4	2 SingleGældSingerDrainer HIG-272	cb	Cacile	To uet	1	2	2	2		Annual Caries Patient	74289	99990101		01:00	Legemid...	H02AB03	Remotist...	A	☐
14.11.2024	13:36:57	080314	Fentanyl Sandoz depotinjection 12 mikrogramme (30x 0,5)	Virgined DEMA4	2 SingleGældSingerDrainer HIG-272	cb	Cacile	Balveft antet	0	2	2	2							Legemid...	H02AB03	Remotist...	A	☐

Page 1 of 1 (19 Items) [1] Last ned rapport

Forklaring på transaksjonstyper

- Ta ut= registrert uttak av legemiddel
- Bekreft antall = dette gjøres FØR uttak av a og b preparater
- Laste / påfylling = påfylling av legemidler fra apotek
- Telling = hvis man setter en endose som tom og trykker oppdater. Eller ved lagertelling
- Avbryt = uttaket er avbrutt – lomme har vært åpen og den ansatte kan ha tatt ut legemiddelet, men dette er ikke registrert som ett uttak.
- Utløpt= legemiddelet er tømt siden det har gått ut på dato

3, Retur og avfalls aktiviteter

- Hvis det er avvik ved tømning av returskuff, finner du informasjon om hva som er meldt som retur og av hvem i denne rapporten.


Husk å sortere kun på ditt eget kabinett og tidsperioden du er ute etter

Du sorterer på legemiddel inne i rapporten

[illegible]

2.2 Avvikshåndtering direkte på legemiddelkabinettet

1. Gå på lagerbeholdning-
2. velg deretter avvik

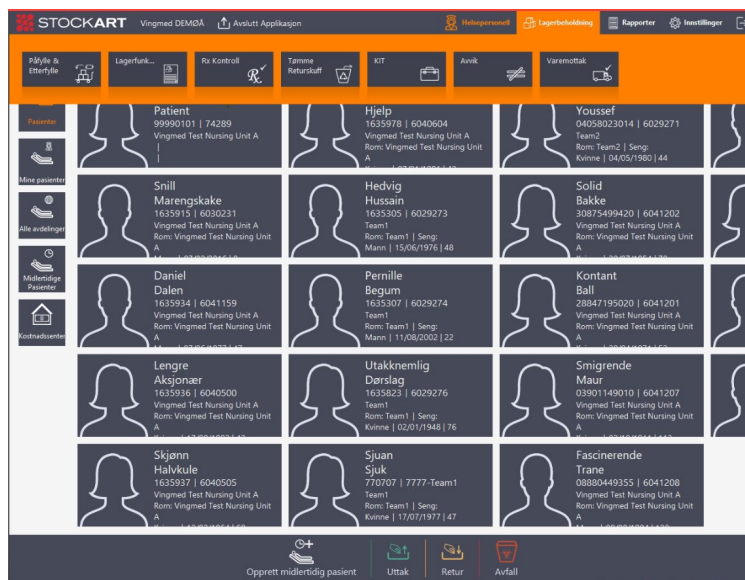

3. Velg avviket du vil kommentere på eller løse, trykk deretter

Legg til notat for å skrive kommentar

Notater= hvis det er skrevet kommentar fra før

STOCKART

Vingmed DEMOÅ

Avslutt Applikasjon

Helsjerpensett

Lagerbeholdning

Rapporter

Instillinger

...

Avviksliste

034616 - Karmezolam	26/11/2024 12:54:4	Tidligere bruker Cecile	Funnert av Admin	1 Bar Remote Stock A2	Forventet 299,00	Funnert 295,00	Forskjeller -4,25
Heminevrim mikst oppl 50 mg/ml (300 ml)					Mikstur	Mikstur	
080314 - Fentanyl	26/11/2024 12:25:25	Tidligere bruker Cecile	Funnert av Admin	2 Single Sliding Drawer/venstet M09-2*2	4	Funnert 2	Forskjeller -2
Fentanyl Sandoz depotplaster 12 mikrog/time (5x1 stk)					Depotplaster	Depotplaster	
350938 - Morfin	21/11/2024 11:07:41	Tidligere bruker Cecile	Funnert av Admin	2 Single Sliding Drawer/venstet H09-2*5	0	Funnert 2	Forskjeller 2
Morfin NAF inj. oppl 1 mg/ml (10x1 ml)					Injeksjon...	Injeksjon...	
513323 - Oxykodon	14/11/2024 14:16:07	Tidligere bruker Cecile	Funnert av Cecile	2 Single Sliding Drawer/venstet A11-2*14	11	Funnert 13	Forskjeller 2
Oxycodone Abbovia inj/inf, oppl 1 mg/ml (10x10 ml)					Injeksjon...	Injeksjon...	
513323 - Oxykodon	11/11/2024 19:17:15	Tidligere bruker Cecile	Funnert av Cecile	2 Single Sliding Drawer/venstet A11-2*14	8	Funnert 18	Forskjeller 10
Oxycodone Abbovia inj/inf, oppl 1 mg/ml (10x10 ml)					Injeksjon...	Injeksjon...	
090587 - Oxykodon	11/11/2024 09:45:23	Tidligere bruker Admin	Funnert av Cecile	10 Double Sliding Drawer/venstet H01-4*4	247,5	Funnert 247	Forskjeller -0,5
OxyNorm mikst oppl 1 mg/ml (250 ml)					Mikstur	Mikstur	
462537 - Midazolam	29/10/2024 14:30:47	Tidligere bruker Admin	Funnert av Admin	2 Single Sliding Drawer/venstet D05-1*1	1	Funnert 0	Forskjeller -1
Midazolam Accord inj/inf, oppl 5 mg/ml (10x1 ml)					Injeksjon...	Injeksjon...	
513323 - Oxykodon	29/10/2024 13:21:47	Tidligere bruker Admin	Funnert av Admin	2 Single Sliding Drawer/venstet A11-2*14	26	Funnert 8	Forskjeller -18
Oxycodone Abbovia inj/inf, oppl 1 mg/ml (10x10 ml)					Injeksjon...	Injeksjon...	
462537 - Midazolam	29/10/2024 13:21:02	Tidligere bruker Admin	Funnert av Admin	2 Single Sliding Drawer/venstet A05-2*14	20	Funnert 22	Forskjeller 2
Midazolam Accord inj/inf, oppl 5 mg/ml (10x1 ml)					Injeksjon...	Injeksjon...	
513323 - Oxykodon	03/10/2024 15:06:29	Tidligere bruker Admin	Funnert av Admin	2 Single Sliding Drawer/venstet A11-2*14	28	Funnert 26	Forskjeller -2
Oxycodone Abbovia inj/inf, oppl 1 mg/ml (10x10 ml)					Injeksjon...	Injeksjon...	
171174 - Morfin	03/10/2024 12:17:46	Tidligere bruker Admin	Funnert av Admin	2 Single Sliding Drawer/venstet E03-1*1	1	Funnert 0	Forskjeller -1
Morfin Abcur inj. oppl 10 mg/ml (10x1 ml)					Injeksjon...	Injeksjon...	
462537 - Midazolam	01/10/2024 09:20:17	Tidligere bruker Admin	Funnert av Admin	2 Single Sliding Drawer/venstet A06-1*1	1	Funnert 0	Forskjeller -1
Midazolam Accord inj/inf, oppl 5 mg/ml (10x1 ml)					Injeksjon...	Injeksjon...	
171174 - Morfin	01/10/2024 09:16:38	Tidligere bruker Admin	Funnert av Admin	2 Single Sliding Drawer/venstet A01-2*14	26	Funnert 27	Forskjeller 1
Morfin Abcur inj. oppl 10 mg/ml (10x1 ml)					Injeksjon...	Injeksjon...	
513323 - Oxykodon	01/10/2024 09:04:02	Tidligere bruker Admin	Funnert av Admin	2 Single Sliding Drawer/venstet A01-2*14	26	Funnert 27	Forskjeller 1

Transaksjoner

Spill av

Laste

Legg til notat

Notater

4. Ved å velge legg til notat kommer følgende bilde opp:

Avviksliste									
40207 - Midastem	29/10/2024 13:21:02	Tilleggs brukar	Førret av	1 Single Sliding Drawer	20	22	2		
Midastem Accord inj/ml, oppl 5 mg/ml (10x1 ml)	Telle	Admin	Admin	A05-2*14	20	22	2		
11323 - Oxykodon	05/10/2024 15:06:29	Tilleggs brukar	Førret av	2 Single Sliding Drawer	28	26	-2		
Oxydodone Abbowa inj/ml, oppl 1 mg/ml (10x1 ml)	Telle	Admin	Admin	A11-2*14	28	26	-2		
17174 - Morfin	08/10/2024 12:17:48	Tilleggs brukar	Førret av	2 Single Sliding Drawer	1	0	-1		
Morfin Abcur inj, oppl 10 mg/ml (10x1 ml)	Telle - Utvik	Admin	Admin	E03-1*1	1	0	-1		
40207 - Midastem	01/10/2024 09:20:17	Tilleggs brukar	Førret av	1 Single Sliding Drawer	1	0	-1		
Midastem Accord inj/ml, oppl 5 mg/ml (10x1 ml)	Telle - Utvik	Admin	Admin	A06-1*1	1	0	-1		
17174 - Morfin		Tilleggs brukar	Førret av	2 Single Sliding Drawer	26	27	1		
Morfin Abcur inj, oppl 10 mg/ml (10x1 ml)		Admin	Admin	A01-2*14	26	27	1		
11323 - Oxykodon		Tilleggs brukar	Førret av	2 Single Sliding Drawer	7	4	-3		
Oxydodone Abbowa inj/ml, oppl 1 mg/ml (10x1 ml)		Admin	Admin	A11-1*7	7	4	-3		
17174 - Morfin		Tilleggs brukar	Førret av	2 Single Sliding Drawer	1	0	-1		
Morfin Abcur inj, oppl 10 mg/ml (10x1 ml)		Admin	Admin	B03-1*1	1	0	-1		
17174 - Morfin		Tilleggs brukar	Førret av	2 Single Sliding Drawer	1	0	-1		
Morfin Abcur inj, oppl 10 mg/ml (10x1 ml)		Admin	Admin	B01-1*1	1	0	-1		
17174 - Morfin		Tilleggs brukar	Førret av	2 Single Sliding Drawer	28	27	-1		
Morfin Abcur inj, oppl 10 mg/ml (10x1 ml)		Admin	Admin	A01-2*14	28	27	-1		
40207 - Midastem	27/10/2024 11:17:03	Tilleggs brukar	Førret av	2 Single Sliding Drawer	1	0	-1		
Midastem Accord inj/ml, oppl 5 mg/ml (10x1 ml)	Telle - Utvik	Admin	Admin	B05-1*1	1	0	-1		
40204 - Oxykodon	25/10/2024 08:25:48	Tilleggs brukar	Førret av	8 Double Sliding Drawer	1	0	-1		
Oxydodone Harneln inj/ml, oppl 10 mg/ml (10x1 ml)	Telle - Utvik	Admin	Admin	K01-1*1	1	0	-1		
40204 - Oxykodon	25/10/2024 08:25:08	Tilleggs brukar	Førret av	8 Double Sliding Drawer	1	0	-1		
Oxydodone Harneln inj/ml, oppl 10 mg/ml (10x1 ml)	Telle - Utvik	Admin	Admin	J10-1*1	1	0	-1		
40805 - OxyNorm kaps 10 mg (50x1 stk)	23/10/2024 13:39:42	Tilleggs brukar	Førret av	8 Double Sliding Drawer	101	20	-81		
	Telle	Admin	Admin	F06-4*5	101	20	-81		

5.Ved å velge løse – kommer følgende bilde opp

Avviksløsning

Ekstern lagerbeholdning



Se innlegg i notat

Se notat i bilde

Komponent : 1 Der - Remote Stock Lomme : A2

Transaksjons Dato: 29/11/2024 11:25:44 Transaksjonstype: Telle

Førventet	Førret	Forskjeller
299.25	295	-4.25

Årsak

Trykk & kommenter årsak

Notater

kommentert med at det er salt noe da flasken falt i gulvet

☒ Avbryt
 ☒ Lagre

☒ Helsepersonell
 ☒ Legemiddelbeholdning
 ☒ Rapportert
 ☒ Innvilgninger

1 Der - Remote Stock	Førret av	1 Der - Remote Stock	Førret av	299.25	295	-4.25
2 Single Sliding Drawer	Førret av	2 Single Sliding Drawer	Førret av	4	2	-2
2 Single Sliding Drawer	Førret av	2 Single Sliding Drawer	Førret av	0	2	2
2 Single Sliding Drawer	Førret av	2 Single Sliding Drawer	Førret av	11	13	2
2 Single Sliding Drawer	Førret av	2 Single Sliding Drawer	Førret av	8	18	10
10 Double Sliding Drawer	Førret av	10 Double Sliding Drawer	Førret av	247.5	247	-0.5
2 Single Sliding Drawer	Førret av	2 Single Sliding Drawer	Førret av	1	0	-1
2 Single Sliding Drawer	Førret av	2 Single Sliding Drawer	Førret av	26	8	-18
2 Single Sliding Drawer	Førret av	2 Single Sliding Drawer	Førret av	20	22	2
2 Single Sliding Drawer	Førret av	2 Single Sliding Drawer	Førret av	28	26	-2
2 Single Sliding Drawer	Førret av	2 Single Sliding Drawer	Førret av	1	0	-1
2 Single Sliding Drawer	Førret av	2 Single Sliding Drawer	Førret av	1	0	-1
2 Single Sliding Drawer	Førret av	2 Single Sliding Drawer	Førret av	26	27	1
2 Single Sliding Drawer	Førret av	2 Single Sliding Drawer	Førret av			


☒ Legg til notat
 ☒ Notat

Legg inn kommentar og velg grønn hake.

Avviket er nå løst, og informasjon finner du på smartcenter i aktivitetsrapporten som heter: Oppsummeringsliste for avvik


Delmengde

1. Vareliste
2. Enhetens legemidler, søk opp varenummer. Deretter handlinger
3. Enhetens spesielle innstillinger, og ned til enheter.
4. Endre enheter til volum
5. Trykk oppdater legemiddel

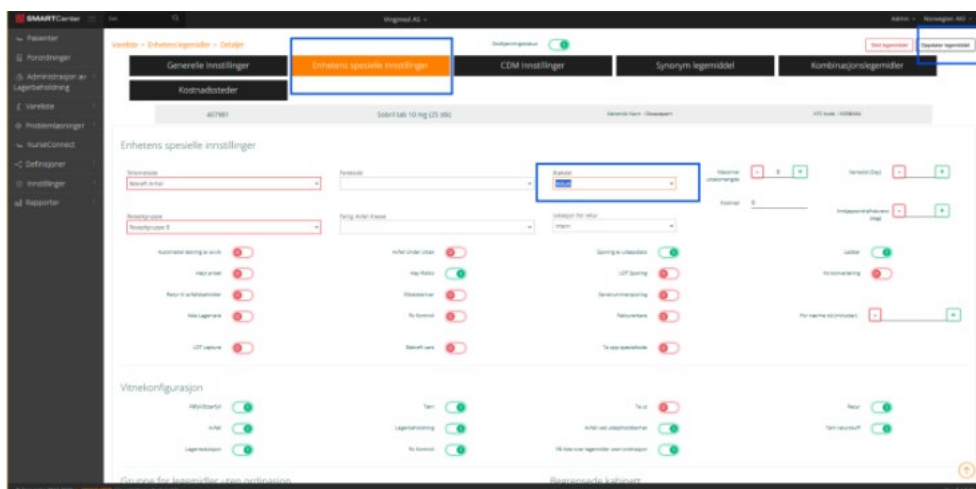


Gå deretter på administrasjon av lagerbeholdning


Kabinett og lagerbeholdning

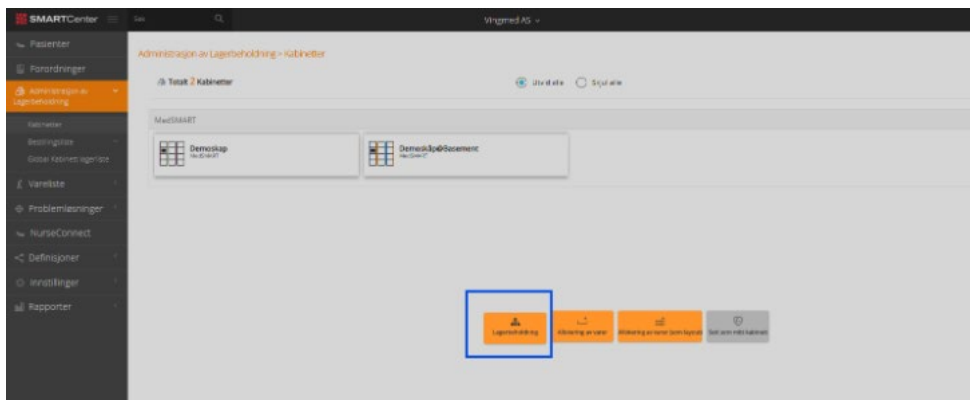

Søk opp vare- velg rediger

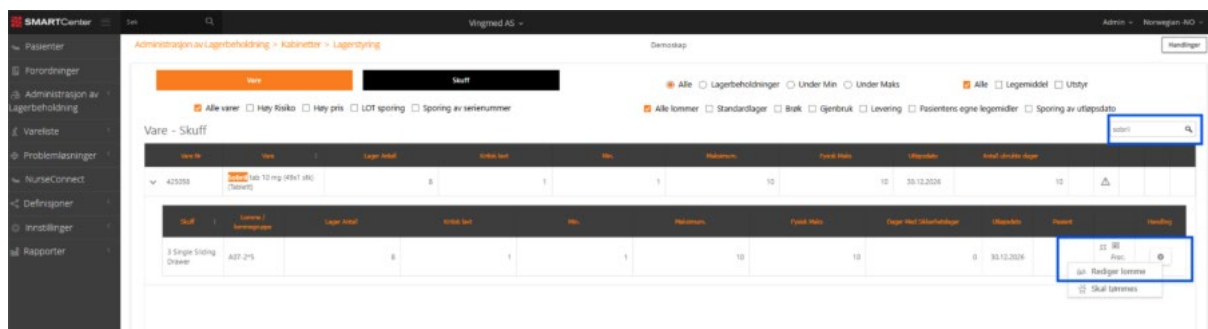


Sett på tillat delmengde (står brøkmengde i dette bildet), deretter lagre.

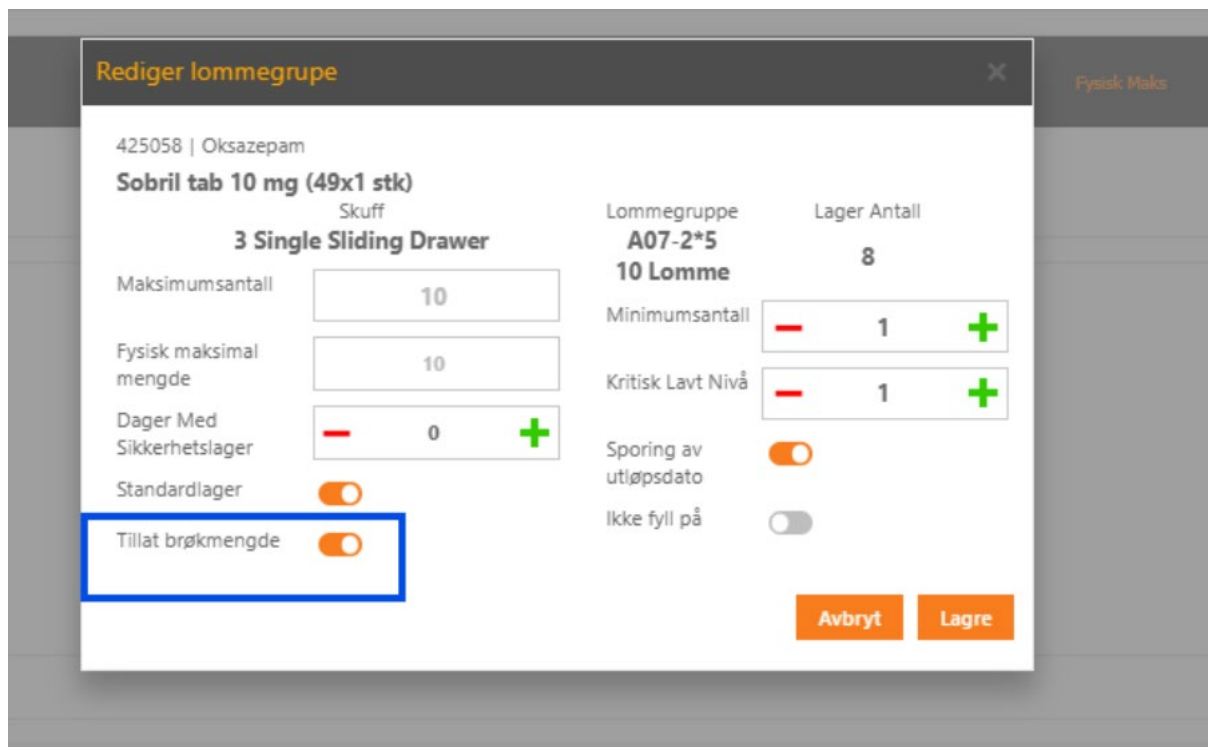

Forberede påfylling fra Smartcenter


Gå på administrasjon av lagerbeholdning- velg kabinetter - velg kabinettet dere skal på, så allokering av varer til kabinett

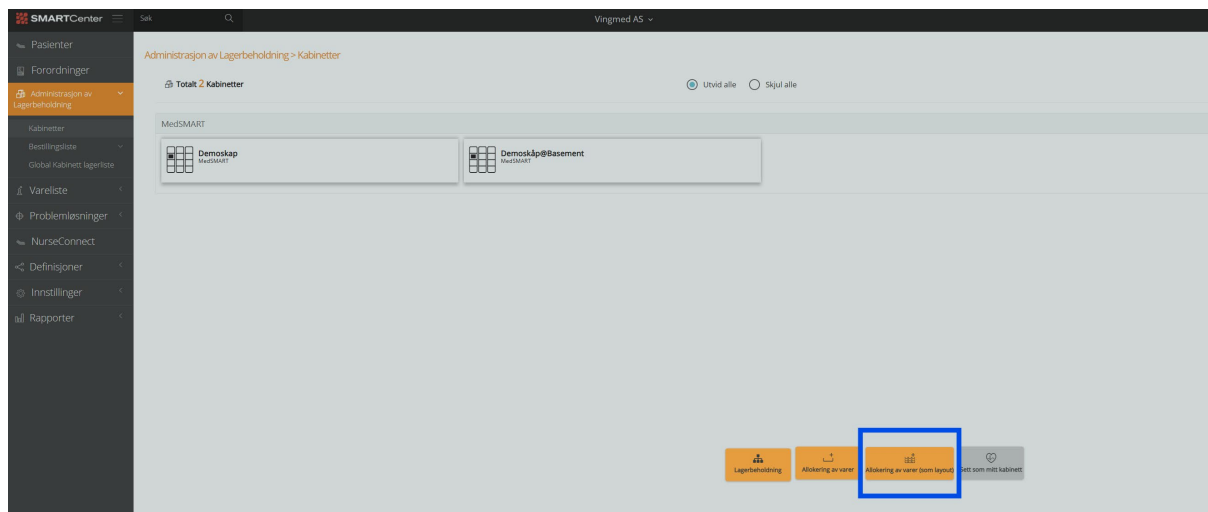


Da kommer dette bildet- velg da skuff dere vil fylle på.

Lyseblå (lilla) kant betyr endose lommer

Velg lomme (lommer) som skal fylles på

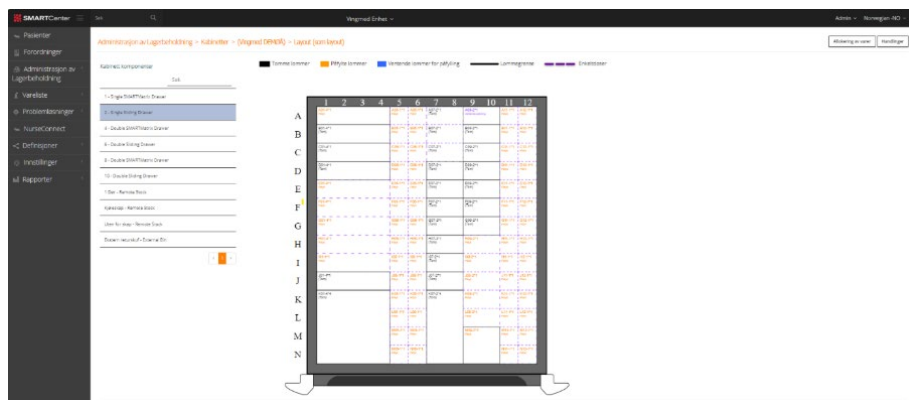


Da kommer dette bildet opp, hvor dere søker opp varen

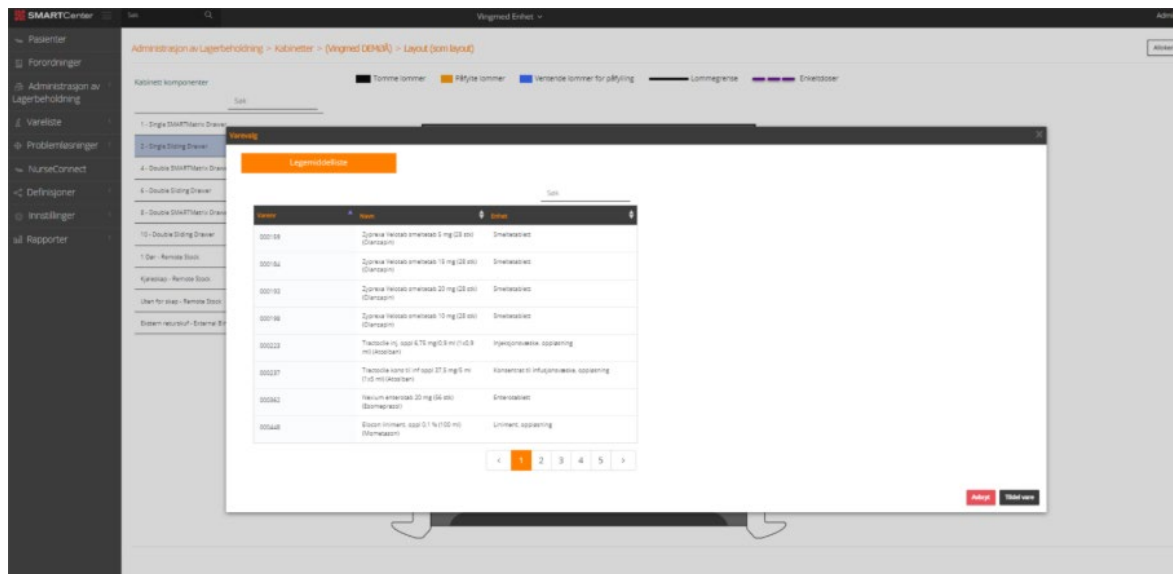

Så tildel vare

Fyll så inn maks, min, standardlager og spor holdbarhet

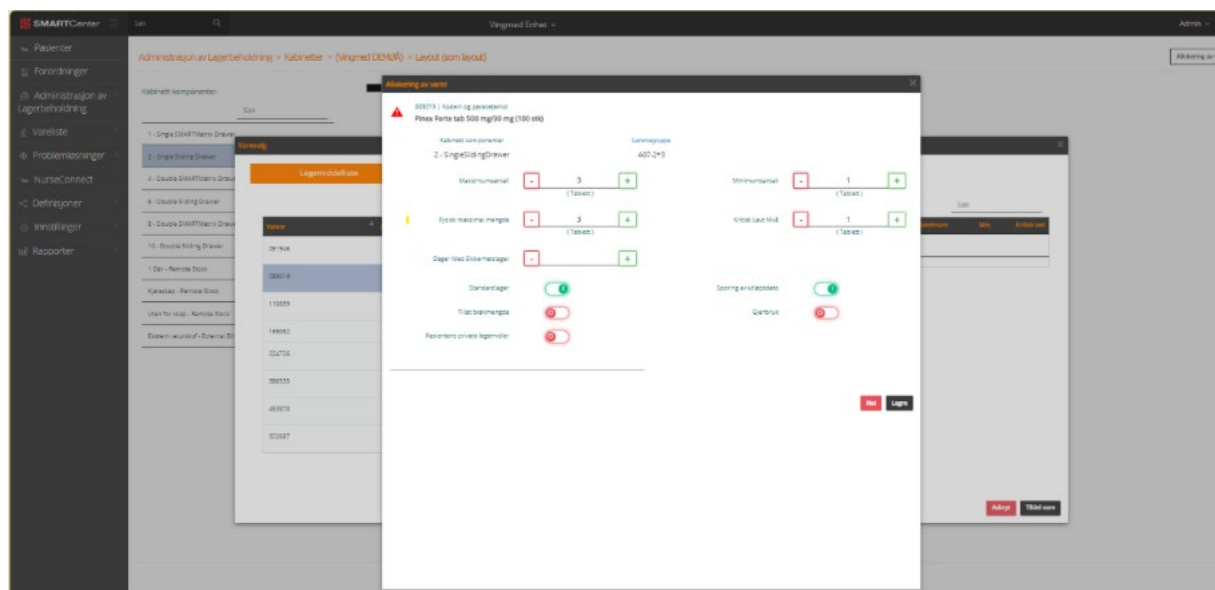


Gjør samme prosedyre igjen med alle varer som skal tildeles en plass.

Gå deretter på kabinettet

Velg lagerbeholdning, lagerfunksjoner

Velg skuff og layout.

Trykk på preparatet dere har tildelt lomme på forhånd, og deretter individuell påfylling

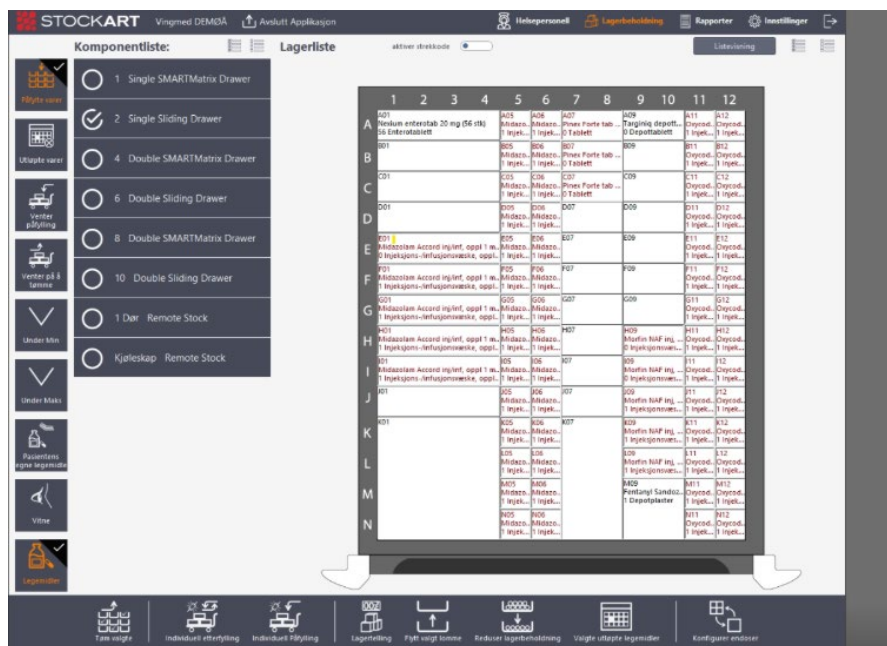

Kun feltet for påfylling og spor holdbarhet som må fylles inn.

